

取扱説明書

※ご使用いただく前に必ずお読みください


1. 取扱説明内容はインターネットにて動画配信しております <※言語は英語です>




アンローダーワン




■義肢装具士向け動画	
Unloader One® with SmartDosing™ by Össur - Fitting Instructions 「アンローダーワン」ガイド 【7分41秒】	
内容	臨床での適応例、サイズ選択、初回の装着、調整、適合チェック、 取外し、ストラップの長さ調整、可動域(ヒンジ)調整
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=cWUVvJ9SvZs
	
■装着者向け動画	
Unloader One® with SmartDosing™ by Össur - Self bracing application 「アンローダーワン」装着・取外し方法 【1分22秒】	
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=IOloXTqSBtw
	

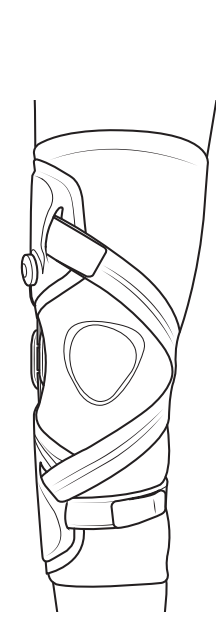

アンローダーフィット



■義肢装具士向け動画	
Unloader® FIT - Initial Fitting Instructions 「アンローダーフィット」ガイド 【5分37秒】	
内容	臨床での適応例、サイズ選択、初回の装着、調整、適合チェック、 取外し、ストラップの長さ調整
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=5WhBbsHE7jk
	
Unloader® FIT - Custom-Fit Modifications 「アンローダーフィット」カスタム修正方法 【8分18秒】	
内容	シェルのカーブ調整、ヒンジの角度
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=s7_7C_InPVs
	
■装着者向け動画	
Unloader FIT® Self Application Instructions 「アンローダーフィット」装着・取外し方法 【1分54秒】	
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=Mh490pu9TAI
	

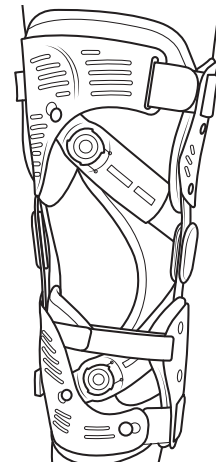リバウンドカートリッジ



■義肢装具士向け動画	
Rebound Cartilage with Flexion Control by Össur - Fitting Instructions 「リバウンドカートリッジ」ガイド 【3分14秒】	
内容	初回の装着、調整、適合チェック、取外し、ストラップの長さ調整
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=La8_JU9oov8
	
■装着者向け動画	
Rebound Cartilage by Össur - Self Application 「リバウンドカートリッジ」装着・取外し方法 【1分30秒】	
アドレス	https://www.youtube.com/watch?v=kRiv3LZoVPE
	

2.安全にご使用いただくために

警告 誤った使い方をしたときに、死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 必ず医師の指示に従って使用してください。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。
万一、破損・異常が発生した場合、または発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方への転用(再利用)された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 装着部に発赤やかぶれ、痛みが生じた場合、直ちに医師の指導を受けてください。
- 不適合が生じた場合や変形、摩耗、異音が生じた場合など、装具の異常は、身体を傷つけることがありますので、異常を発見した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
- 装具の機能操作は確実に行ってください。(特に継手部分の固定、解除の際には確実に操作してください)
- 装着の際は、ベルト、紐などにより適切な締め付けを行い、正しい位置を保持してください。

注意 誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 装着や使用の際、継手などの可動部分で体の一部や衣服などを挟んだりして傷つける場合がありますので取り扱いには注意してください。
- 本製品は常温で使用、保管してください。(特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください)

3.装具 日常のお手入れ方法

- 装具が壊れたり、汗をかいたりした時は、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。
- 面ファスナーの粘着力が低下している場合は、安全のため交換が必要となりますので、弊社までご連絡ください。
なお、毛玉などが付着した場合は、つまようじなどを面ファスナーの表面に滑らせて取り除いてください。
- 装具のお肌に触れる部分は常に清潔にしてください。
- お肌に触れるクッション部分(布や革)の汚れがひどい場合は、ぬるま湯で湿らせた布などを押し当ててふき取ってください。
- 金属やプラスチックや部分の汚れがひどい場合は、ぬるま湯で湿らせた布などでふき取ってください。

直接ぬるま湯などに装具をつけしないでください。(接着部分がはがれる恐れがあります)

4.廃棄方法 ●各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

5.品質保証書

本製品については下記「保証規定」により正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、納入日より下記の期間無償で修理いたします。

製品名	アンローダーワン/アンローダーフィット/ リバウンドカートリッジ	ご住所	〒
製造番号			
納入日	西暦 年 月 日	お電話番号	
保証期間	ヒンジ:2年間 / シェル:1年間 / それ以外の部分(ストラップなど):6カ月	お名前	
保証規定	I 保証の範囲	1.保証期間内に品質の不完全に基づく故障を生じた場合は、この保証書により無償で修理いたします。 2.ただし、次の場合は保証期間内でも有料となります。 (a)取扱過誤による故障 (b)地震など天災による故障 (c)納入日の記入がない場合 (d)保証書のご提示がない場合 (e)製品に弊社以外が改造を加えた場合の故障 (f)消耗部品及び各部の劣化による故障・損傷 (g)お客様の生理的または病理的变化により生じた破損、または不適合 3.本製品を他の方へ転用(再利用)された場合の事故などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 4.この保証書によって、お客様の法律上の権限を制限するものではありません。	
	II サービスのご利用	保証期間中、万一故障が生じた場合は、弊社へ保証書を添えてお申し出てください。	
	III ご注意	保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。	

●輸入・販売元

 パシフィックサプライ株式会社

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL (072)875-8008 FAX (072) 875-8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2015.11作成