


トーキングブリックス

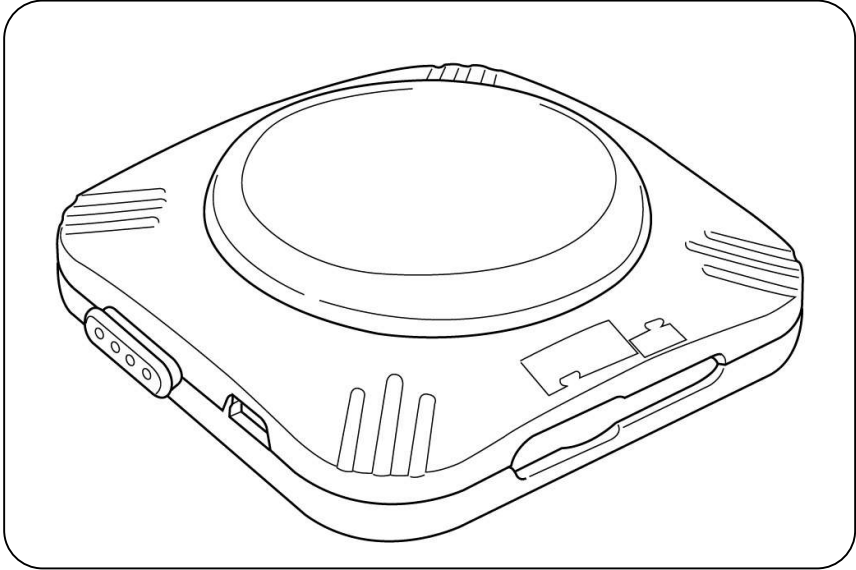

この度は「トーキングブリックス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

K Pacific Supply

- 製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
- 必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

「トーキングブリックス」について

「トーキングブリックス」とは…

- 10秒間の音声メッセージを録音・再生できます。
- 円形ボタンの上にシンボルを入れて使用する事で、目と耳での確認が出来ます。
- 複数の本体を左右・上下に組み合わせて使用出来ます。
- 磁石が裏面に内蔵されており、壁や黒板等に固定できます。

目次

1. 安全にご使用いただくために…………… 2 ページ
2. 各部の名称と仕様…………… 4 ページ
3. 使用方法…………… 5 ページ
4. 故障かなと思ったときは…………… 6 ページ
5. お手入れ・保管・廃棄…………… 7 ページ

1. 安全にご使用いただくために

「トーキングブリックス」を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1-1. 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「トーキングブリックス」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐ目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1-2. 警告に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



「トーキングブリックス」はメッセージを録音/再生する機器です。生命維持に関係する用途には一切使用しないでください。



修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



使用する方または支援する方は「トーキングブリックス」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1-3. 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。

- (1) 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
- (2) 冷暖房機器・加湿器のそば
- (3) 水に濡れやすい場所
- (4) 振動のある場所



濡れた手で「トーキングブリックス」に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。



「トーキングブリックス」本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。



落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。



炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。



酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。



本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。



本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。



本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。



本書の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。




本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2. 各部の名称と仕様

2-1. 構成部品と各部の名称

「トーキングブリックス」は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

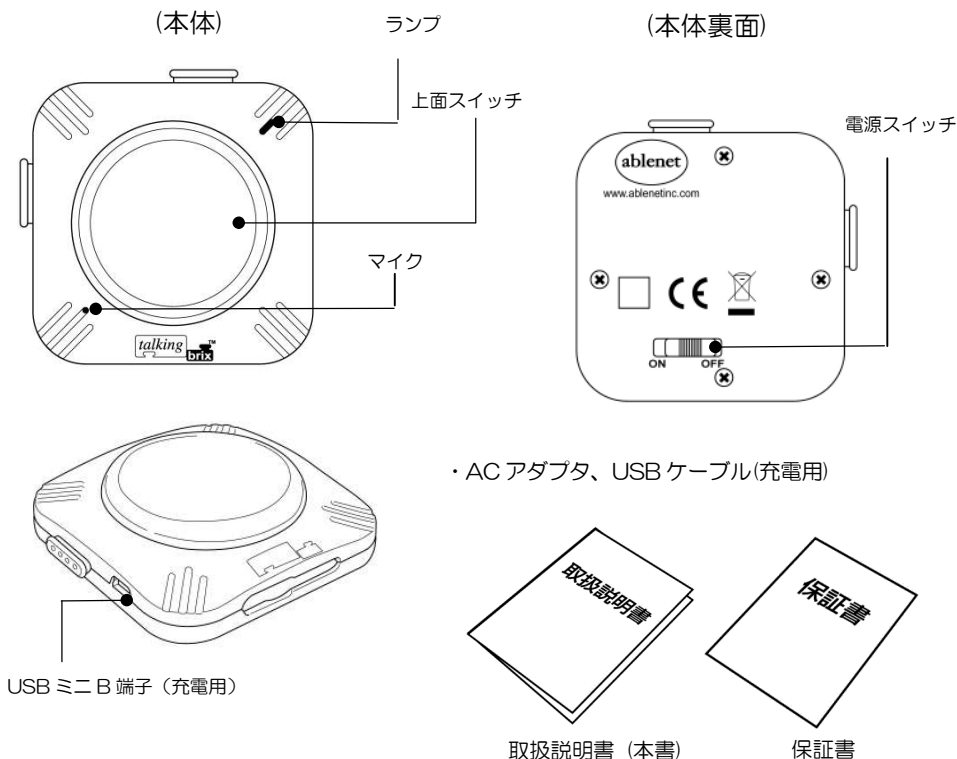

2-2. 製品仕様

部分名称	仕様	
トーキングブリックス	高さ×幅×奥行	65×65×15(mm) (1個)
	重量	44g (1個) 132g (3個)
	上面スイッチサイズ	直径 46mm
	録音時間	各スイッチ 10秒
	電源	充電式バッテリー内蔵
	設置場所	屋内

3. 使用方法

3-1. 使用する前に



警告

「トーキングブリックス」は、メッセージを録音/再生する機器です。生命維持に関係する用途には一切使用しないでください。



警告

「トーキングブリックス」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告

使用する方または支援する方は「トーキングブリックス」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



注意

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3-2. 録音方法

- 本体背面の電源スイッチをONにして下さい(本体ランプが一瞬点灯します)。
- 上面スイッチを5秒間押し続けて下さい。本体ランプが点灯します。点灯している間録音が可能です。
- 上面スイッチを離すと録音が終了します(本体ランプも消灯します)。
- マイクから口元までの距離を約15cm離すと適切に録音できます。
- 録音時間は最大10秒間です。

3-3. 再生方法

- 上面スイッチを押すと録音したメッセージが再生されます。
- 上面スイッチにはスナップスイッチキャップが取り付けられていますので取り外し、メッセージに合ったシンボルや絵カード、写真などをスイッチとスナップスイッチキャップとの間に挟み込み、利用する事ができます。

※ 再生終了時、録音ランプが一瞬点灯します。

3-4. トーキングブリックスの固定方法

- 本体の両サイドにトーキングブリックスを接続させるための接続部があります。接続させることで、複数メッセージのVOCAとして利用できます。
- 1つのトーキングブリックスを利用者の方、各個別に合わせた配置で設置できます。
- 本体内蔵のマグネットにより、黒板やホワイトボードに貼り付けることができます。

3-5. 充電方法

トーキンブリックスのバッテリーは充電式です。

付属の AC アダプタ、USB ケーブルを利用してください。

充電方法は2通りです。

1) 家庭用コンセントから充電

付属の AC アダプタと USB ケーブルを接続して、本体側面の USB ミニ B 端子に差し込んでください。家庭用コンセントに AC アダプタを差し込むと充電を開始します。

2) パソコンから充電

USB ケーブルを本体側面 USB ミニ B 端子とパソコンの USB 端子を接続してください。パソコンの電源が入っていないと充電は出来ません。

充電中は本体表面の LED ライトが赤く点灯します。充電が完了すると、緑色の点灯となります。

4. 故障かなと思ったときは

メッセージが再生されない	1 バッテリーが残り少なくなっていないですか？ 2 メッセージが録音されていますか？ 3 電源が ON になっていますか？
音は出るが、録音メッセージが再生されない	録音をもう一度行ってください
メッセージの音声が歪む	1 録音時に口元とマイクが近付き過ぎているか、声が大きすぎます。 約 15cm が適した距離です。 2 バッテリーが残り少なくなっていないですか？
メッセージの再生速度が遅くなる	バッテリーを充電してください

5. お手入れ・保管・廃棄

- 「トーキングブリックス」のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 「トーキングブリックス」は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 「トーキングブリックス」が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 「トーキングブリックス」を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

(販売元)

パシフィックサプライ株式会社

大阪営業所	〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
札幌営業所	〒060-0051 札幌市中央区南 1 条東 6-2-12 松浦ビル 1F TEL 011 (218) 5801 FAX 011 (218) 5805
盛岡営業所	TEL 019 (661) 5407 FAX 019 (661) 5408
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスピル 2F TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154 〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5
名古屋営業所	TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697 〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日博ビル 中田 1F
広島営業所	TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299 〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12 TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

(販売店)

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、
許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2010.06 作成