


スーパートーカー

ablenet™

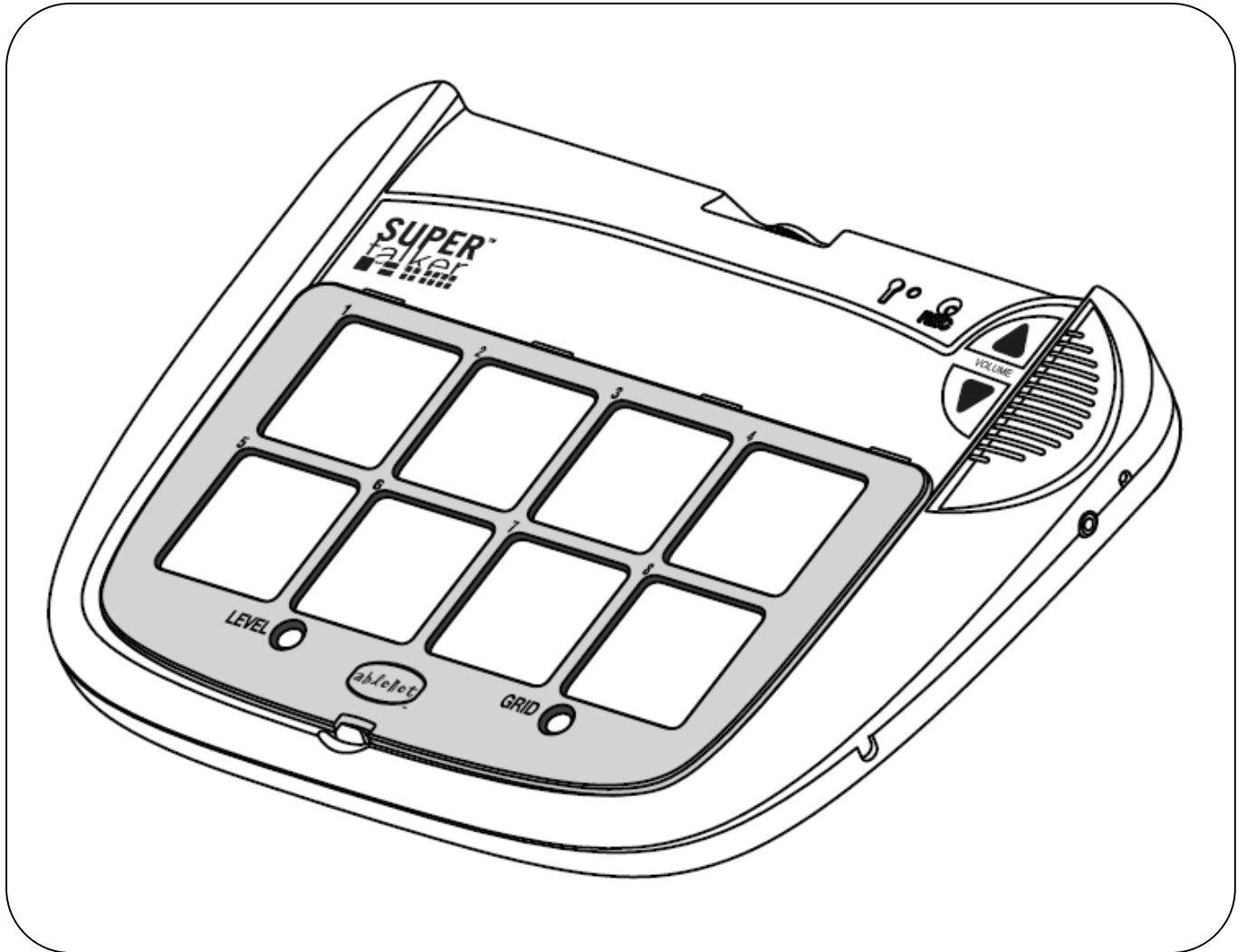

この度はエーブルネット社製 VOCA「スーパートーカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は機器を安心してご使用いただけるよう、分かりやすく説明しています。ご使用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

Pacific Supply

- 製品に関するお問合せ先は裏面をご覧ください。
- 取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
- 必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

「スーパートーカー」について

「スーパートーカー」とは...

- 最大キー分割数 8 分割、8 レベル(場面)までのメッセージを録音・再生できる VOCA (Voice Output Communication Aid) です。16 分間音声を録音・再生できます。
- キー分割は 1・2・4・8 分割の中からユーザーに応じたものを選択できます。
- 各ボタンに対応したスイッチ接続ジャック(ダイレクト)にスイッチを接続することができます。
- スイッチ接続ジャック(ステップ)にスイッチを接続すると、1 番キーから順番にメッセージを再生することができます。
- 1 番・2 番キーは外部出力が可能ですので、電動おもちゃなどを操作することができます。

目次

1. 安全にご使用いただくために.....	2 ページ
2. 各部の名称と仕様.....	4 ページ
3. 使用方法.....	5 ページ
4. お手入れ・保管・廃棄.....	7 ページ
5. メッセージ例.....	8 ページ
付録 オーバーレイシート.....	10 ページ

1 . 安全にご使用いただくために

「スーパートーカー」を活用し、安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後は必ず保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

1 - 1 . 絵表示について

この取扱説明書では色々な絵表示をしています。これは「スーパートーカー」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐ目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

1 - 2 . 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



警告

「スーパートーカー」は音声録音・再生タイプの会話補助装置(VOCA)です。生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。



警告

「スーパートーカー」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告

使用する方または支援する方は「スーパートーカー」の使用方法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



警告

本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

1 - 3 . 注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品は精密な電子部品が組み込まれております。以下のような場所で本製品を使用又は保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避けてください。

- (1) 直射日光のあたる場所、高温多湿な場所、ほこり・ちりの多い場所
- (2) 冷暖房機器・加湿器のそば
- (3) 水に濡れやすい場所
- (4) 振動のある場所



濡れた手で「スーパートーカー」に触れないでください。故障及び感電の恐れがあります。



「スーパートーカー」本体に唾液、水、粉塵、ごみ等がかからないようにしてください。動作不良や、故障の原因となります。



落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



ベンジン、シンナー、アルコール等で拭かないでください。材質の変色や変形の原因となります。



直接日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具(ストーブなど)の近くで使用しないでください。熱により変形を起こす原因となります。



酸素やオゾン等、腐食性ガスの発生する場所でのご使用はお止めください。



本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問い合わせください。



本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。



本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。またその際発生した損傷、利益損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。



本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品と異なっている場合があります。




本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

2 . 各部の名称と仕様

2 - 1 . 構成部品と各部の名称

「スーパートーカー」は次の部品で構成されています。付属品に不足はないかご確認ください。

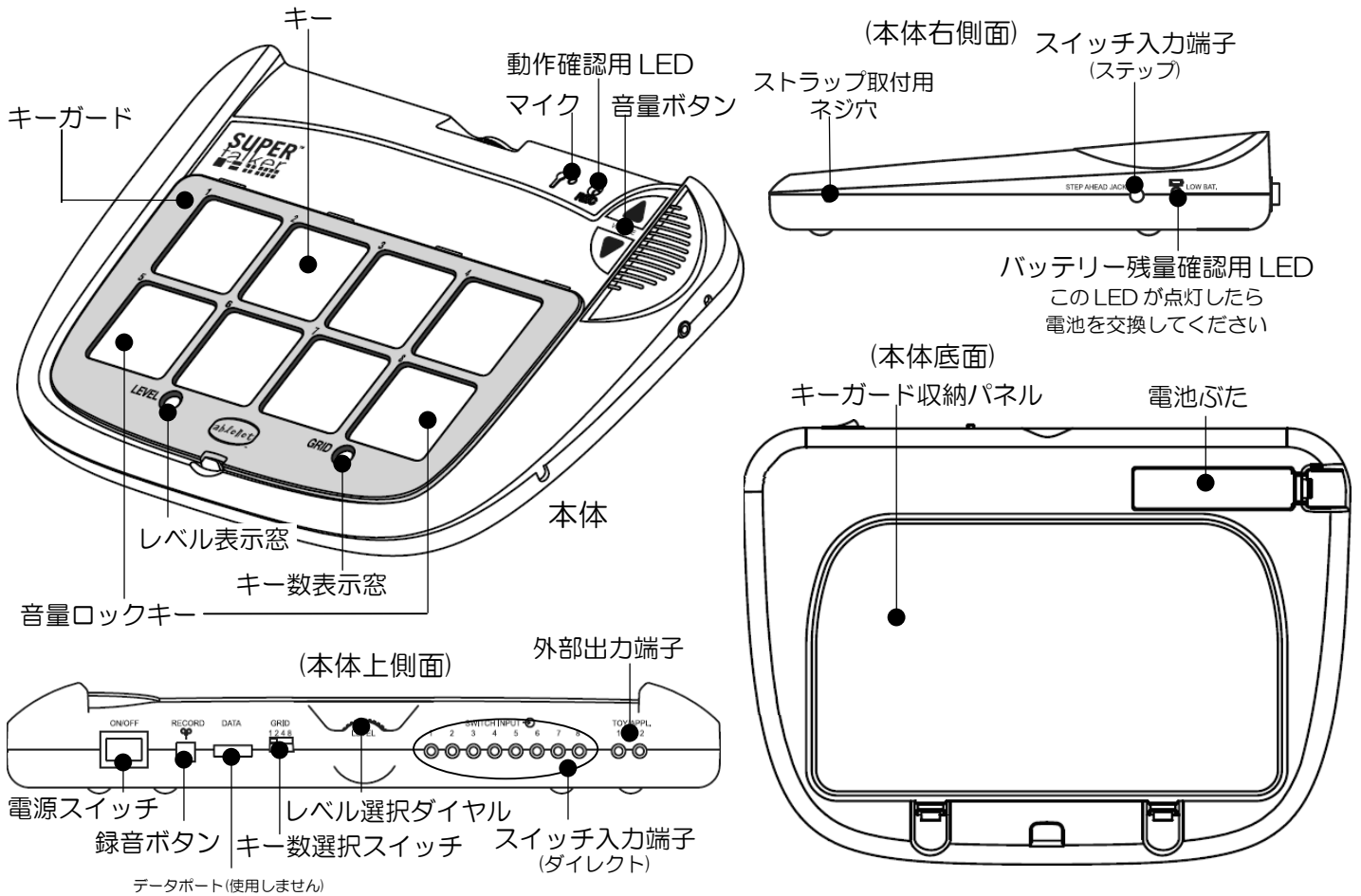


取扱説明書（本書）



保証書



トイケーブル(2本)

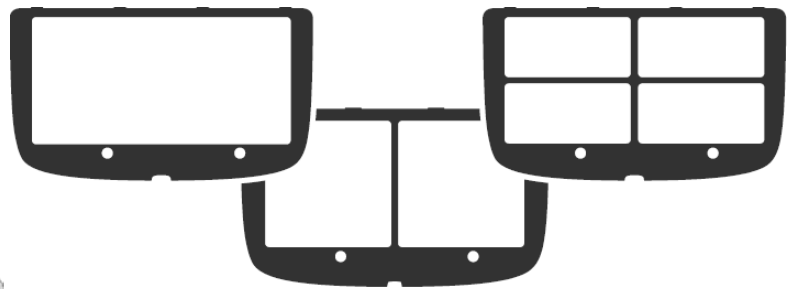

キーガード
8キーは本体に装着済
1・2・4キーは本体に収納

2 - 2 . 製品仕様

部分名称	仕様	
スーパートーカー 本体	高さ×幅×奥行	約 51×305×229(mm)
	重量	約 910g
	キー数	最大 8 キー（1・2・4・8 キーに変更可能）
	録音時間	合計 16 分
	スイッチ入力/外部出力	3.5mm モノラルジャック
	電源	単 3 アルカリ電池 4 個
	再生時間	約 27 時間(10 秒間の音声を約 9720 回再生可能)

3 . 使用方法

3 - 1 . 使用する前に



警告

「スーパートーカー」は音声録音・再生タイプの会話補助装置(VOCA)です。生命維持に関係する装置には一切使用しないでください。



警告

「スーパートーカー」の使用により障害を生じる可能性があります。使用中に、身体に痛みやしびれ、不快感、発疹、かぶれ等が生じた場合は直ちに使用を中止し、医師の指導を受けてください。



警告

修理、分解、改造などは故障の原因となりますので行なわないでください。



警告

使用中に異音や異臭、装置からの発熱、機器内部に水が入った場合等は、すみやかに使用を中止し、販売店にご相談ください。



警告

使用する方または支援する方は「スーパートーカー」の使用法や取扱注意事項等が理解できるまでご使用にならないでください。



警告


本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。

3 - 2 . 電池の取り付け




本体底面の電池ふたを開けます。
十とーの極性に注意して単 3 アルカリ電池を取り付けて、
電池ふたを閉めてください。

3 - 3 . 本体の電源を ON にする

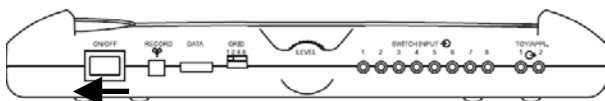

本体上側面の電源スイッチを「ON」の方に入れて、
電源を ON にします。

3 - 4 . 録音方法

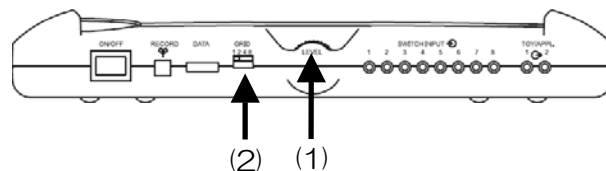

- (1) 使用するレベルを決め、本体上側面のレベル選択ダイヤル(1~8)を選択します
- (2) 使用するキー数を決め、本体上側面のキー数選択スイッチ(1・2・4・8)を選択します。本書付録のオーバーレイシート(原版)より適切なものを選びコピーを取り点線部分を切り抜いてください。(1)で決めたレベルをコピーしたオーバーレイシートの「LEVEL」横の円の中に記入してください。
- (3) (2)で作ったオーバーレイのキー数に応じたキーガードに付け替えてください。使用しないキーガードは本体底面のキーボード収納パネル内に収納することができます。
- (4) 本体上側面の録音ボタンを動作確認用 LED が赤く点灯するまで押し続けてください。「録音モード」になります。
- (5) キーを押している間、音声録音されます。録音されている間、動作確認用 LED は赤く点滅します。各キーに録音を行なってください。
- (6) 「録音モード」を終了するには録音ボタンを押してください。


● 録音時の注意 ●

- 口とマイクの距離は 30～50cm 離してください。口とマイクが近すぎると再生の際、音声割れることがあります。
- 録音可能時間が 2 分を切ると動作確認用 LED の点灯・点滅が赤から黄に変わります。
- 先に録音したキー数と異なるキー数で録音を行なった場合、そのレベルに録音されていた音声は全て削除されます。
- 録音モードに入ったら 20 秒以内に録音を行なってください。録音モードで 20 秒間操作が行なわれない場合、自動的に録音モードが終了します。

3 - 5 . 再生方法

- (1) 使用するオーバーレイに記載されているレベル・キー数を確認し、レベル選択ダイヤル・キー数選択スイッチを合わせます。また、キーガードもキー数にあったものに付け替えます。
- (2) キーを押すと録音した音声再生されます。

<1> 音量の調整

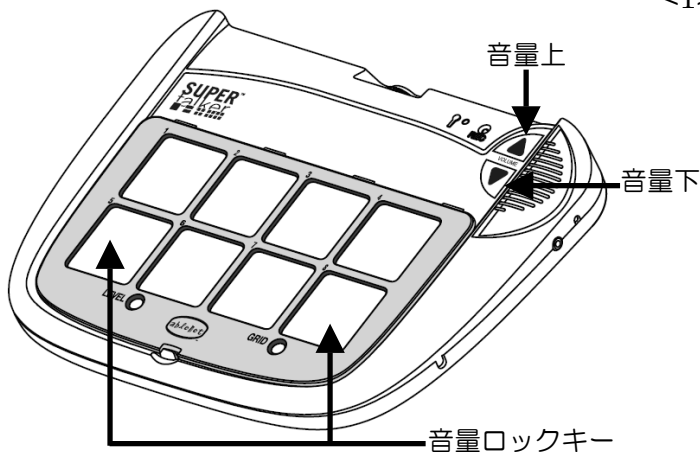

音量は音量ボタンを操作して調節してください。音量ボタンを押すと動作確認用 LED が黄で点灯します。

音量が最大・最小になると、上向き三角(最大時)、下向き三角(最小時)が書かれた音量ボタンを押すと動作確認用 LED が赤く点灯します。

一定の音量を保持(ロック)したい場合は音量ロックキー(8キーの5番キーと8番キー)を同時に押してください。音量がロックされている間は、音量ボタンを押しても音量は変わりません。また、音量がロックされている間は音量ボタンを押すと赤く点灯します。

音量のロックを解除したい場合も音量ロックキーを同時に押してください。

<2> 外部スイッチを用いて操作を行なう場合

キーを押すことが難しい場合、外部スイッチを用いてスーパーターカーを操作することが可能です。外部スイッチを用いた操作方法は各キー毎にスイッチを接続する「ダイレクト入力」とスイッチを押すと 1 番キーから順番に再生される「ステップ入力」の 2 種類があります。

1) ダイレクト入力

- スイッチを本体上側面の「スイッチ入力端子(ダイレクト)」に接続します。
- スイッチは各キーの左上に付いているキー番号に対応しており、スイッチを押すと対応したキーに録音されている音声再生されます。
- 最大で 8 個のスイッチを用いて音声の再生を行なうことが可能です。

2) ステップ入力

- スイッチを本体右側面の「スイッチ入力端子(ステップ)」に接続します。
- 最初にスイッチを押すと 1 番キーの音声再生されます。もう 1 度スイッチを押すと 2 番キーの音声再生されます。最終キー(一番右下のキー)まで再生されると、1 番キーに戻ります。
- 1 個のスイッチだけでの操作が可能です。順番に音声再生される特徴を活かした活動への使用も可能です。

<3> 電動おもちゃなどを動かしたい場合

1 番キー、2 番キーの音声再生されている間、外部出力端子に接続している電動おもちゃなどを動かすことが可能です。

(電動おもちゃとの接続には BD アダプター(別売)などをご使用ください)

3 - 6 . 電池交換

本体右側面にあるバッテリー残量確認用 LED が点滅した場合、電池が消耗している合図です。電池を新しいものに交換してください。

3 - 7 . 全メッセージの消去（初期化）

録音ボタンを、動作確認用 LED が赤く点灯し黄に変わるまで押し続けてください。スーパートーカーに録音されているメッセージが全て消去され、出荷時と同様の状態となります。

4 . お手入れ・保管・廃棄

- 「スーパートーカー」のお手入れの際は、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 「スーパートーカー」は湿気やほこりの多い場所、高温になる場所や振動のある場所には、保管しないでください。故障の原因となります。
- 「スーパートーカー」が故障した場合、販売店までご連絡ください。
- 「スーパートーカー」を廃棄する際は、各自治体の規則に従ってください。

5 . メッセージ例

5 - 1 . 1 キー 「テーマを決める」

- 目的：授業や活動の内容に見通しを持てるように内容(テーマ)を説明する。
- 準備：
 - (1) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
 - (2) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：

読書の時間「これからお話を読みます。さあ、みんなでまるくなって座って」
理科の時間「今日の理科の授業は実験だからとっても楽しいよ！」
- 使用方法：子どもがキー(または外部スイッチ)を押してメッセージを再生し活動を説明します。

5 - 2 . 2 キー 「選択する」

- 目的：2つの活動から1つを選択する機会を与える。
- 準備：
 - (3) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
 - (4) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：

図工の時間「青い紙を使おう！」「赤い紙を使おう！」
理科の時間「僕は薬品を入れます」「僕はかき混ぜます」

5 - 3 . 4 キー 「参加する」

- 目的：活動の中で人とコミュニケーションをとる機会を提供する。(意見を言う・質問するなど)
- 準備：
 - (5) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
 - (6) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：

読書の時間 (内容について)「この本大好き」・(指示)「ページをめくって」
(質問)「このページの中には誰がいる？」・(意味について)「このページで一番小さいものは何？」


5 - 4 . 8 キー 「コミュニケーションをとる」

- 目的：学校や施設、生活の中でコミュニケーションをとる。(持っている情報を共有する)
- 準備：
 - (7) 授業や活動を表すシンボルを使ったオーバーレイを使用する。
 - (8) 授業や活動の内容を録音する。
- メッセージの例：


メッセージ1：注意を引く「ねえねえみんな聞いて！」
メッセージ2：会話の開始「準備はいい？」
メッセージ3：大まかな話を伝える「今日学校で楽しいことがあったよ」
メッセージ4：質問「何か当ててみて」
メッセージ5：質問「この本と関係があるんだ！分かる？」
メッセージ6：質問「惜しい！！もう1回考えてみて」
メッセージ7：ヒントの提供「近くに来て。ヒントをあげるから」
メッセージ8：情報の共有「今日は本を読んだよ。僕はページをめくる役だったよ！」



付録 オーバーレイシート 1キー

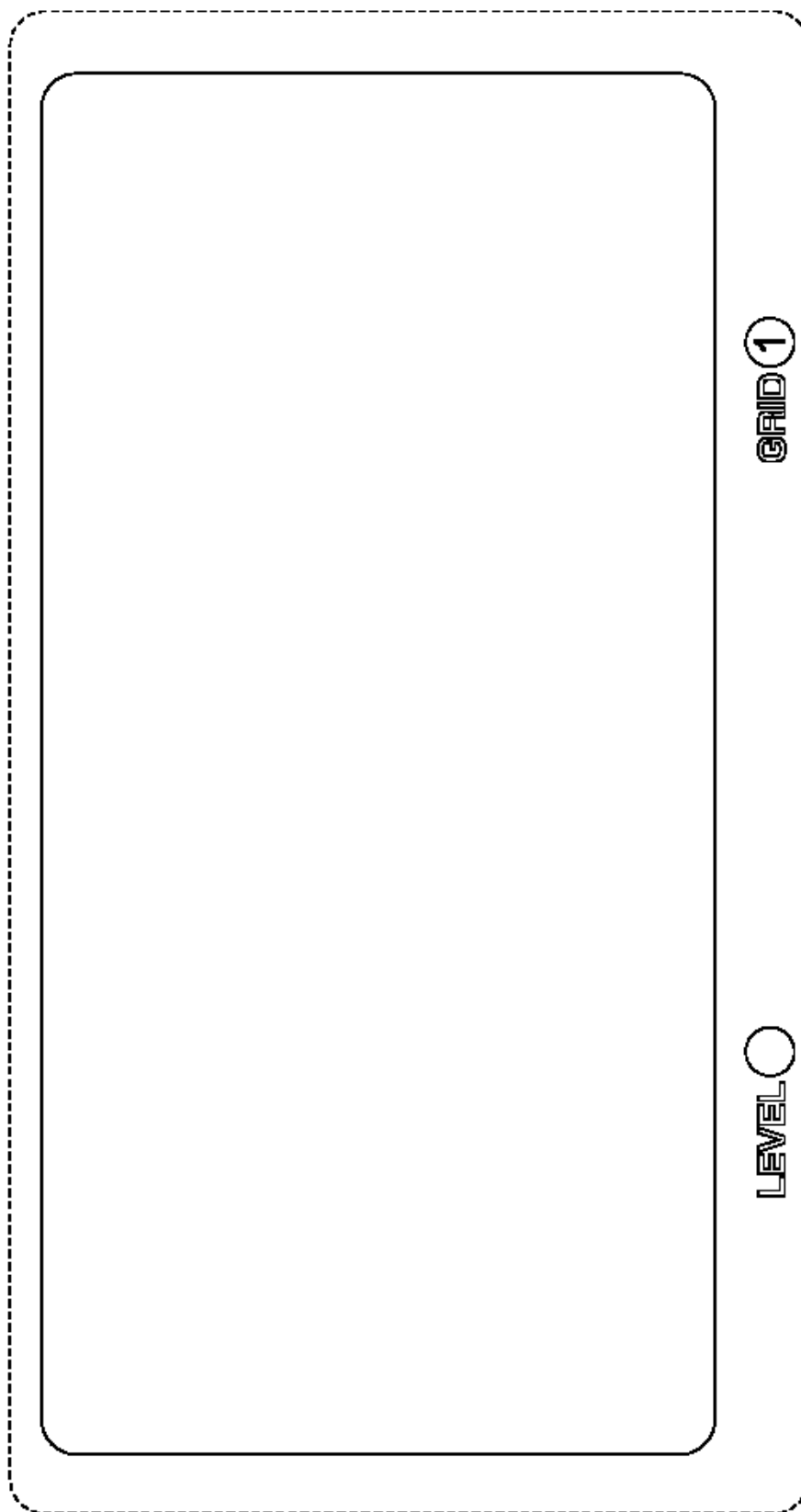

付録 オーバーレイシート 2キー

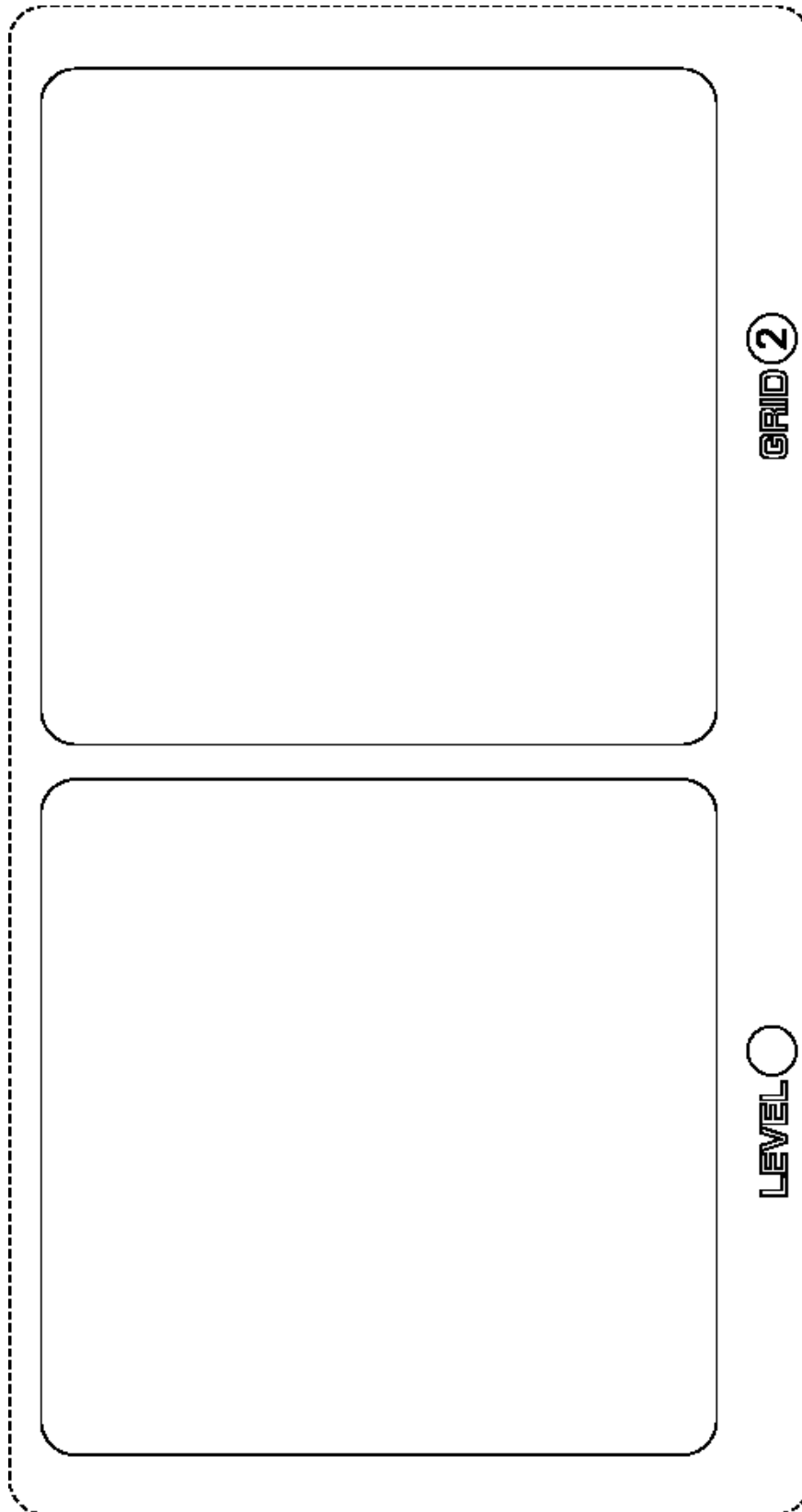

付録 オーバーレイシート 4キー

GRID 4

LEVEL 0

付録 オーバーレイシート 8キー

GRID 8

LEVEL 0




(販売元)

パシフィックサプライ株式会社

本社営業部	〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
札幌営業所	〒060-0051 札幌市中央区南1条東6丁目2-12 松浦ビル1F TEL 011 (218) 5108 FAX (218) 5105
盛岡出張所	TEL 019 (661) 5407 FAX 019 (661) 5408
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル 2F TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154
名古屋営業所	〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5 TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697
広島営業所	〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日ヶ丘ビル 中田 1F TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299
福岡営業所	〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12 TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>

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(販売店)



※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。