

テーマ：置く

ねらい

1)モノを指定された場所に置くことができる。

移動したいモノ、置きたい場所を適切に伝えられるようにしましょう。

例1：生徒はアイテムを選択し、仲間に置く場所を伝えます。
使用するVOCA:ビッグマック / スーパートーカー



支援者はビッグマックにモノを置く場所の指示を録音します。

例えば、「これを机に置いてください」。

支援者は3つのアイテムの選択肢を示します。

選択肢：複数のモノの名前や位置をスーパートーカーに録音することで、生徒はより多くのアイテムや場所を選択できます。

生徒はVOCAの選択肢から選び、仲間にアイテムを置く場所を指示します。



ポイント

- ・工夫すれば自分でできそうな生徒には、ループなどをつけて指を引っ掛けやすくすると移動しやすくなります。
- ・選択肢の多いVOCAを使うと難易度が上がります。移動したいモノや場所の選択肢を徐々に増やしてみましょう。