

## テーマ：切り抜く ねらい

1)型抜きやはさみを使って形を切り抜くことができる。

好きな形に切り抜くことができるように指示を伝えましょう。

例1：生徒は仲間に形を切り抜くように頼みます。

使用するVOCA：ビッグマック



支援者はVOCAに「この形を切り抜いてください」と録音します。  
支援者は表に形の選択肢を表示します。

生徒は表から形を選び、仲間にVOCAを使用して形を切り抜くように頼みます。



例2：生徒は複数のVOCAで形を切り抜くように仲間に頼みます。

使用するVOCA：スーパートーカー / クイックトーカー



支援者はVOCAに「～を切り抜いてください」と複数の形を録音します。  
支援者はVOCAに形を示す写真を貼り付けます。

生徒はVOCAを使用して、特定の形を切り抜くように仲間に頼みます。



## ポイント

- ・様々な形に切り抜けるクラフトパンチを使うと、簡単に切り抜くことができます。
- ・切り抜いた形を使って作品を作ることもできます。