

テーマ：吹く（しゃぼん玉）

ねらい

①上手にしゃぼん玉をつくろう。

遊ぶ楽しさを引き出しましょう。

子どもは遊びを通じて、一般常識や友人関係など、様々なことを学びます。

例1：生徒は仲間に「吹いて」と指示を出します。

使用するVOCA： ステップバイステップ ウィズレベル

支援者はVOCAに
「1、2、3... 吹いて！」
と録音します。
支援者はストローに石鹼液
をつけて、生徒の指示を
待ちます。



生徒は支援者がストローに
石鹼液をつけるのを待つ
てから、VOCAで「吹いて！」
と指示を出します。



例2：しゃぼん玉で遊ぼう。
使用するVOCA：ウゴきんぐ

ウゴきんぐ
電化製品を簡単スイッチ操作



支援者は、ウゴきんぐに
ドライヤーを繋いで
スイッチ操作で動かせる
ようにします。
選択肢：タイマーを使う
こともできます。



生徒は好きなタイミングで
VOCAを操作します。



ポイント



- ▶ 生徒は自分のタイミングで「吹いて」と指示を出します。
- ▶ 「押したら動く」という因果関係の理解が深まります。
- ▶ 自ら操作を行うことで、受け身ではない、能動的な発信ができます。
- ▶ ドライヤーの風の強弱を調整して、飛び方の違いも観察してみましょう。