

## テーマ：運ぶ

ねらい

- ① 支援者に指示を出し、指定の場所にモノを運ぶことができる。
  - ② 自分の力で運べるように工夫することができる。
- 的確に指示を出して、モノを運びましょう。

例1：生徒はVOCAを使って支援者に指示を出し、その場所にモノを運びます。

使用するVOCA：ステップバイステップウィズレベル

支援者はVOCAに特定の場所にモノを運ぶための一連の指示を録音し、それに合う絵記号（写真・シンボル）を貼り付けます。




生徒はVOCAを複数回使って、支援者に指示を出し、指定された場所にモノを運びます。




例2：生徒はVOCAを使って、指定された場所にモノを運ぶように支援者に頼みます。

使用するVOCA：アイトークウィズレベル



支援者はVOCAに2つの異なるモノと特定の場所の名称を録音し、ボタンに対応する絵記号（写真・シンボル）を貼り付けます。



生徒はVOCAを使って、支援者に1つまたは2つのモノを指示する場所に運ぶように指示します。

### ポイント

- ▶ 生徒が自分の力で運べるように、専門家と相談しながら、かごや入れ物を取り付けてみるのもいいでしょう。

