

テーマ：選ぶ

ねらい

- ① 選択肢の中から希望するものを選ぶことができる。
- ② 欲しいものを伝えることができる。

様々な場面で、自分で選択することが必要になります。  
自分で決め、意見を伝える力をつけましょう。

例1：生徒はVOCAを使用してランダムに選びます。

使用するVOCA：オールターンイットスピナー



オールターン  
イットスピナー  
スイッチで選べるおもちゃ

支援者はオールターンイットスピナーの大きなシートに  
選択肢を表す絵記号（写真・  
シンボル）を貼り付けます。  
支援者は必要に応じてスイッチ  
をVOCAに接続します。  
選択肢：明るい色のシートを付  
けることによって、矢印と選  
択肢に注目を集めます。




生徒はVOCAを使って、  
絵記号（写真・シンボル）  
をランダムに選びます。  
注：初心者にとっては、  
ランダムな選択は、絵記号の  
代表的な特徴を理解するの  
に役立ちます。




例2：生徒はVOCAを使って2つの選択肢から選びます。

使用するVOCA：アイトークウィズレベル




支援者はVOCAに2つの選択肢の絵記号（写真・シンボル）を貼り付け、その絵の説明を録音します。




生徒はVOCAを使って  
選択肢を選びます。  
例えば、林檎かオレンジを選ぶ、  
ビンゴかカードゲームを選ぶ  
など。

例3：生徒はVOCAの複数の選択肢から選びます。

使用するVOCA：スーパートーカー / クイックトーカー



支援者はVOCAに選択肢の  
絵記号（写真・シンボル）  
を貼り付け、その絵の説明  
を録音します。



生徒は選択肢の中から  
1つを選びます。

例4：生徒はVOCAの3つの絵記号から選びます。

使用するVOCA：トーキングブリックス



トーキング  
ブリックス

A voice for everything!



支援者は3つのVOCAにそれぞれ1つの選択肢を録音し、それに合う絵記号（写真・シンボル）を貼り付けます。縦/横に3つのVOCAを組み合わせます。



生徒は3つのVOCAを聞いて、選びます。



例5：生徒はVOCAで「私は～がほしい」とアイテムや行動を選びます。

使用するVOCA：トークトラック



トークトラック

録音計型のVOCAが実現しました!

支援者は最初のVOCAのキーに3つの選択肢と「ほしい」を録音します。各選択肢に合わせて絵記号（写真・シンボル）を貼り付けます。



生徒はVOCAで、「ほしい」と選んだアイテムや行動を言います。



ポイント

- VOCAの選択肢の数が多いほど、難易度が上がります。
- 最初は2つの選択肢から選び、慣れてきたら少しずつ選択肢を増やすことで、たくさんある中から選ぶ力がつきます。

