

テーマ：掃除する

ねらい

①適切な指示を出して、整理整頓することができる。
身の回りをきれいに保ち、快適に過ごせるように
しましょう。

例1：生徒はアイテムを押して、入れ物に入れます。



支援者は、生徒の机や膝上の
トレーに（片づける）アイテム
を置いて、その端に入れ物を
固定します。



生徒は（片づける）
アイテムを押して、
入れ物に入れます。

例2：生徒は清掃する方法の写真を仲間に見せ、指示を出します。

使用するVOCA：ビッグマック



支援者は3つの各VOCAに
1つの指示を録音して、
特定の場所を清掃します。

例えば、

「1.布を濡らしてください。」

「2.机を拭いてください。」

「3.机を乾かしてください。」

など。

各方法の写真を撮り、
VOCAに貼り付けます。
左から右の順番で配置します。



生徒はVOCAを使って
仲間に見せ、指示を出し、
最初の清掃を完了します。
生徒は、仲間がその清掃を
完了するまで、次の指示を
出すのを待ちます。

例3：生徒は清掃をするための手順を示します。

使用するVOCA：ステップバイステップウィズレベル /
トーキングブリックス

支援者はVOCAに手順を録音して、特定の場所を清掃します。例えば、

「1.布を濡らしてください。」

「2.机を拭き取ってください」

「3.机を乾かしてください。」

など。

手順に合うように、VOCAに写真を貼り付けます。

トーキングブリックスを

左から右の順番に接続します。



仲間が各手順を完了したら、VOCAを使って指示を出します。

生徒は仲間が1つの手順を完了するまで、次の指示を出すのを待ちます。



ポイント



- ▶ 生徒が片づけやすいように工夫することで、自力でできることが増えます。
- ▶ VOCAに清掃する場所と方法を録音し、生徒が選択して指示を出せるようにすることで、適切な清掃方法を学習できます。