

テーマ：説明する

ねらい

- ① 物語の意味を理解することができる。
- ② 物語の特徴や詳細を説明することができる。

わかりやすく伝える力は大切です。円滑なコミュニケーションができるように力をつけましょう。

例1：生徒は複数のVOCAを使用して絵を描写したり、本文に解説を付けたりして、物語の特徴や詳細を説明します。

使用するVOCA：スーパートーカー / クイックトーカー



支援者はVOCAに、物語の登場人物、設定、行動、目的、または動物についての説明を録音します。例えば、「カメはゆっくりです」、「ウサギとカメは外にいます」など。



生徒はVOCAを使って、物語の絵や本文の解説をします。

生徒は、物語の特徴や詳細を説明するために、絵や絵記号（写真・シンボル）を視線、接触、指さし、言葉などで選びます。

例2：生徒はVOCAを使用して、物語のそれぞれの特徴、登場人物、目的、動物、または行動を指示します。

使用するVOCA：ビッグマック

支援者は、登場人物、設定、行動、目的、または動物に関する説明をVOCAに録音します。

例えば「ウサギが眠ってる！」など。

選択肢：写真に注意を引くための枠を用意します。枠を作るには、色紙に穴を開け、耐久性のためにラミネートします。



生徒が物語について聞くときや、本文や写真についての説明を録音する時にVOCAを使います。



例3：生徒は物語の特徴や詳細を描写する絵や絵記号（写真・シンボル）を選びます。

支援者は物語の特徴や詳細を表す絵や絵記号（写真・シンボル）を提供します。

例えば、肉食動物を示す肉の写真、またはカメの色を示す緑色など。表に3つの選択肢を表示して、本文を読む時に生徒に選ばせます。

選択肢：生徒に現在のページで読んだり見たものに基づいて選択をさせます。

例えば、「ライオンは何を食べますか？」と聞きます。



生徒は物語の特徴や詳細を説明するために、絵や絵記号（写真・シンボル）を視線、接触、指さし、言葉などで選びます。



ポイント



- ▶ 最初に物語の主人公や登場人物を説明すると分かりやすいです。
- ▶ 生徒と一緒に、物語を説明するための解説や絵記号を考えることで、物語の意味をより深く理解することにつながります。