

テーマ：描く

ねらい

- ① 線や絵を描くことで気持ちを表現することができる。
- ② イラストを描くことでよりわかりやすく伝えることができる。

絵を描くことで、表現力、想像（創造）力、観察力などが高まります。自己表現を促して楽しみましょう。

例1：生徒はVOCAを使用して仲間と描きます。

使用するVOCA：リトルステップバイステップ /
ビッグステップバイステップ



支援者はVOCAに、
描く順序の指示を録音します。
例えば、
「公園の計画を描こう」
「まず草を描く」
「高い木を描く」
「散歩道はどうしますか？」
など。



生徒はVOCAを複数回使い、
仲間に描く指示を出します。

例2：生徒は複数のVOCAを使用して、仲間と描きます。

使用するVOCA：アイトークウィズレベル / クイックトーカー



支援者はVOCAに異なるデザインの絵記号（直線、水玉、曲線、四角、円など）を貼り付けます。支援者はこれらのデザインに関連したものを描く指示を録音します。例えば、「直線を描いて」



生徒はVOCAを使って、仲間に指示をして絵やデザインを描きます。

例3：生徒はインクをつけた電動おもちゃを使って描きます。

使用するVOCA：ジェリービーンスイッチツイスト



支援者は移動ロボットやバッテリー駆動のおもちゃの乗り物の四隅にインクをつけます。トレーに用紙を置いて固定します。ステンシルを紙の上に固定します。スイッチとタイマーの受信機とワイヤレススイッチをおもちゃに取り付け、紙の上におもちゃを置きます。



生徒はおもちゃのスイッチをオンにして紙を動かし、ステンシルで色をつけます。ステンシルを取り外すと、色のついた形や図形ができます。選択肢：ステンシルなしのフリーハンドで描きます。

ポイント



- ▶ 最初は直線や四角など簡単なデザインから始めます。
- ▶ スタンプやステンシルを使って様々な形や絵を描いてみましょう。