


テーマ：綴る

ねらい

① 単語を順番に並べて文をつることができる  
漢字の読み方や送り仮名を正しく使えるように  
覚えましょう。

例1：生徒はVOCAを使用して綴ります。


使用するVOCA：ステップバイステップウィズレベル



支援者はVOCA  
(ステップごとに1つ)  
に単語または名前の各文字を  
順番に録音します。

支援者は、生徒が単語または  
名前の綴りを見ることができ  
るように、生徒が発言する各文字  
を書きます。

選択肢：生徒が文字を置くため  
に単語の描かれた正方形の紙を  
置きます。



生徒はVOCAを使用して  
綴り、支援者が各場所に  
置くのを待ちます。

選択肢：生徒は文字を選んで、  
正方形の紙に文字を並べて  
置きます。

### ポイント



- ▶ 例えば、支援者が漢字を見せて、生徒が読み方をひらがな/カタカナで選んで紙に書きます。
- ▶ 「づ」と「ず」の違いや、正しい送り仮名を選ぶのも学習になります。