



オズール社製品紹介

第2世代のICEROSS

2000年以降発表された製品群です。第1世代のICEROSSに付加価値を加えた製品群です。

素材には、デルモシル、デルモゲルの高付加価値シリコーンを採用、以下の共通する新機能を提供します。

アクティブ・スキン・ケア

肌の潤いを保つワセリン及びアロエヴェラ成分を含有。アロエヴェラは、肌をソフトに保つだけ無く、抗菌機能も示唆されています。ICEROSSで懸念される、肌のトラブルの危険をできるだけ回避します。

シルケン内側表面

インターフェース環境を高めるため、シリコーン表面を特殊処理。高い力がシリコーンにかかった場合、制御された範囲で素材が滑り、皮膚を損傷から守ります。過度の粘着力を排し、皮膚を守ります。

ARC™ Advanced Rotation Control

最先端の回旋制御。ICEROSSの外側及び下方の特殊印刷部分、外ソケットと抗して働き、効果的に回旋制御。

サップレックス外側カバー

サップレックスは全ての接合部で結合し、縫い目はシリコーンの内部に埋め込まれています。18,000回の標準的摩擦テスト後でも破損せず、5000回の回旋摩擦テスト後でも破損しませんでした。従来製品の問題である、カバーの剥離の問題が大幅に改善されました。

ライナーの交換が可能

第2世代の全てのライナーはICEROSSコンフォートと同じ輪郭で設計されており、外ソケット交換せずに製品を変更できます。断端末部はロック、クッションライナーいずれの方法でも使用できるよう、取外し交換が可能です。



ICEROSS デルモ

< 低活動者向 >
デルモゲルシリコーン
デュロメーター硬度20

- 装着者像：
低活動レベル (K1 及び K2)、
クッション性と快適性を優先する。
- クッション効果：
デルモゲルが、断端へのクッション
効果を提供する。
- 快適性：
アクティブ・スキン・ケア成分が
肌の健康を増進する。



ICEROSS スタピロ

< 中～高活動者向 >
デルモシルシリコーン
デュロメーター硬度50

- 装着者像：
中活動 (K2 及び K3)
- 安定性と支持性：
デルモシル + マトリックス +
遠位アタッチメント 高い支持性。
- 快適性：
アクティブ・スキン・ケア成分が
肌の健康を増進する。
デルモシルシリコーンは遠位部の
傷をmobilizeする。
- 耐久性：
裂けに強いデルモシル + 耐摩擦性
の高いサップレックス外カバー



ICEROSS スポーツ

< 高活動者 / アスリート向 >
デュアル・デルモシルシリコーン
デュロメーター硬度30 (内側) /
50 (外側)

- 装着者像：高活動 (K4)
- クッション効果と支持性の高バランス：
2層シリコーン設計

第2世代ICEROSSの製品選択チャート ~ 活動度のみで製品選択が可能 ~

