


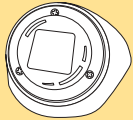
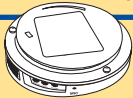


朝の会の時間

朝の会はコミュニケーションに最適の時間です。子ども達は前の晩にあったことや今興味のあることについてクラスの友達とおしゃべりするのが大好きです。コミュニケーションエイドにいろいろな質問を録音すると友達とおしゃべりが楽しくなります。



準備するもの 下記のエーブルネット製品、コミュニケーションエイドに貼るシンボルや写真
学習の目的 友達との交流を通して、聞くこと、コミュニケーションすることを学ぶ

活動	ビッグマックに録音する1つのメッセージ(例)	ステップバイステップウィズレベルに録音するメッセージ(例)
1. 曜日を学ぶ練習をする	<p>「みなさん、おはようございます。今日は火曜日です。火曜日の1時間目は何の授業かな？」</p> 	<p>「今日は火曜日です」 「昨日は月曜日でした」 「明日は水曜日です」 「学校がお休みなのは、土曜日と日曜日です」</p> 
2. 天気について話をする	 <p>「今日は雨です。雨の日には何をするのが好きですか? 体育館で遊びますか? それとも図書室で本を読みますか?」</p>	<p>「今日は雨です」 「この1週間は雨が多いです」 「明日は晴れると天気予報で聞きました」 「明日は外で何をしますか?」 「私は運動場で遊びたいです」</p>

その他にも・・・

オールターンイットスピナーにクラスメートの写真を貼って、発表の順番を決める。
 前の晩に家であったことをクラスの友達に伝える。
 週の当番を皆に知らせる。

重度の障害を持つ子ども達にとってコミュニケーションエイド(VOCA)を持つことは、言葉を持つだけではなく、周りとのつながりや、コミュニケーション、参加の機会を持つ手段になります。エーブルネット社のVOCAは使いやすく、どんな場面においてもその力を発揮します。アイデア次第で子ども達の参加の機会やできることがさらに増えます。



ビッグマック



ステップバイステップウィズレベル



オールターンイットスピナー