

# レッツサウンド



好きな時間に、  
好きな場所で、  
好きな音楽を。

D-snap は、Panasonic が販売する携帯音楽プレーヤーです。ステレオヘッドフォンを接続し、気軽に音楽を楽しむ事ができます。

D-snap に専用コントローラを組み合わせた商品が『レッツ・サウンド』です。大型押しボタンや、外部入力スイッチでの操作が可能になります。



レッツサウンドでお気に入りの音楽を楽しむ…携帯用音楽プレーヤー (D-snap) の手軽さや便利さはそのままに、小さなボタンの操作を大きなボタン、あるいは外部入力スイッチで行う機器がレッツ・サウンドです。

これにより、一層多くの方が D-snap を利用する事ができます。



## ●直接ボタンを押して操作

レッツ・サウンドの5色のボタン(それぞれ再生/停止、次曲、前曲、音量大、音量小に対応)を直接押して操作。ボタンは周囲にくぼみがあるため、指先が安定しない方でも押しやすい形状になっています。またボタン自体はクリック感があり、押したことを指先で感じることができると同時に、音と光で入力できたことを知らせてくれますので、操作ミスを軽減します。指の代わりに棒などを使ってボタンを押すことも可能です。



## ●スイッチ一つのオートスキャン方式で操作

ボタンを押し分けての操作が難しい場合には、身体の可動部位に対応した様々な入力スイッチを利用して操作をすることが可能です。レッツ・サウンドに接続した入力スイッチを操作する(押す、触れるなど)と、5色のボタンの左側のマークに内蔵されたLEDが一定間隔で順番に点灯します。選択したいマークが点灯している時に再度入力スイッチを操作することで、対応する機能を実行させることができます。

## ●スイッチ一つで再生/停止の操作

「再生/停止」専用ジャックに入力スイッチを接続すれば、入力スイッチを操作することで、音楽を「聴く、止める」に限定して楽しむこともできます。単純に「聴く、止める」だけで良いと言う方や、機器の理解が難しい方にも音楽を楽しんで頂けます。

D-snap をセットしたままでも全てのスイッチが操作できます。介護者の方にも簡単にサポートして頂けます。SDメモリーカードを交換すれば、学校などで複数のユーザーで共有することも出来ます。背面には固定用の三脚ねじを用意。市販のカメラ用三脚などを使って簡単に固定できます。

資料請求など



パシフィックサプライ  
携帯サイト

## 価格

¥44,940 (税込) D-snap' SV-SD870 一式と操作部含む。入力スイッチは別売

## ●主な仕様

- 外形寸法・・・幅 85.2mm × 高さ 140mm × 厚さ 24mm
- 重量・・・約 175g (D-snap、単 4 乾電池 2 本を含む)
- 色・・・白 (同梱の D-snap もホワイトのみ)
- セット内容・・・レッツ・サウンド、単 4 乾電池 2 本、取扱説明書、D-snap オーディオプレーヤー (SV-SD870)  
※ D-snap には、本体、ステレオインサイドホン、SDメモリーカード(2GB)、パソコンとの接続ケーブル、ソフト等を含む

入力インターフェース・・・Φ 3.5 モノラルジャック (1 スイッチ・オートスキャン方式)  
「再生/停止」専用入力端子  
「再生/停止」「次の曲」「前の曲」「音量上げる」「音量下げる」の各ボタンの直接入力

電源・・・単 4 乾電池 2 本

- 注意事項・・・●音楽の SD メモリーカードへの取り込みは、別途パソコンか D-Dock (松下電器製ミニコンボ) で行う必要があります。
- D-snap のノイズキャンセル機能は、レッツ・サウンド経由では機能しません。
- 入力スイッチ、D-snap の AC アダプターは別売です。また、支持具は利用環境に合わせて、お客様にてご準備下さい。
- 本製品は D-snap (MP3 プレーヤー) とレッツ・サウンド (コントローラ) のセット販売のみです。コントローラ単体の販売は行っていません。

開発・販売 ファンコム株式会社 〒570-8501 大阪府守口市八雲中町 3-1-1 (松下電器産業株式会社内)