



ハートリーフクッションとは

集中力を高め、学習に取り組みやすくなることを目的としています。
座位保持や姿勢の調整に困難がある場合、本を読む眼の動きや、文字を書く手の使い方など、学習に良くない影響を及ぼします。このクッションは、自発的に姿勢を保持し、調整しやすくなるように座面形状を工夫しました。

クッション使用時の姿勢について

- クッションを使用することで、坐骨を中心に臀部、大腿部からの感覚情報が姿勢を調整する脳機能を促進します。その結果、骨盤を起し脊柱を伸ばす筋肉の作用を活性化します。
- 左右2つのクッションが重心動揺を調整し、姿勢が左右に傾き過ぎないように作用します。

教育現場の声


授業中、いすにもたれかかり、ずれ落ちてしまう。姿勢が傾き、崩れてしまうような、姿勢保持が難しい生徒には、「姿勢が悪い」「ちゃんと座りなさい」「まっすぐなさい」など、どうしても注意の声かけが多くなりがちです。このクッションを使用し生徒の姿勢が改善されることで、注意されることが減り、授業に意欲的に参加しやすくなりました。

開発者より

認定作業療法士 辻 薫

開発者：神戸大学大学院保健学研究科

文部科学省委嘱研究事業「LD、ADHD、高機能自閉症等、発達障害向けの教材・教具の実証研究」を通して、全国LD親の会と教育現場の先生方の声を生かして作業療法士が開発した、座位保持能力を調整するクッションです。授業中や作業中の姿勢保持が容易になり、集中力がアップしたり、手作業がしやすくなります（座圧測定システムを用いたクッション使用による座圧変化の研究実証済）。どこでも持ち運びができ、教室のいすだけでなく体育館の床などでも使用できます。

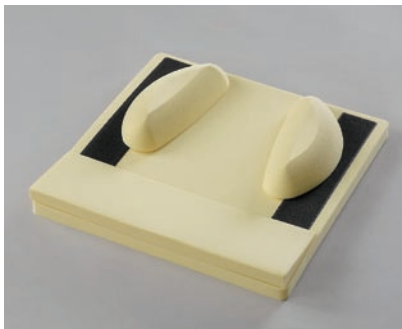

各部の機能および特徴

●凸ブロック

臀部からの感覚情報を感じ取りやすくする為に使用します。位置の調節ができます。

●ウェッジ

前すべり防止に使用します。取り外すこともできます。

●本体ベース

左右に面ファスナーを貼り付けていますので、成長に応じ凸ブロックやウェッジを効果的な位置で固定することが可能です。



●カバー

洗濯が可能です。滑り止め加工が裏面に施されています。左右の紐で学習いすに固定できます。

製品仕様

品番：38340001

サイズ：35.5×35.5×5.6cm

重量：347g

材質：【クッション部】ポリエチレンフォーム

【カバー】表面 ナイロン80%・ポリウレタン20%

裏面 生地：ポリエステル 樹脂部（ノンスリップ加工）：アクリル

価格：¥9,975（税込）

※効果には個人差があります。

※処方には作業療法士等の専門家のアドバイスをオススメします。

※全国LD親の会によるサポートツールデータベースに紹介されています。

文部科学省委嘱研究事業「発達障害児のためのサポートツール・データベース（教材・教具DB）」<http://www.jpald.net/research/index.html>

パシフィックサプライ株式会社

本社営業部	〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072-875-8011 FAX:072-875-8015
札幌営業所	〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F TEL:011-218-5801 FAX:011-218-5805
盛岡出張所	TEL:019-661-5407 FAX:019-661-5408
東京営業所	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-3-12 グレイスビル2F TEL:03-3352-0757 FAX:03-3355-3154
名古屋営業所	〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5 TEL:0568-34-2696 FAX:0568-34-2697
広島営業所	〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-5-13 ロイヤルシャトー中田1F TEL:082-293-6255 FAX:082-293-6299
福岡営業所	〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12 TEL:092-641-8151 FAX:092-641-0444

※間違い電話でご迷惑をお掛けしている地域がございます。番号をお確かめの上、おかけください。

「パシフィックニュース」をご希望される方へ

郵便番号、住所、氏名、電話番号、勤務先、所属等をご記入の上お申込ください。無料でお送りいたします。

▼編集発行：パシフィックニュース編集室

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL:072-875-8013 FAX:072-875-8017

<http://www.p-supply.co.jp/>



この印刷物は「ソイシール」の認定を受けたSOY各色を使用し印刷されています。

※印刷の都合上、商品の色は実際の色と異なる場合があります。

※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。