




BAUERFEIND
Manuロック
 (25-4500-)

使用上の注意

- ①過度にきつく装着すると、局部的に圧力がかかることがあり、装着部位の下層部の血管や神経を収縮・圧迫することがありますのでご注意ください。
- ②以下の場合、製品を使用される前に医師にご相談下さい。
 1. 製品の装着部位に皮膚の疾患／疾病、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
 2. リンパ機能に障害がある場合。 - 装着部から離れた部位で軟部組織の浮腫がある場合も含む。
 3. 手部に知覚障害がある場合。
- ③本製品は複数の方での共用はせず、一個人の方の使用に限定して下さい。
- ④誤った使用をされた場合、改造された場合、製品の機能低下を引き起こしますので、保証は適用されません。
- ⑤万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合、直ちに医師へ御相談下さい。
- ⑥本製品と他の製品を併用する場合、医師へ御相談下さい。
- ⑦製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。
- ⑧軟膏、ローション、またはグリースや酸を含む液体が製品に付着しないように注意して下さい。
- ⑨廃棄は各自治体の指示に従って下さい。

お手入れの方法

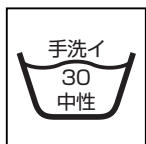

手洗い




×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング

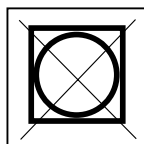

×乾燥機

- 本製品は**中性洗剤**を使用して、**30℃以下のお湯または水**で洗って下さい。
- 洗濯の前にはマジックテープ®の傷みを防ぐため、すべてのマジックテープ®を締めておくことをお勧めします。
- 乾燥は、ヒーターや乾燥機などは使用せず、自然乾燥させて下さい。
- ドライクリーニングは行なわないで下さい。

⚠ 義肢装具士の方へ

- *2本のアルミ製バーは解剖学的形状をしています、必要な場合、変形させることができます。
 - *2本のアルミ製バーはそれぞれの水色のポケットに挿入して下さい。
 - *突き出していたり、あるいは邪魔になる箇所はハサミなどで切り取ることができます。
- 【注意】水色のポケット部分やマジックテープ®は切り取らないで下さい。

Manuロックの装着方法

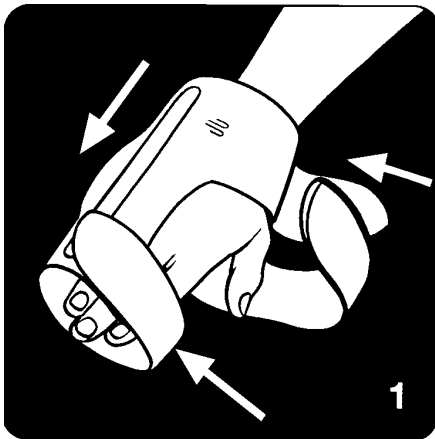


図1

上下両方のマジックテープ®を緩めに留めて、手部に装着します。

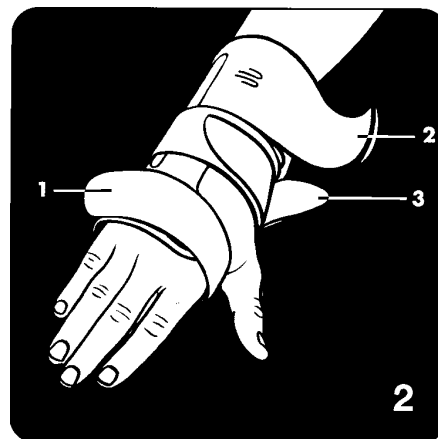


図2

以下の順でマジックテープ®をしっかりと締めます。


1. 手背部のマジックテープ®を留めます。
2. 次に、前腕側のマジックテープ®を留めます。
3. 最後に、(真ん中の)手関節部のマジックテープ®を留めます。(一旦、手関節周りで留めます。)

必要に応じて、マジックテープ®を調節します。



本製品の最初の適合は、医師または義肢装具士が行って下さい。医師または義肢装具士以外によって適合された場合、保証が適用されない場合があります。

サイズ (cm)

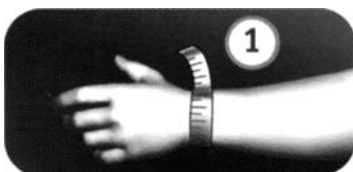

サイズ	周囲①
1	14~18

サイズ	周囲①
2	18~22

本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。