



## BAUERFEIND エアロック

### 警告

- エアロックは医師により処方され、医療スタッフの監督のもと適合されます。エアロックはこのような使用方法に従い、特定部位にのみ装着いただきますようお願い致します。
- 本製品は、装着者1人に1製品を適合するようお願い致します。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては安全性は保証できません。
- 製品に不適切な修正を加えないようにして下さい。不適切な修正は、製品の動きを損ね、製品にかかる責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 本製品は、丈夫な靴と組み合わせてお使い下さい。(運動靴や屋外履きの靴。)
- 皮膚が過敏な方や接触性皮膚炎の方、圧に過敏な方は、予めコットン製の靴下や、ストッキングを履いた上から、エアロックを装着してください。
- (症状の憎悪など) 異常な変化に気づいたときは、直ちに医師に相談をして下さいますようお願いいたします。
- 他の製品(例、圧迫ストッキングなど)との併用は、必ず医師と相談した上で行って下さいますようお願いいたします。
- 軟膏や、ローション、グリースや酸を含む他の物質をお使いにならないで下さい。
- コンタクト・スポーツは受傷のリスクが高く、パウアーファインド社では、エアロックのコンタクトスポーツ中の受傷予防については保証しておりません。
- 現在まで、健康に害を及ぼすような過敏症の反応は報告されておりません。  
以下の症状の場合は、医師の診察の後に適合、装着するようにして下さい。
  1. 装具装着部位の皮膚疾患や損傷で、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れ、発赤、過度の体温上昇が見られる場合
  2. 重度の静脈瘤
  3. リンパ液ドレナージ。装具装着部位から離れていても、起始が不明確な軟部組織の腫脹を含む。
  4. 下肢の感覚障害や循環不全。例えば、糖尿病など。

### 注意

- 現在まで副作用についての報告は受けておりませんが、正しい適合を前提としています。サポーターや装具はその種類に関わらず、締め付けすぎますと、局所的な圧集中の兆候を示したり、稀にですが、装着下の血管や神経を締め付けることがあります。
- 製品の廃棄については各地域の自治体の指示に従って下さい。

※製品の品質につきましては、万全を期しておりますが、ご意見ご質問などがございましたら、販売店またはパウアーファインド社日本総代理店でありますパシフィックサプライ株式会社までご連絡ください。

## エアロックの装着及び取外し方

**装着方法** 付属品:空気入れ



1 装具には左右があります。正しく選んでいるのかを確認してください。ベルクロ®を外して、ベルトを開きます。装具の内側と外側にある、エアバッグの栓を外します。ベルトが取り付けられている側のプラスチックが、足の内側に来るよう、エアロックを装着します。



2 プラスチック前方のフチのラインが、脛のフチの線と平行になるように、装具を足に当てます。



3 はじめに、下のベルトを固定します。



4 下のベルトを足首の後ろに回し、プラスチックの外側下方の丸いベルクロ®を覆うようにして、留めます。




5 上のベルトを固定します。



6 上のベルトは、足の前を回してプラスチックの外側上方の丸いベルクロ®を覆うようにして、留めます。



7 内側と外側のエアバッグを、付属の空気入れを使って、均等に膨らませます。外側のエアバッグを最初に膨らませます。次に内側のエアバッグを膨らませます。普通は2~4回、空気を送れば、適切な程度の安定化が得られますが、適切な圧は医師の指導に従って下さい。圧を高めるほど、靴が傷みやすくなるので注意してください。空気の出し入れにより、圧力を個別に調節できます。

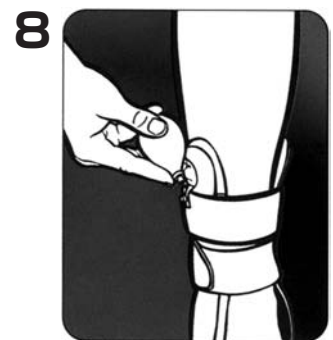


8 空気入れの横にあるピンをエアバッグの栓を開けて差し込めば、簡単に空気を抜けます。エアバッグの栓を閉めます。

### 取外し方

1. エアバッグの空気を抜きます。
2. 上のベルトを最初に外します。次に下のベルトを外して、装具を取り外します。
3. あらためて装具を装着する前に、エアバッグの空気が完全に抜けていることを確認します。

### お手入れの方法

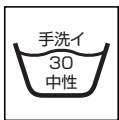

手洗い




×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング

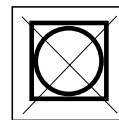

×乾燥機

- エアロックは中性洗剤を用いて、手洗いをして下さい。
- ベルクロ®の固定力が弱まらないように、お洗濯の前にベルクロテープ®を留めておくことをお勧めします。

### サイズ

サイズはフリーサイズです。右用と左用があります。

本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。

Bauerfeind Orthopädie GmbH & Co. KG 日本総代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL:072-875-8008(代) FAX:072-875-8010(代)