



BAUERFEIND

Malleoロック (25-4141-)

⚠ 使用上の注意

- ①本製品は医師の処方によりにのみお使い頂くものです。
- ②過度にきつく装着すると、局部的に圧力がかかることがあり、装着部位の下層部の血管や神経を収縮・圧迫することがありますのでご注意ください。
- ③以下の場合、製品を使用される前に医師にご相談下さい。
 1. 製品の装着部位に皮膚の疾患／疾病、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
 2. 重度の静脈瘤、特に逆流を伴う場合。
 3. リンパ機能に障害がある場合。- 装着部から離れた部位で軟部組織の浮腫がある場合も含む。
 4. 知覚障害がある場合。(例:糖尿病)
 5. 下肢に循環障害がある場合。
- ④本製品は複数の方での共用はせず、一個人の方の使用に限定して下さい。
- ⑤誤った使用をされた場合、改造された場合、製品の機能低下を引き起こしますので、保証は適用されません。
- ⑥万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合、直ちに医師へ御相談下さい。
- ⑦本製品は損傷の予防を目的とする製品ではありません。
- ⑧本製品と他の製品を併用する場合、医師へ御相談下さい。
- ⑨製品の保証期間は弊社出荷日より1年間です。
- ⑩敏感肌、あるいは接触アレルギーなど圧迫に敏感な反応がある方は、綿のソックスやストッキングを着用してから本製品をご使用下さい。
- ⑪軟膏、ローション、またはグリースや酸を含む液体が製品に付着しないように注意して下さい。
- ⑫廃棄は各自治体の指示に従って下さい。



本製品の最初の適合は、医師または義肢装具士が行って下さい。医師または義肢装具士以外によって適合された場合、保証が適用されない場合があります。



お手入れの方法



手洗い




×漂白剤



×アイロン



×ドライクリーニング

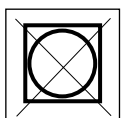

×乾燥機

- 本製品は中性洗剤を使用して、30℃以下のお湯または水で洗って下さい。
- 洗濯の前にはマジックテープ®の傷みを防ぐため、すべてのマジックテープ®を締めておくことをお勧めします。
- 乾燥は、ヒーターや乾燥機などは使用せず、自然乾燥させて下さい。
- ドライクリーニングは行なわないで下さい。

Malleoロックの装着方法

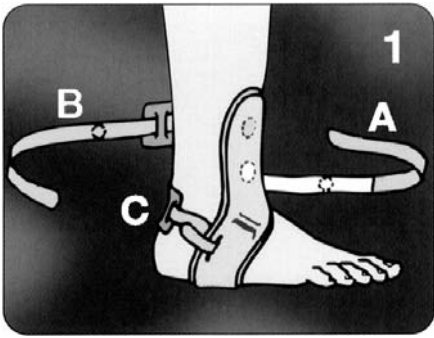


図1

マジックテープ®付きストラップAとBを留め具から取り外して広げ、ストラップCを緩めます。U字型部分を、踵部にかからないように足部のアーチ下へ位置させます。U字型部分の側方部が、外側はくるぶしの前方に、内側はくるぶしの後方になるよう、装着します。また踵部が地面に接地するようにして下さい。ストラップCを留め、パッドがアキレス腱に沿っていることと、本体が足部周囲で安定して装着していることを確認してください。

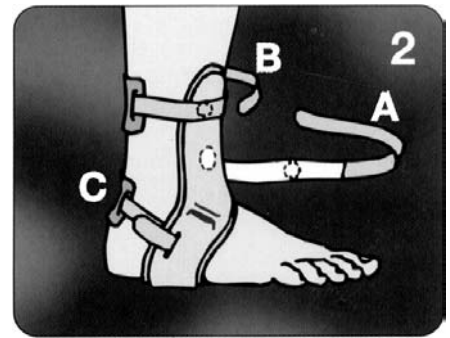


図2

下肢の回りにストラップBを地面に対して平行に回し、マジックテープ®部分で固定します。次に反対側の留め具にストラップを通して、その端をマジックテープ®で固定します。

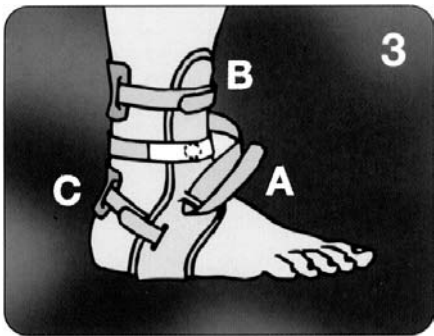


図3

ストラップAを地面の水平に脚部の回りに回し、水色部分とマジックテープ®の水色部分に合わせて、また紺色をマジックテープ®の紺色部分に合わせて固定します。ストラップAをそれぞれの留め具に通してからマジックテープ®の紺色の端を引っ張り、固定します。

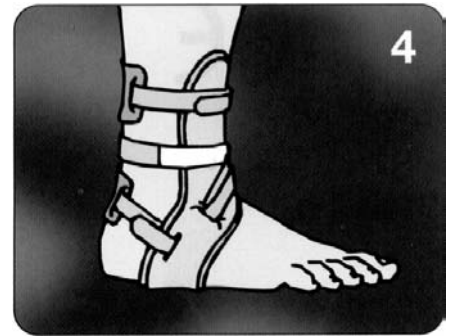


図4

必要に応じて、ストラップの位置を修正します。足部前方部やアキレス腱部分等には、必要であれば付属のクッションをストラップAに取り付けることもできます。




重要! 3本のマジックテープ®は全て両端で個々に調節可能です。



義肢装具士の方へ

必要な場合は、プラスチック部分はヒートガン等を使って約200℃まで加熱すると変形させることができます。加熱する際は、必ずマジックテープ®を保護して下さい。プラスチック部分は研いで形を変えることもできます。

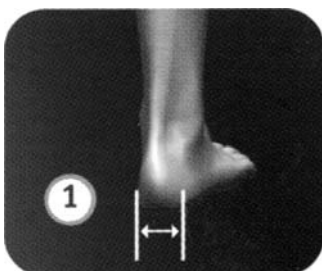

サイズ (cm)

サイズ	周囲①
1	6cm未満
サイズ	周囲①
2	6cm以上

本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。