


Chopart

instructions

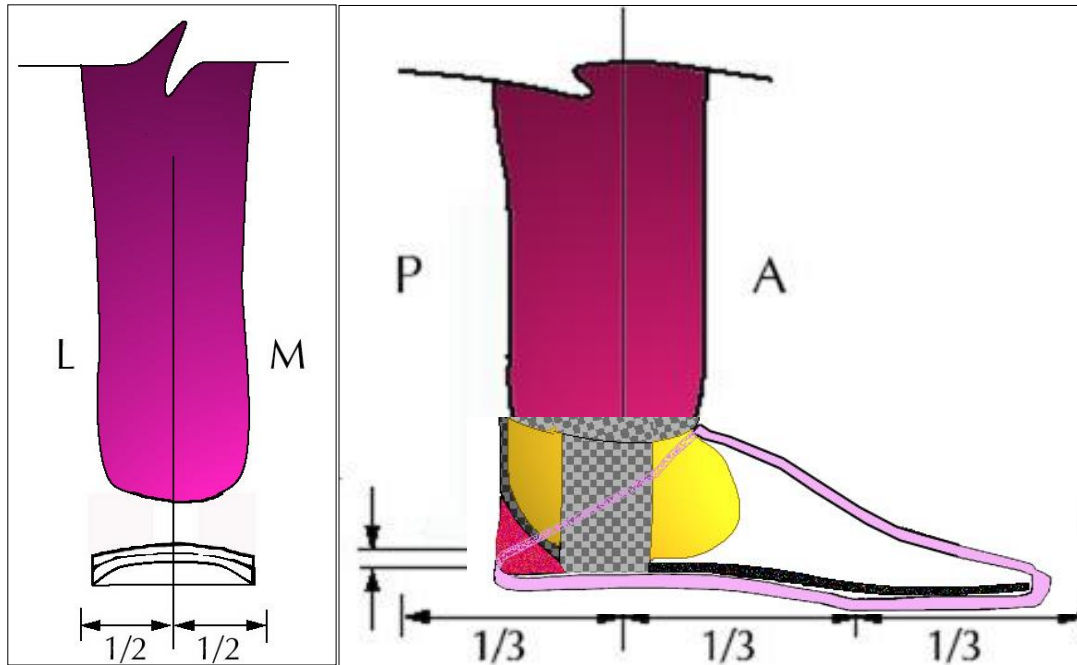

Use Flex-Foot alignment recommendations
アライメント設定は推奨通りにします。

Chopart foot should be bonded to the distal end of socket with Potting Epoxy
エポキシ樹脂でショパールはソケット遠位に接着する必要があります。

Chopart

Technical Instructions



During the laminate process:

ラミネーションをしている時にすること

Press plate in appropriate position while the resin sets to create an attachment surface


樹脂が硬化して取り付け面が形成されるまでカーボン板を適切な位置に押し込みます。⇒足関節が底屈位で拘縮している場合などは、ラミネーション後にソケットとカーボン板の角度を考慮して取り付ける必要あり。

Chopart

Technical Instructions 仮あわせ時



- Roughen attachment surfaces and bond plate using Siegelharz for in house trial 取り付け面を粗し、借り合せ用にジエゲルハーツを使ってカーボン板を接着します。
- For temporary fittings: Secure with fiberglass casting bandage ガラス繊維のキャスト包帯を用いて補強します。

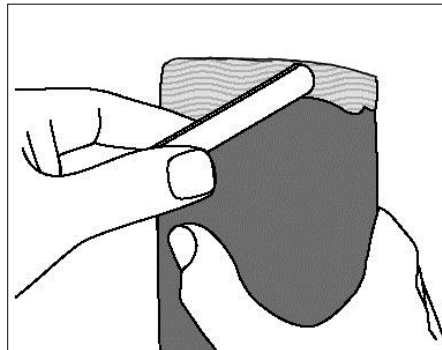

Chopart

SACH Heel



Consider grinding of the end of the heel and add a foam wedge, SACH type heel 以下の理由でヒール部を削ってフォームウェッジを付け、SACHヒールのようにするケースもあり




- Shock absorption 衝撃吸収
- Heel rocker ヒールロッカー
- Smooth roll over スムーズな踏み返し

〈付属のソールクレープ材〉

フットカバーとカーボン板の間であそびがある場合、或いは微妙なアライメント調整が必要な場合、カーボン板の下に付けて用いる

Chopart

Foot Shell

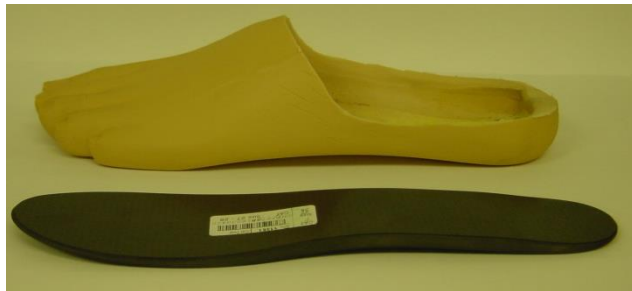

- Modify standard foot shell

通常のフットカバーは修正する必要あり（ソケットを収納するため）


- Create shape from foam

発泡樹脂で形状を作る



Chopart

Direct attachment 完成時

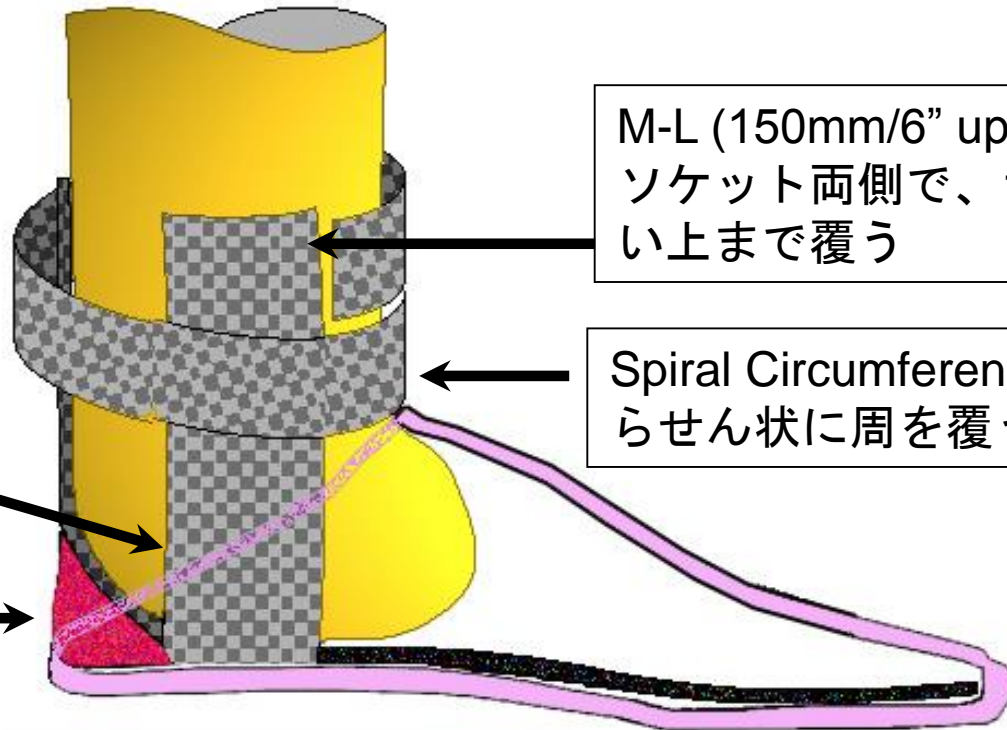

M-L (150mm/6" up socket)
ソケット両側で、15cmくら
い上まで覆う

Spiral Circumference
らせん状に周を覆う

Modify foot shell
フットカバーは修正
する必要あり

*Optional - Replace the hard heel part with foam
症例によって、カーボンを削って変わりに発泡剤に変える（踵が硬い歩容
がみられる場合など） ⇒発泡剤は販売しておりません