


Pro-Flex LP Align

スペーサーの交換

踵と前部のスペーサーが劣化した場合は交換が必要
ISOの試験を上回った耐久性

• 交換方法

- フットカバーとスペクトラソックスをデバイスから外す
- ハウジングをニュートラルなポジションに位置させる
- 交換キットに含まれるウェッジをボトムブレードとミドルブレードの間に位置させる
- 踵のスペーサーを圧縮し、前部スペーサーを露出させる
- **前部スペーサーと前部スペーサーウェッジを取り外す**
- 足部を最大限に背屈させ、踵のスペーサーを露出させて取り外す
- **新しい踵のスペーサーに交換する**
- 踵のスペーサーを圧縮し、前部スペーサーを露出させる
- **新しい前部スペーサー/スペーサーウェッジに交換する**
- ウェッジツールはデバイスを使用する前に取り外されていることを確認

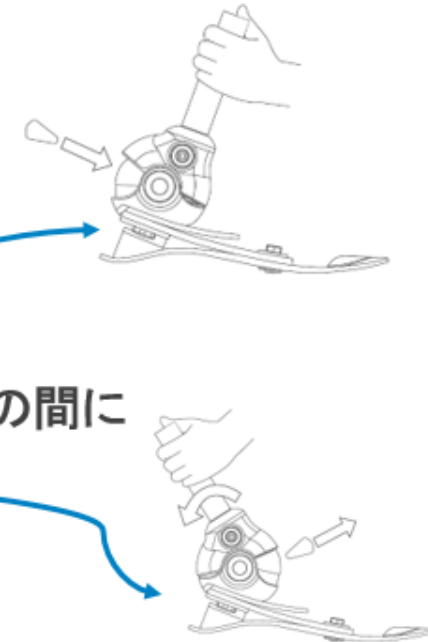

交換キットに含まれるウェッジ

