

テーマ：聞く

ねらい

1) 話を聞いて内容を理解することができる。

相手の話に耳を傾けることは重要です。聞き上手になって良い関係を築きましょう。

例1: 生徒は聞いたことを再度説明するために、物や絵記号を再表示または言い換えます。

使用するVOCA: クイックトーカー



先生は講義の話やコメントをVOCAに録音します。先生はVOCAで、物や絵記号を使用して、生徒に聞いたことを再度説明するように言います。コミュニケーションを試みるか(目的があるかそうでないか)は先生が必要に応じて判断します。

生徒はVOCAを使用して、物や絵記号を接触、凝視、指差し、口頭で選択し、先生から聞いたことを再度説明します。



例2：生徒は講義やデモンストレーションに注目します。

使用するVOCA：ステップバイステップウィズレベル



先生はボランティアで他の生徒を口頭で助けたり指示したりするために、VOCAを使って生徒に講義を受けさせます。
先生は討論の例として、生徒の関心のある物、その名前、またはお気に入りのものを用います。
VOCAに指示を録音します。

生徒はVOCAで指示や指導をするリーダーシップの役割を果たすことで、講義に集中します。
関心がある内容だと、生徒は講義にもっと関心を示します。



ポイント

- ・相手を尊重して素直な気持ちで聞きましょう。
- ・話を聞く姿勢も大切です。聞く態度やしぐさにも心配りをしましょう。
- ・討論の時は、相手の意見も尊重しながら自分の意見を持ち、主張できると良いです。