


《取扱注意》

BD アダプターの取扱に関して

BD アダプターは、電池ボックスの電極に差し込む銅版と、ケーブルをつなげている箇所に強い力が加わると、切断するおそれがあります。

本書をよくお読み頂き、取扱には十分ご注意ください。

- ① 乾電池を取り付けた状態で、銅板を抜き差しするのは止めてください。切断するおそれがあります。必ず乾電池を取り外し、銅板の抜き差しを行ってください。

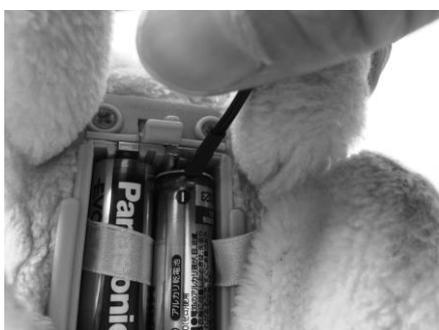


×：電池を外さず抜こうとしている。





○：電池を外し圧力かけず抜いている。

- ② 銅板とケーブルが接続している箇所は、銅板に対してケーブルの動きが垂直方向の圧力には耐久性がありますが、水平方向の圧力にはあまり耐久性がありません。銅板を電極へ差し込み、ケーブルを持ち銅板に対して水平方向に力を加えると切断します。お止めください。

×：水平方向の動き

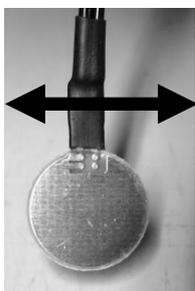

○：垂直方向の動き

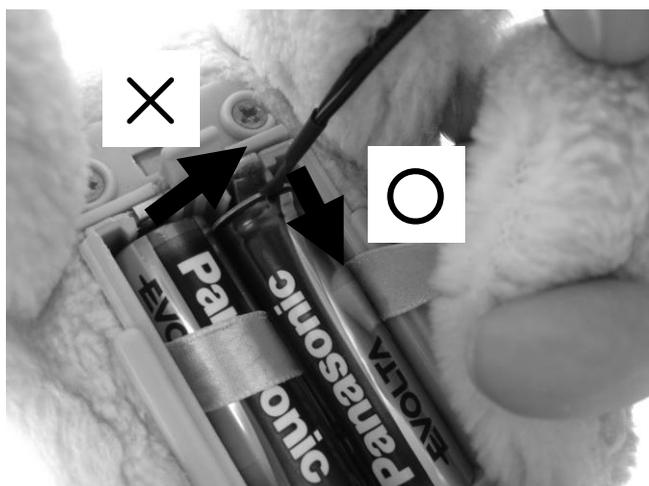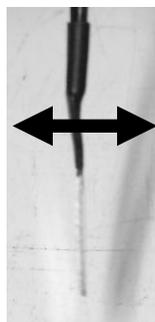

×：水平方向に圧力をかけると根元から切断される。


○：垂直方向に圧力をかけても根元がたわむので切断されにくい。

～裏面もご覧ください～

- ③ 電池ボックスの蓋を閉めケーブルを外に出す際、蓋にケーブルが通る穴を開けてください。穴を開けずに利用するとケーブルが断線しますので、お止めください。




×：隙間がないのでケーブルに圧力がかかり続け、断線してしまう。

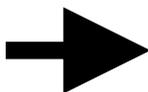


○：穴を開ける事でケーブルに圧力がかからず、断線の防止ができる。

- ④ BD アダプターの銅板を差し込んだ状態でケーブルを引っばらないでください。切断するおそれがあります。持ち運びなどをする際は、電池で動くおもちゃなどの本体とスイッチを持ち、運んでください。

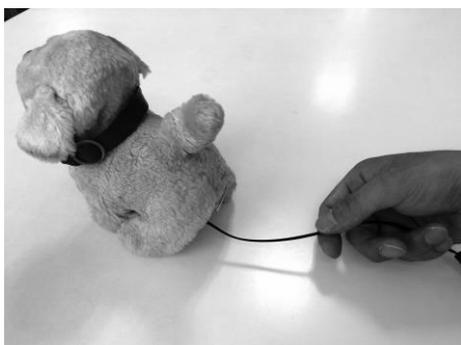

×：ケーブルを引きおもちゃを引き寄せようとしている。

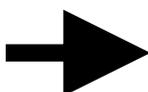

○：おもちゃを持ち引き寄せようとしている。

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1

TEL 072-875-8011/FAX 072-875-8015

<http://www.p-supply.co.jp>