

# エタック社モーリフトの お手入れ方法について

**molift**  
a part of Etac

## リフト本体 (スマート150、ムーバー180・205、クイックレイザー1・2)

- リフト本体やコントローラー等が汚れたときは柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合には、水で薄めた中性洗剤に浸した布をかたく絞って拭いてから乾いた布で拭きとってください。
- 消毒をされる場合にはイソプロピルアルコールをご使用ください。



- シンナー、ベンジン、研磨剤等はリフトの表面を傷つける可能性があるので、使用しないでください。
- また溶剤を直接リフトにかけないでください。
- 次亜塩素酸ナトリウム水溶液（塩素系漂白剤）は、金属部を腐食させる恐れがありますので使用しないでください



スマート150



ムーバー180



ムーバー205



クイックレイザー1



クイックレイザー2

# エタック社モーリフトの お手入れ方法について

**molift**  
a part of Etac

## モーリフト用スリング (ディスポーザブルタイプを除く)

- 85℃以下でのお洗濯が可能です。  
洗濯機で洗う場合にはネットのご使用をお勧めいたします。
- オートクレーブ (加圧殺菌) のご使用が可能です。(85℃、30分)
- タンブルドライ (乾燥) は低温(45℃)までのご使用が可能です。  
⇒製品を少しでも長く使用されたい場合は、通気性の良い場所での陰干しをお勧めいたします。  
直射日光での乾燥は急激な劣化を伴う場合がありますのでお避けください。
- アルコールによる消毒を行う場合は濃度70%以下のものをご使用ください。
- 漂白剤・アイロン・ドライクリーニングはお避けください。



イージースリング  
(頭部サポートあり、なし)



入浴用スリング  
(頭部サポートあり、なし)



ベーシックシート型スリング



トイレ用スリング  
(頭部サポートあり、なし)



下肢切断者用スリング  
(頭部サポートあり、なし)



イージーレイザースリング  
(支持あり、なし)