

「モーリフト クイックレイザー1 or 2」デモ機 同梱物チェック表


パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

この度は、「モーリフト クイックレイザー1 or 2」デモ機をご利用いただき、誠にありがとうございます。お受取時およびご返却時のお願いがございます。

- デモ機のお受取後、すぐに内容物をご確認ください。デモ機の破損、欠品があった場合、ご連絡ください
 - デモ機のご返却時、内容物が一式揃っているかご確認ください。また、デモ機の破損、紛失があった場合、ご連絡ください。
 - 確認には本用紙を用い、ご返却時に同梱してください。
- お手順をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

内容物確認リスト

内容	部品名	お受取時	ご返却時
モーリフト クイックレイザー	(1) 胴体・脚部 (クイックレイザー1と2で形状が異なる)	☐	☐
	(2) 支柱 (固定ネジ 2 個付)	☐	☐
	(3) 操作ハンドル (ハンドル固定用ノブネジ付)	☐	☐
	(4) アーム (クイックレイザー1と2で形状が異なる)	☐	☐
	(5) 膝パッド (下腿部固定ストラップ付)	☐	☐
	(6) 六角レンチ 大	☐	☐
	(7) 六角レンチ 小	☐	☐
	(8) 取扱説明書	☐	☐
	(9) 同梱物チェック表(本紙面)	☐	☐

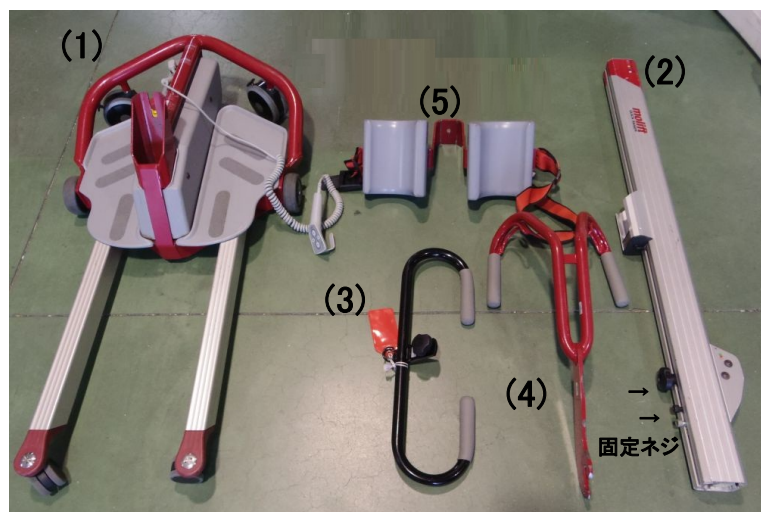


【クイックレイザー2】

(6)、(7)



【クイックレイザー1】

バッテリーと充電器は
2021年9月6日以降別送

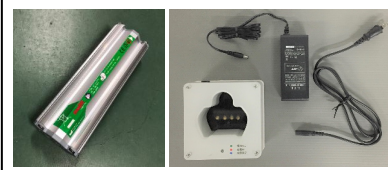

検査

.

Think Possibility!

「モーリフト クイックレイザー2&1」デモ機 検品チェックリスト

- (1) 内容物確認 ☐
- ☐ 胴体・脚部 ☐ 支柱（固定ネジ2個付） ☐ 操作ハンドル（ノブネジ付） ☐ アーム
 - ☐ 膝パッド（下腿部固定ストラップ付） ~~☐ バッテリー・充電器~~ (2021年9月6日以降別送)
 - ☐ 六角レンチ 大 ☐ 六角レンチ 小 ☐ 取扱説明書
 - ☐ 同梱物チェック表 *同梱物チェック表は毎回交換
- (2) 洗浄・外観チェック ☐
- ☐ 品番・シリアルナンバーが合っている ☐ 本体に破損、著しい汚れがない
 - ☐ アーム・操作ハンドル・膝パッドの人の肌に触れる部分をアルコール消毒する
- (3) 動作チェック ☐
- ☐ 胴体に支柱・アームを取り付ける
 - ☐ 支柱固定ボルトが固定できる
 - ☐ 膝パッド取付金具が固定できる
 - ☐ 操作ハンドル固定ノブが固定できる
 - ☐ バッテリーホルダーにバッテリーを入れる
 - ☐ サービスランプが緑に点灯する
 - ☐ フットプレート上に乗り、アームに体重をかけながらコントローラーを使い、
 - ☐ トロリーを最上部まで上昇させる
 - ☐ コントローラーを用いトロリーを最下段まで降下させる
 - ☐ コントローラーを使い脚部が開閉する *クイックレイザー2のみ
 - ☐ キャスターがぐらついていない
- (4) 緊急機能チェック ☐
- ☐ コントローラーを使いトロリーを降下させながら途中で緊急停止ボタンを押し停止する
 - ☐ 緊急停止を解除し緊急降下スイッチを押しトロリーが下降する
- (5) 初期化 ☐
- ☐ バッテリーを満充電する
 - ☐ バッテリー充電日を箱に記入する
- (6) 個人情報漏洩防止 ☐
- ☐ 送り状、納品書などお客さまの情報が特定できるものが箱の中に残っていない

以上

2021年8月25日 中村作成