

「モーリフト ムーバー205」デモ機 同梱物チェックリスト

パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

この度は、「モーリフト ムーバー205」デモ機をご利用いただき、誠にありがとうございます。お受取時およびご返却時のお願いがございます。

- デモ機のお受取後、すぐに内容物をご確認ください。デモ機の破損、欠品があった場合、ご連絡ください。
- デモ機のご返却時、内容物が一式揃っているかご確認ください。また、デモ機の破損、紛失があった場合、ご連絡ください。
- 確認には本用紙を用い、ご返却時に同梱してください。

お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

同梱物確認リスト

内容	部品名	お受取時	ご返却時
モーリフト ムーバー205	(1) モーリフト ムーバー205 本体 (コントローラー・胴体・脚部が分離した状態で梱包しています)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ハンガー	(2) 4点ハンガー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(3) 取扱説明書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1)



(2)



充電器とバッテリーは
2021年9月6日以降別送



(205用バッテリーは写真右側)

検査

Think Possibility!

「モーリフト ムーバー205」デモ機 検品チェックリスト

- (1) 同梱物確認
- 本体(リモコン付き) ~~バッテリー・充電器(電源コード付)~~(2021年9月6日以降別送)
 - 4点ハンガー 取扱説明書 同梱物チェック表 ***同梱物チェック表は毎回交換**
- (2) 洗浄・外観チェック
- 品番・シリアルナンバーがあっているか確認 本体に破損、著しい汚れがない
- (3) 動作チェック
- 本体を組立て、アームに4点ハンガーを取り付ける(取扱説明書参照)
 - バッテリーホルダーにバッテリーを入れる
 - サービスランプが緑に点灯する
 - コントローラーで脚部が動作する
 - キャスターがぐらついていない
 - ブレーキがかかる
 - コントローラーを使いアームに体重をかけながら最上段まで上昇させる
 - コントローラーを用いアームを最下段まで降下させる
 - 充電器でバッテリーを充電できる
- (4) 緊急機能チェック
- コントローラーを使いアームを降下させながら途中で緊急停止ボタンを押し停止する
 - 緊急停止を解除し緊急降下スイッチを押しアームが下降する
 - アームに体重をかけた状態で「手動降下ハンドル」を引き上げゆっくりと下降する
- (5) 個人情報漏洩防止
- 送り状、納品書などお客さまの情報が特定できるものが箱の中に残っていない

以上

2020年3月25日 中村作成