Pacific Supply

「MURO ソリューション」レンタルサービス 物品確認リスト

パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

この度は、「MURO ソリューション」レンタルサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。お受取時およびご返 却時のお願いがございます。

- レンタル品のお受取後、すぐに内容物をご確認ください。見本品の破損、欠品があった場合、ご連絡ください
- レンタル品のご返却時、内容物が一式揃っているかご確認ください。また、破損、紛失があった場合、ご連絡くださ い。
- 確認には本用紙を用い、ご返却時に同梱してください。

お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

- ご返却の際は付属品を今一度ご確認ください。欠品がございました際は、実費を請求させていただきます。
- 院内感染防止の観点から、「ディスポ電極」は付属しておりません。

内容物確認リスト

| | _ | | |
|--------------|----------------------------------|------|------|
| 内容 | 部品名 | お受取時 | ご返却時 |
| MURO ソリューション | (1) MURO ソリューション本体 | | |
| | (2) 本体カバー(固定ベルト付) | | |
| | (3) 外部調整ユニット | | |
| | (4) 充電用 AC アダプター | | |
| | (5) リストサポーター (左右 S/左右 M および箱) | | |
| | (左右 5/左右 M あよび相) (6) 取扱説明書 | | |
| | (7) 特定保守管理医療機器の説明文書 | | |
| | (8) 箱 | | |









※ 裏面はパシフィックサプライ検品チェックリストです。 Think Possibility!

「MURO ソリューション」レンタル品 検品チェックリスト

| (1) | 内容物確認 □ □ MURO ソリューション本体 □ 本体カバー(固定ベルト付) □ 外部調整ユニット □ 充電用 AC アダプター □ リストサポーター(左右 S/左右 M および箱) □ 取扱説明書 □ 特定保守管理医療機器の説明文書 □ 箱 |
|-----|--|
| (2) | 洗浄・外観チェック □□ 本体・外部調整ユニット・AC アダプター・箱の製造番号の上 5 桁および下 3 桁が一致する□ 本体・本体カバー・外部調整ユニット・AC アダプターを固く絞った布を用いて洗浄する□ リストサポーターをオゾンを用いて消毒する |
| | <本体> □ 表示部、スイッチ類、接続コネクタ、充電用ジャックに、著しい変色、変形、破損がない □ 電極ケーブルに著しい変質、変形、破損がない。コネクタ部に異常がなく確実に接続できる |
| | <外部調整ユニット> □ 操作ボタン、接続コネクタに、著しい変色、変形、破損がない □ 表示モニターに著しい変色、変形、ひび割れ、破損がない □ 通信ケーブルに著しい変質、変形、破損がない。コネクタ部に異常がなく、確実に接続できる |
| (3) | 動作チェック ◇外部調整ユニット> 本体に外部調整ユニットを接続しデフォルト設定にする 操作ボタン:操作ボタンを押したとき、クリック感がある 表示モニター: 本体に接続し本体の電源を ON にする。表示モニターに情報が正しく表示される操作ボタンに応じて画面が切り替る |
| | <本体> □ 充電確認・AC アダプター確認: □ 充電: 充電ランプが消灯するまで充電を行う □ 電源スイッチの動作確認: 電源スイッチが確実に ON / OFF でき、同時に電源ランプも点灯 / 消灯する □ スイッチ類の動作確認: 刺激 / 筋電調整スイッチ、スタートボタンが正しく可動する □ 筋電検出 / 刺激出力の動作確認: 電極を貼り付けた部位を動かしたとき、筋電検出ランプの点灯個数が変化する。スタートボタンを押した後、電極を貼り付けた部位の動きにあわせて、刺激出カランプの点灯個数が変化すると共に刺激が変化する |
| (4) | 梱包 □ 電源を OFF にする □ リストサポーターをシーラーで処理して専用箱に入れる □ お客さま確認シートを参考にして箱に入れる |
| (5) | 個人情報漏洩防止 □ □ 送り状、納品書などお客さまの情報が特定できるものが箱の中に残っていない |