


●天井からスイングまでの接続手順



今後の推奨接続手順

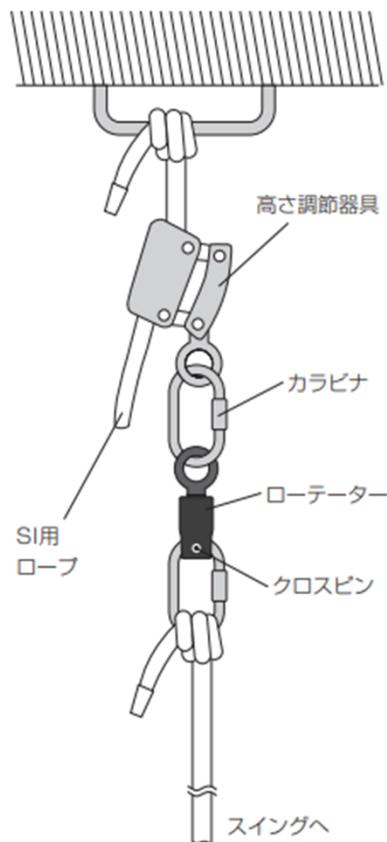

画像1:以前の初期設定



画像2:今後の初期設定

＝ローテーター取付け向き変更＝

これまで、取付けやすさを優先して、ローテーターの向きをクロスピンが上（画像1）になるようにご案内して参りました。

この取付け方法では、ベアリング部分に埃や汚れが付きやすく回転しにくくなる原因となりますので、このたび取付方法を変更させていただくことと致しました。

今後はクロスピンが下向き（画像2）となる取付け方法を推奨いたします。

<交換手順>

1. ローテーターを準備します
 2. カラビナをローテーターから外します
 3. ローテーターの向きを上下入れ変えます
 4. ローテーターのO環にカラビナを取付けます
- 以上

パシフィックサプライ(株)
2023.10.10