

スーパーセラピーマットに関するご案内



弊社取り扱い品のスーパーセラピーマット(同系統品含)は、製品特性上、熱の影響を受けやすい商品です。

40℃以上になる環境下では、画像のようにマット自体が**波打った状態**になる可能性があります。

特に部屋一面に隙間なく配置されている場合は、顕著です。

この場合、マット外周に余裕を持たせるか、使用前に冷房等で**室温を下げた**状態でご使用ください。
近年の酷暑の中、ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

パシフィックサプライ(株)