


感覚統合器具

フロッグスイング

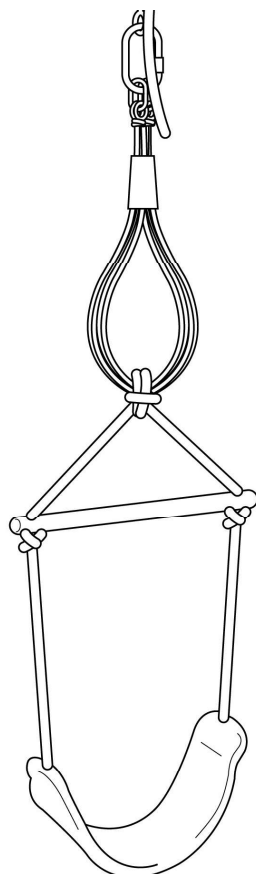

この度は「感覚統合器具フロッグスイング」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書は器具を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

製品に関するお問い合わせは最終ページをご参照ください。

取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認いただきます様にお願いします。

※印刷の都合上、実際の色合いと多少異なる場合がございます。

フロッグスイングについて

フロッグスイングとは

フロッグスイングは、上下伸縮運動・振り子運動などの加速度刺激による運動ができます。ロープによって天井から吊るタイプのため、刺激の強弱を調整することが簡単にでき、そのお子さんに応じた使用を可能にします。器具の特性を生かして頂き、自由な発想でお子さんの可能性を展開してください。

※本製品は、器具から転倒・転落するリスクもございますので、必ず専門家の管理下において、転倒転落の防止措置や落下時に安全確保等を行っていただいた上でご使用ください。

目次

1.	安全にご使用いただくために・・・・・・・・・・・・・・・・	3 ページ
2.	梱包の解き方・・・・・・・・・・・・・・・・	5 ページ
3.	各部の名称と仕様・・・・・・・・・・・・・・・・	6 ページ
4.	設置方法・・・・・・・・・・・・・・・・	7 ページ
5.	設置後の点検・・・・・・・・・・・・・・・・	9 ページ
6.	使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・	10 ページ
7.	日常の保守点検・・・・・・・・・・・・・・・・	12 ページ
8.	お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・	12 ページ
9.	保管方法・・・・・・・・・・・・・・・・	13 ページ
10.	修理について・・・・・・・・・・・・・・・・	13 ページ
11.	廃棄方法・・・・・・・・・・・・・・・・	13 ページ
12.	保証書・・・・・・・・・・・・・・・・	14 ページ

Ⅰ．安全にご使用いただくために

「感覚統合器具フロッグスイング」の機能を十分に活かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読み内容を理解してください。その後大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

この取扱説明書では様々な絵表示を使用しています。これは「感覚統合器具フロッグスイング」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。

Ⅰ－Ⅰ．警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品はあえて不安定（揺れる・落ちる）な環境を作り出し、バランス感覚・姿勢保持機能・全身の筋力向上などを獲得していただく製品となっております。転倒・転落するリスクもございますので、必ず医療関係従事者などの専門家の管理下において、転倒・転落の防止措置や落下時の安全確保を行っていただいた上で、ご使用ください。
なお安全にご使用できるかについては、専門家によりご判断してください。
- 本製品を使用する場合は必ず医療関係従事者などの専門家の指導のもとで行ってください。
また、使用中は必ず作業療法士などのリハビリテーション関連スタッフが付き添ってください。
- 「6－3．使用推奨体重」に記載の推奨体重に従い、製品を使用する方の総荷重が各製品の推奨体重以下になる範囲でご使用下さい。それ以上の荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。
- 本製品は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、使用中に落下して事故等につながる恐れがあります。正しい取り付け方法は「4．設置方法」をご参照ください。
- 本書に規定していない方法でロープを縛らないでください。
使用中に結び目がほどけたり破損したりする恐れがあります。
- ロープの結び目は絶対にほどかないでください。使用中に外れて事故等につながる恐れがあります。
- 各種の部品は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、使用中に金具類が外れて事故等につながる恐れがあります。
- 本製品がゆれている範囲内にいる時はやり戻しにご注意ください。不意に身体にあたり事故等につながる恐れがあります。
- 本製品を使用する場合は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで本製品をご使用にならないでください。
- 本製品を使用していない場合は、取り外して安全な場所に保管してください。
- 転落時のけがを防止するため、使用時は本製品の真下に必ずマットを敷いてください。
- 本製品の底面が床から 20cm ～ 30cm になるような高さに取り付けてください。20cm 未満の場合、使用者が本体と床との間にはさまれる恐れがあります。

Ⅰ．安全にご使用いただくために

Ⅰ－２．注意に関する事項



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、
傷害や物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行ってください。
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず販売店に修理交換をご相談ください。
- 常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内での長時間の放置、熱器具（ストーブ等）の近くで使用はしないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。また、変形した製品は使用しないでください。
- 開梱の際にカッターナイフ等で製品を傷つけないようにしてください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使用に関しては安全性は保障できません。
- 本書中の図は一部省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。
- 製品は不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については弊社までお問い合わせください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れなどに気付いた場合は弊社までご連絡ください。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。
- 高濃度オゾンが発生する場所での使用・保管はしないでください。また、オゾン発生装置の近くでは使用や保管はしないでください。製品が劣化し変形や破損が生じる恐れがあります。

2. 梱包の解き方

2-1. ダンボールの開梱

本製品はダンボール箱で配送されます。箱の中でエアークラップに包まれています。開梱の際にカッターナイフ等で製品を傷つけないように注意してください。



注意

- 開梱の際にカッターナイフ等で製品を傷つけないようにしてください。

2-2. 内容物（構成部品）の確認

ダンボール箱の中に「3. 各部の名称と仕様」に記載されている部品類が全て入っているか確認してください。


2-3. 製品の確認

製品に傷や損傷がないか確認します。もし何かありましたら、販売店（最終ページ）へお問い合わせください。

3. 各部の名称と仕様

構成部品と各部の名称

本製品は次のような部品で構成されています。付属品に不足等はないか点検してください。

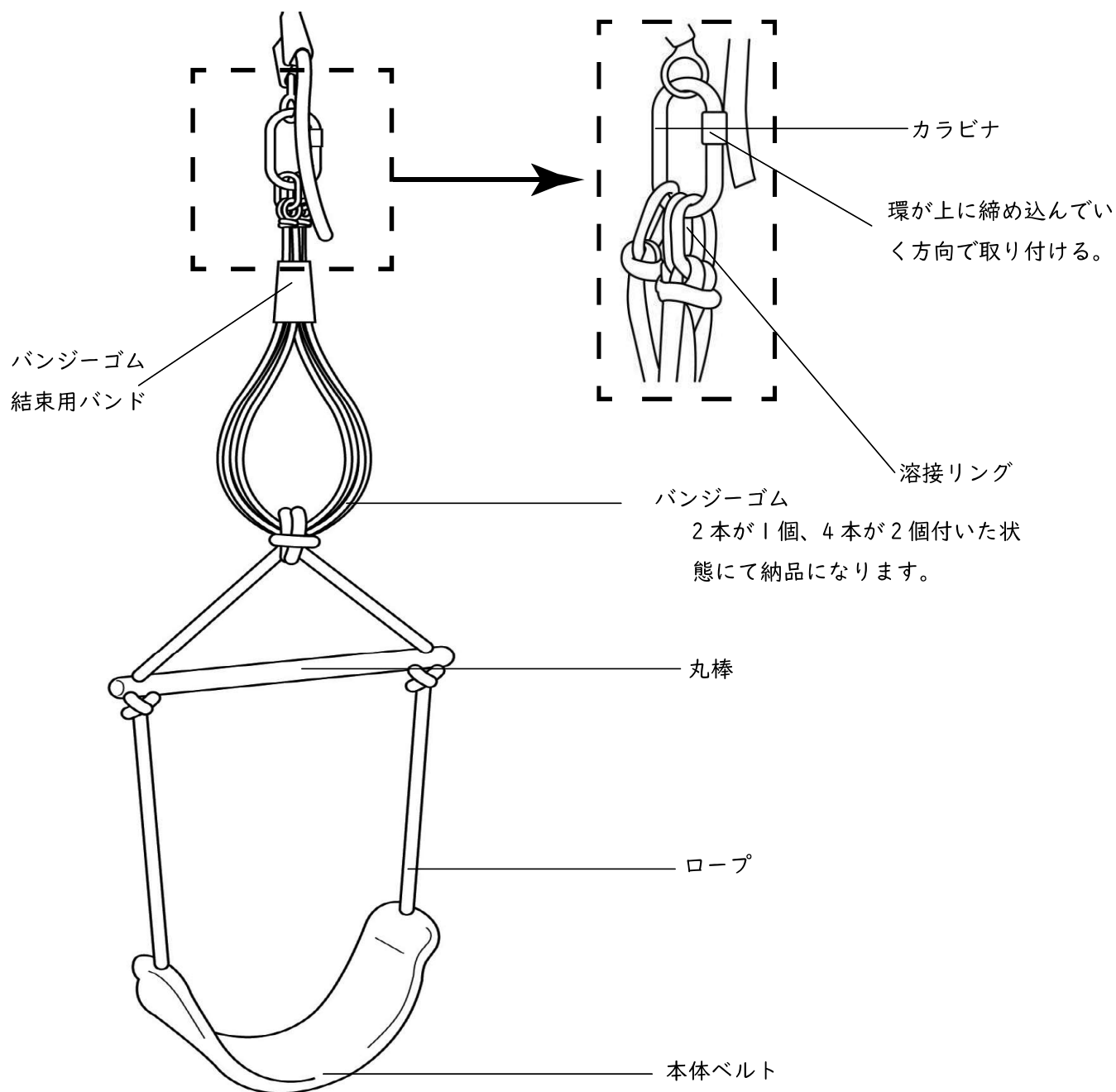

製品名	構成部品	材質	仕様
フロッグスイング	バンジーゴム	合成ゴム	溶接リング付き
	ロープ	ポリエステル	直径 16mm バンジーゴム付き
	本体ベルト	合成ゴム	全長 600mm、全幅 150mm
	溶接リング	ステンレス	全長 65mm、全幅 45mm
	カラビナ	スチール	外寸：110×55mm、内寸：95×35mm、径：10mm
	丸棒	木材	全長 450mm、直径 30mm

4. 設置方法

4-1. 設置する前に

設置する場所を確認してください。



警告

- 本製品を使用する場合は周りに人や物がいないことを確認してください。不意な衝突・転倒等の事故などにつながる恐れがあります。
- 各種の部品が確実に取り付けであることを確認してください。取り付けが不十分な場合は、使用中に金具などが外れて事故などにつながる恐れがあります。



注意


- 本製品に鋭利な物を当てないでください。カバーが破れて、事故につながる恐れがあります。
- 常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内での長時間の放置、熱器具（ストーブなど）の近くでの使用はしないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。また、熱によって変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

■チェック項目

- ☐十分に使用に耐えうる強度がある場所に本製品が取り付けられているか。
- ☐マットが敷いてあるか。
- ☐カラビナ・溶接リング・高さ調節器具・丸棒に破損や損傷はないか。
- ☐ロープ・バンジーゴムの結び目にゆるみはないか。
- ☐ロープ・バンジーゴムに損傷や裂け等はないか。
- ☐付属品が取り付けられているか。

4. 設置方法

4-2. ロープ（別売品）を施設の天井フックに下記の方法で取り付けます

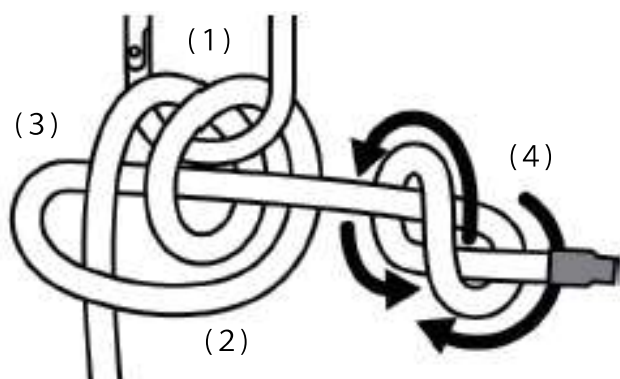

ロープの結び方

この結び方は金具をしっかり締め付ける事が出来ます。
ロープの一方を金具に2回(1)巻き付け2つのループの正面に持ってきて(2)、そのループの中に通します(3)。さらに念のためロープの先端を一つに結びしておき(4)、ロープの結び目が5cm以上できるようにしてください。
外す際は(2)の部分を引っ張り下ろすと、楽に緩めることが出来ます。



ロープの取り付け方を動画でご覧いただけます。



警告

- 上記以外の方法でロープを取り付けないでください。
使用中に結び目がほどけたりロープがすり切れて破損したり、落下する恐れがあります。
- ロープは、金具と接する面が曲面の部分に取り付けてください。
かどばったものなどに取り付けると使用中にロープがすり切れて破損し、落下する恐れがあります。
- ロープを取り付ける場所は、天井の梁やスイングサポートフレーム（別売品）など、十分に強度のある場所を選んでください。



高さ調節器具は、写真のようにフックが下になるように、ロープ（別売品）に通し固定してください。


4. 設置方法

4-3. 本製品の下にマットを敷く



警告

- 本製品の底面が床から 20cm ～ 30cm になるような高さに取り付けてください。20cm 未満の場合、使用者が本体と床との間にはさまれる恐れがあります。
- 転落時のけがを防止するため、使用時は本製品の真下に必ずマットを敷いてください。

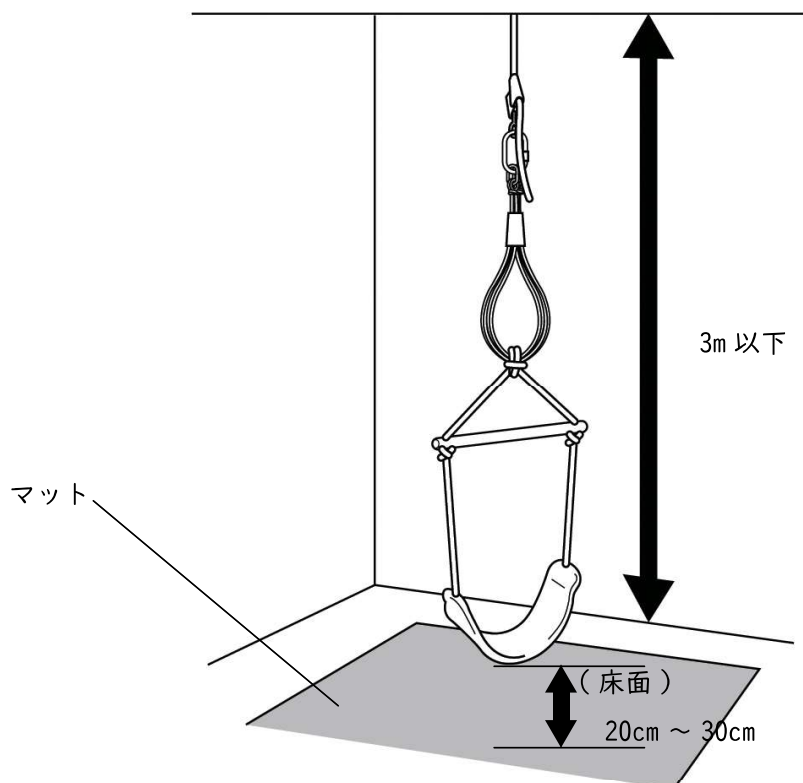

5. 設置後の点検



注意

- 設置後の点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。また、設置後の点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

■ チェック項目

- ☐ 十分に使用に耐えうる強度がある場所に本製品が取り付けられているか。
- ☐ マットが敷いてあるか。
- ☐ カラビナ・溶接リング・高さ調節器具・丸棒に破損や損傷はないか。
- ☐ ロープ・バンジーゴムの結び目にゆるみはないか。
- ☐ ロープ・バンジーゴムに損傷や裂け等はないか。
- ☐ 付属品が取り付けられているか。

6. 使用方法

6-1. 本製品の使用方法



警告

- 本製品はあえて不安定（揺れる・落ちる）な環境を作り出し、バランス感覚・姿勢保持機能・全身の筋力向上などを獲得していただく製品となっております。転倒・転落するリスクもございますので、必ず医療関係従事者などの専門家の管理下において、転倒・転落の防止措置や落下時の安全確保を行っていただいた上で、ご使用ください。
なお安全にご使用できるかについては、専門家によりご判断してください。
- 本製品を使用した運動は必ず医療関係従事者などの専門家の指導のもとで行ってください。また、使用中は必ず作業療法士などのリハビリテーション関連スタッフが付き添ってください。
- 使用例①・使用例②以外の方法で使用しないでください。事故等につながる恐れがあります。




注意

- バンジーゴムの取り外しの際は、カラビナで手をはさまないように注意してください。


6-2. 使用例

使用例① 腹這いで使用する場合

※本体ベルトは必ず脇の下に来るようにしてください。※本体ベルトに臀部がしっかり乗るようにしてください。

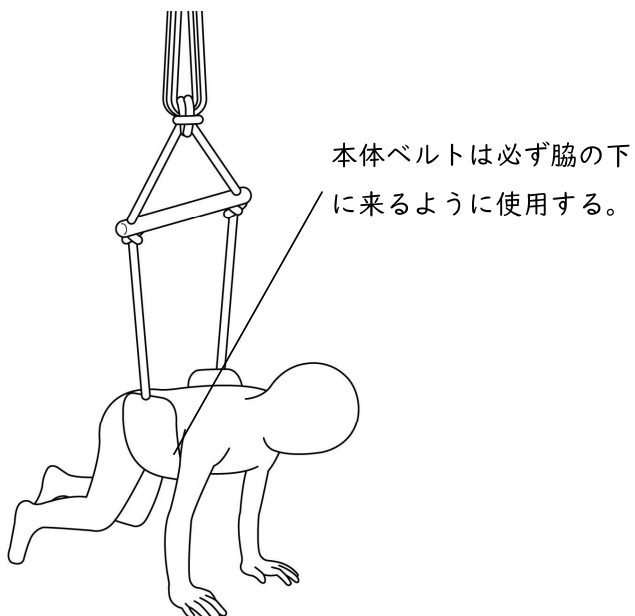

使用例② 座位で使用する場合

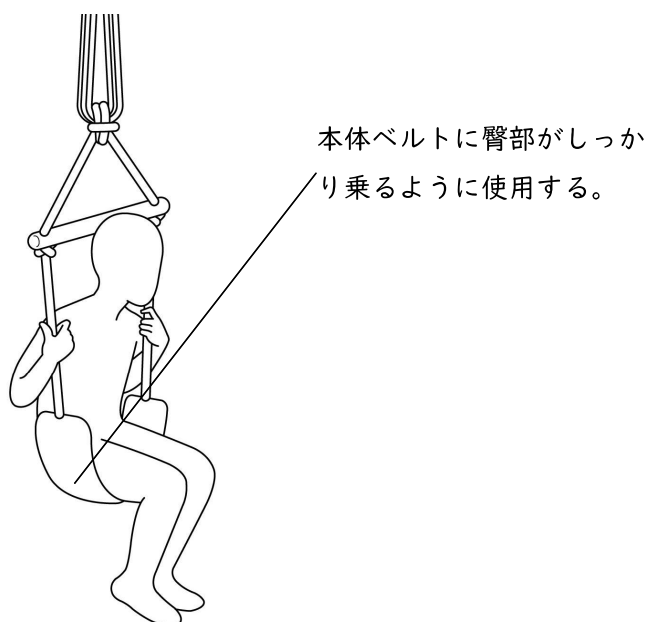

6. 使用方法

6-3. 使用推奨体重







バンジーゴムを使用者の体重に合わせて調節してください（下表に従って調節してください）。

※推奨体重は 10kg ～ 50kg です。

[体重に合わせたバンジーゴムの取り付け例]

バンジーゴム 2 本 → 10kg に相当

バンジーゴム 4 本 → 20kg に相当

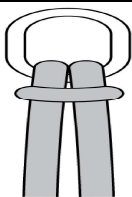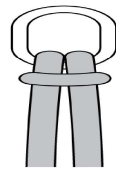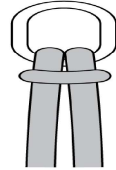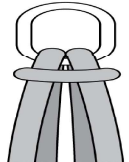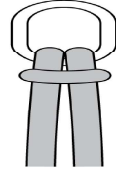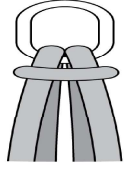バンジーゴム 2 本		バンジーゴム 4 本	
体重 10kg	バンジーゴム2本 		
体重 20kg	バンジーゴム4本 		
体重 30kg	バンジーゴム2本 	バンジーゴム4本 	
体重 40kg	バンジーゴム4本 	バンジーゴム4本 	
体重 50kg	バンジーゴム2本 	バンジーゴム4本 	バンジーゴム4本 

7. 日常の保守点検

下記の保守点検を行ってください。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。



注意

- 保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行ってください。
また保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異状を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

チェック項目

- ☐十分に使用に耐えうる強度がある場所に本製品が取り付けられているか。
- ☐マットが敷いてあるか。
- ☐カラビナ・溶接リング・高さ調節器具・丸棒に破損や損傷はないか。
- ☐ロープ・バンジーゴムの結び目にゆみはないか。
- ☐ロープ・バンジーゴムに損傷や裂け等はないか。
- ☐付属品が取り付けられているか。

8. お手入れ方法

8-1. 本体カバー

- ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 日常のお手入れは、乾いた布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れがとれなくなります。

8-2. 金属部分、木材部分

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 拭き取り時に、消毒用エタノールを浸透させた布は絶対に使用しないでください。

9. 保管方法

- 常温の範囲で保管してください。常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
- 湿気の少ない、風通しのよい場所に保管してください。
- 本製品の上に重いものをのせないでください。製品が変形または破損する恐れがあります。
- 本書は常に製品とともに手元に保管し紛失しないようにしてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。
- 高濃度オゾンが発生する場所では保管しないでください。また、オゾン発生装置の近くでは使用や保管をしないでください。製品が劣化し、変形や破損を生じる恐れがあります。

10. 修理について

- 無断で修理・部品交換・改造などは絶対に行わないでください。
- 本製品の修理・部品交換・改造などが必要と思われる場合は販売店にご相談ください。
- ロープは、10年で交換を推奨いたします。（有償）
- カラビナは、外径が8mm以下（標準10mm）で交換を推奨いたします。（有償）
※上記の各部の交換時期は目安です。使用頻度によって交換時期が前後しますので注意してください。

11. 廃棄方法

- 本製品の材質は「3. 各部の名称と仕様」のページを参照ください。
- 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

1 2. 保証書

保証書

本製品は品質管理・検査のもとに皆様にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規定に基づき無料修理いたします。その際は現品に本保証書を添えてご購入の販売店へご提出ください。

品名	フロッグスイング
ご購入年月日	/ /
お客様名	
施設ご住所	〒
施設電話番号	
販売店	
保証期間	1 年保証

- ご購入年月日、販売店の欄に記入のない場合は無効となります。
必ず記入の有無をご確認ください。ご記入のない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規定に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間が過ぎた後の修理などについてご不明な場合は、販売店までお問い合わせください。

※保証規定は次ページをご覧ください。

保証規定

- (1) 保証期間はご購入の日から1年間です。保証期間内に発生した故障につきましては無料修理いたします。
- ※安心パックに登録された方はこの限りではありません。安心パック用の保証書の保証期間をご参照ください。
- (2) 保証の対象となる部分はこの製品一式です。ただし、本製品を取り付けた建物への影響や布地・張地の劣化による故障・損傷や鋭利な物による破損、裂傷は除きます。
- 消耗品についても除きます。(カラビナ・ロープ等)
- (3) 無料修理には保証書の提出を要します。
- (4) 次の場合には保証できませんが、特にご希望の方には実費にて修理いたします。
- その際に出張・配送費用をいただく場合があります。
- ① 保証書を紛失された場合
 - ② 誤ったご使用方法による故障・損傷
 - ③ 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - ④ 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - ⑤ ご購入後の輸送・移動、落下等による故障・損傷
- (5) ご相談口は販売店にて承ります。
- (6) 転居・引越し・譲渡を行った場合は新しいご住所と電話番号を販売店までご連絡ください。
- (7) その他
- ①本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ②本書は再発行いたしません。

● 販売元



パシフィックサプライ株式会社

本社

〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1

TEL 072 (875) 8008 FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2024/08 改定