

感覚統合器具 はずみ板

本取扱説明書の対応製品

はずみ板 Square、はずみ板 Slim、はずみ板 Mini、はずみ板 Long



この度は「感覚統合器具 はずみ板」をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本書は「感覚統合器具 はずみ板」を安心してご利用いただけるよう、わかりやすく説明してあります。
ご利用いただく前に必ずお読みいただき、注意点などをご確認ください。
また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

製品に関するお問い合わせは最終ページをご参照ください。

取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様にお願いします。

はずみ板について

はずみ板とは

はずみ板は、お子様が本製品に乗る、平均台のように渡る際にはずみや揺れが発生します。

あえて不安定な（揺れる・落ちる）環境を作り出し、前庭覚と固有受容覚を刺激し、バランス感覚、姿勢保持機能、体幹機能を養うことを目的としております。

器具の特性を生かして頂き、自由な発想でお子様の可能性を引き出してください。

※本製品は、器具から転倒・転落するリスクもございますので、必ず医療関係従事者など専門家の管理下において、転倒・転落の防止措置や落下時の安全確保等を行っていただいた上で、ご使用ください。

目次

1. 安全にご使用いただくために……………	3 ページ
2. 梱包の解き方……………	5 ページ
3. 各部の名称と仕様……………	6 ページ
4. 設置前に……………	7 ページ
5. 設置後の点検……………	7 ページ
6. 使用方法……………	8 ページ
7. 日常の保守点検……………	11 ページ
8. お手入れの方法……………	11 ページ
9. 保管方法……………	11 ページ
10. 修理について……………	12 ページ
11. 廃棄方法……………	12 ページ

1. 安全にご使用いただくために

「感覚統合器具 はずみ板」の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本書をよく読み内容を理解してください。

その後大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

本書では色々な絵表示をしています。これは「感覚統合器具 はずみ板」を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々に加える恐れのある危害や損害を未然に防ぐための目印となるものです。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

1-1. 警告に関する事項



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 本製品はあえて不安定な（揺れる・落ちる）環境を作り出し、前庭覚と固有受容覚を刺激し、バランス感覚、姿勢保持機能、体幹機能を養う製品となっております。転倒・転落するリスクもございますので、必ず医療関係従事者など専門家の管理下において、転倒・転落の防止措置や落下時の安全確保等を行っていただいた上で、ご使用ください。なお、使用者が安全に使用できるかについては、医療従事者など専門家においてご判断ください。
- 転倒・転落時のけがを防止するため、使用時は必ず医療関係従事者など専門家が付き添ってすぐに補助できる状況でご使用ください。
- 転倒・転落時のけがを防止するため、使用時は本製品の真下に必ずマットやクッション性の高い物を敷いてください。必要に応じて、ヘルメットやプロテクターなどの保護具を着用してご使用ください。
- 本製品の耐荷重は 80kg です。本製品を使用する方の総荷重が耐荷重以下になる範囲でご使用ください。80kg を超える荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。
- 本製品を使用している時は、使用者と付き添い者以外近づかないでください。不意に身体に当たり、事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品を使用する際は、必ず素足で使用してください。
- 製品と床の間に足や手を近づけないでください。足や手を挟む恐れがあります。
- 本製品のゴム足を噛んだり、ちぎったりしないでください。
- 本製品を投げないでください。
- 本製品を使用する場合は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで本製品をご使用にならないでください。
- 本製品を使用していない場合は、安全な場所に保管してください。
- 本製品を踏み台などとし、本来の目的（感覚統合療法等の目的）以外には絶対に使用しないでください。

1. 安全にご使用いただくために

1-2. 注意に関する事項



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、
傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行なってください。
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず販売店へ修理交換をご相談ください。
- 常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 本製品にシール等の粘着物を貼付しないでください。
製品にささくれ等の損傷が発生する恐れがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。
- 本書中の図は一部を省略及び抽象化した表現になっているものがあります。
- 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。
- 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。
不明な事柄については弊社まで問い合わせてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに気付いた場合は弊社までご連絡ください。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。
- 開梱の際にカッター等で製品を傷つけないようにしてください。
- 高濃度オゾンが発生する場所での使用・保管はしないでください。また、オゾン発生装置の近くでは使用や保管をしないでください。製品が劣化し、変形や破損が生じる恐れがあります。

2. 梱包の解き方

2-1. ダンボールの開梱

本製品はダンボール箱で配送されます。箱の中でエアークラップに包まれていますが、開梱の際にカッター等で製品を傷つけないように注意してください。



注意

開梱の際にカッター等で製品を傷つけないようにしてください。

2-2. 内容物（構成部品）の確認

ダンボール箱の中に「3. 各部の名称と仕様」（6 ページ参照）に記載されている部品類が全て入っているか確認してください。


2-3. 製品の確認

製品に傷や損傷がないか確認します。
もし何かありましたら、販売店（別紙保証書）へお問合せください。

3. 各部の名称と仕様


構成部品と各部の名称

本製品は次のような部品で構成されています。付属品に不足等はないか点検してください。

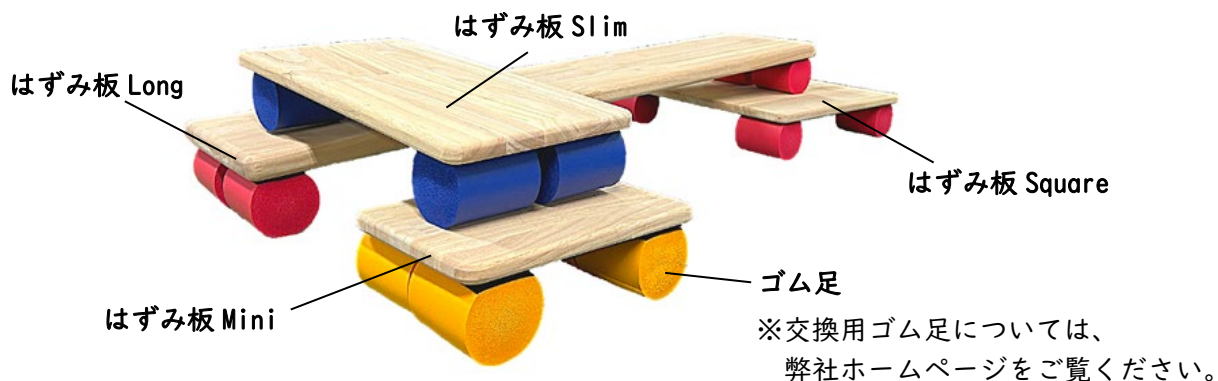

面ファスナー貼付箇所

本体及びゴム足には面ファスナーが貼付されています。
不足等はないか点検してください。

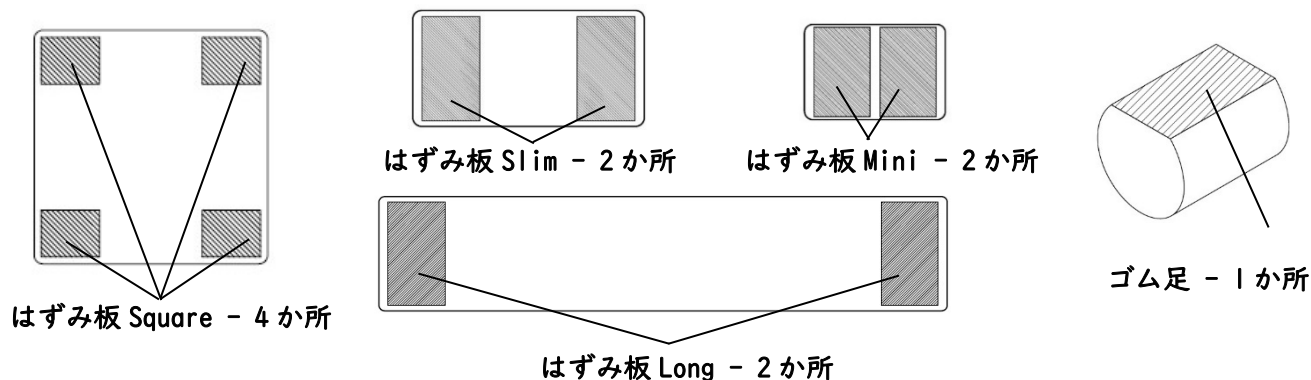

構成部品詳細

製品名	構成部品	材質	仕様
はすみ板 Square	本体 1個	木材	40cm×40cm×厚さ2.4cm
	ゴム足 4個	合成ゴム	8cm×6.6cm×厚さ6cm
はすみ板 Slim	本体 1個	木材	40cm×20cm×厚さ1.5cm
	ゴム足 4個	合成ゴム	8cm×6.6cm×厚さ6cm
はすみ板 Mini	本体 1個	木材	25cm×17cm×厚さ1.5cm
	ゴム足 4個	合成ゴム	8cm×6.6cm×厚さ6cm
はすみ板 Long	本体 1個	木材	100cm×20cm×厚さ2.5cm
	ゴム足 4個	合成ゴム	8cm×6.6cm×厚さ6cm

製品外寸・耐荷重 (※製品外寸及び耐荷重は本体にゴム足を4個取り付けた状態での数値です。)

製品名	外寸	耐荷重
はすみ板 Square	40cm×40cm×高さ8.4cm	80kg
はすみ板 Slim	40cm×20cm×高さ7.5cm	80kg
はすみ板 Mini	25cm×17cm×高さ7.5cm	80kg
はすみ板 Long	100cm×20cm×高さ8.5cm	80kg

4. 設置前に

設置する前に設置場所を確認してください。



警告

- 本製品を使用する場合は周りに人や物が無いことを確認してください。不意に身体に当たったり、転倒したり等の事故などにつながる恐れがあります。
- 各種の部品が確実に取り付けられていることを確認してください。取付けが不十分な場合、使用中にゴム足が外れて事故などにつながる恐れがあります。



注意

- 常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 高濃度オゾンが発生する場所やオゾン発生装置の付近で絶対に使用しないでください。製品の劣化を促進させる恐れがあります。劣化した製品は使用しないでください。
- 起毛性のマット及びカーペット等の上には設置しないでください。起毛が面ファスナーに付着し、係合力の低下につながります。

5. 設置後の点検



注意

- 本製品の上げ下ろしや移動の際に足や手を挟まないように注意してください。
- 本体を持ち上げる際は必ず木材本体をしっかり持ち、ゴム足は絶対に持たないでください。

■チェック項目

- ☐ 十分に使用に耐えうる強度がある床・場所に本製品が置かれているか。
- ☐ 本製品の真下にマットや柔らかいものが設置されているか。
- ☐ 本体、ゴム足に破損や損傷はないか。
- ☐ 本体にささくれが発生していないか。
- ☐ 本体、ゴム足の面ファスナーに剥がれがないか。
- ☐ 本体の4か所にゴム足が取り付けられているか。
- ☐ 周りに人やものがないか。

6. 使用方法

6-1. 本製品を使用する前に



警告

- 本製品はあえて不安定な（揺れる・落ちる）環境を作り出し、前庭覚と固有受容覚を刺激し、バランス感覚、姿勢保持機能、体幹機能を養う製品となっております。転倒・転落するリスクもございますので、必ず医療関係従事者など専門家の管理下において、転倒・転落の防止措置や落下時の安全確保等を行っていただいた上で、ご使用ください。なお、使用者が安全に使用できるかについては、専門家においてご判断ください。
- 転倒・転落時のけがを防止するため、使用時は必ず医療関係従事者など専門家が付き添って、すぐに補助できる状況でご使用ください。
- 転倒・転落時のけがを防止するため、使用時は本製品の真下に必ずマットやクッション性の高い物を敷いてください。必要に応じて、ヘルメットやプロテクターなどの保護具を着用してご使用下さい。
- 本製品を使用する場合は周りに人や物が無いことを確認してください。不意に身体に当たったり、転倒したり等の事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品は絶対に分解しないでください。使用中に外れて事故などにつながる恐れがあります。
- 各種の部品が確実に取り付けであることを確認してください。取付けが不十分な場合、使用中にゴム足などが外れて事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品が揺れているときは、使用者及び付き添い者以外近づかないでください。不意に身体に当たり、事故などにつながる恐れがあります。
- 本製品は足場が不安定な場所では使用せず、平坦な床で使用してください。梯子や丸棒、ロープに架けて使用しないでください。本体からゴム足が外れ、事故につながる恐れがあります。
- 本製品を壁に立てかけないでください。倒れて事故につながる恐れがあります。
- 本製品を裏返して使用しないでください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中断し、休憩してください。
- 本製品を使用する場合は使用方法や取扱注意事項などがご理解いただけるまでご使用にならないでください。
- 保守点検は使用前に本製品管理者が必ず行ってください。また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に修理交換をご相談ください。
- 本製品の耐荷重は「3. 各部の名称と仕様」の項目に記載の各製品の耐荷重に従い、製品を使用する方の総荷重が各製品の耐荷重以下になる範囲でご使用ください。耐荷重を超える荷重で使用すると事故等につながる恐れがあります。



注意


- 本製品を修理改造しないでください。破損などが生じた場合は必ず販売店へ修理交換をご相談ください。
- 本製品に鋭利な物を当てないでください。本製品が破損し、事故につながる恐れがあります。
- 常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。熱により、変色や変形する恐れがあります。変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

6. 使用方法

※本製品はあえて不安定な（揺れる・落ちる）環境を作り出し、前庭覚と固有受容覚を刺激し、バランス感覚、姿勢保持機能、体幹機能を養う製品となっております。本書の使用例であっても転倒・転落するリスクもございますので、必ず医療関係従事者など専門家の管理下において、転倒・転落の防止措置や落下時の安全確保等を行っていただいた上で、十分に注意してご使用ください。

6-1-1. ゴム足の取付に関する禁止事項


本製品を使用する際は、ゴム足が4個取り付けられている状態で使用してください。

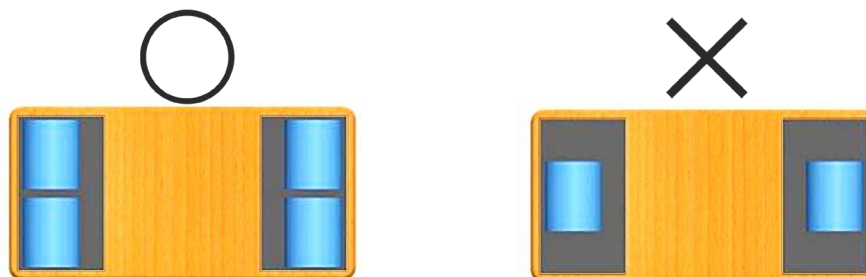

6-1-2. 本製品を重ねて使用する際の禁止事項


本製品を重ねて使用する際は、4段以下でご使用ください。

※全体の高さが35cmを超えないようにしてください。

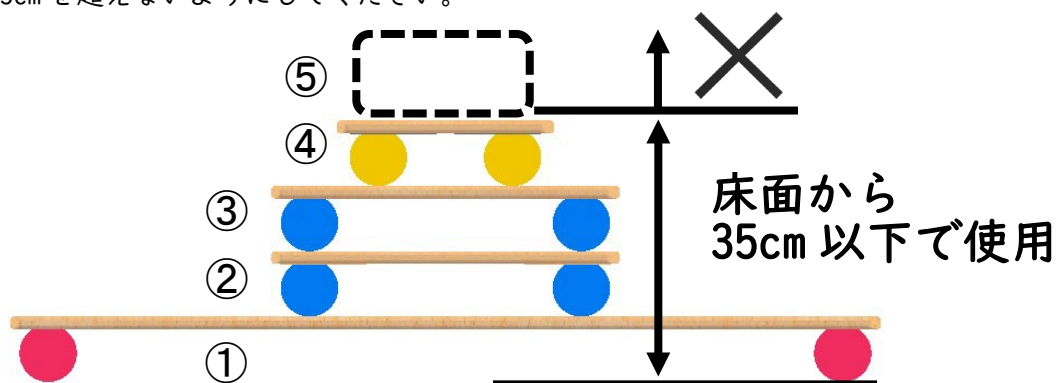

6-1-3. 本製品に乗る際及び本製品を重ねて使用する際の禁止事項

本製品に乗る際は、一方のゴム足の中央からもう一方のゴム足の中央までの区間に足を乗せて使用してください。また、本製品を上下に重ねて使用する際や、斜めに重ねて使用する際も、一方のゴム足の中央からもう一方のゴム足の中央までの区間にゴム足を乗せて使用してください。ゴム足の中央より外側に足やゴム足を乗せて使用すると板がひっくりかえり、転倒、転落する恐れがあります。

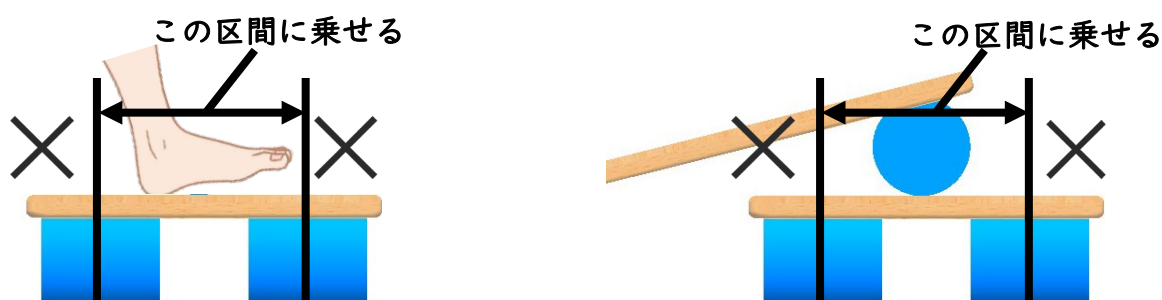


6. 使用方法

6-2. 使用例

渡る：橋のように架けられる


登る：片側を重ねることで坂になる

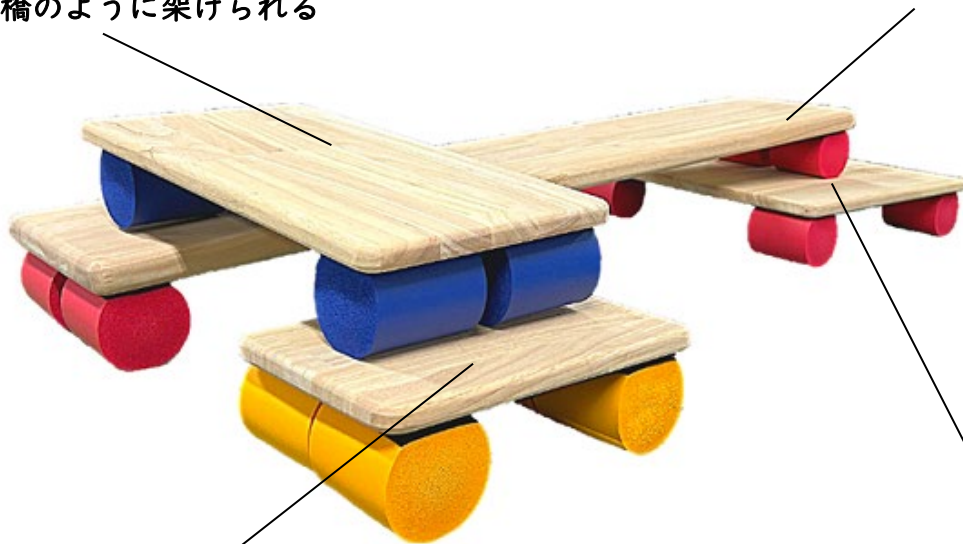

飛び石：適度な間隔において飛んで渡る

重ねる：はずみや揺れ具合を大きくさせる

ゴム足の向きを変更することではずみ・揺れに変化がでる

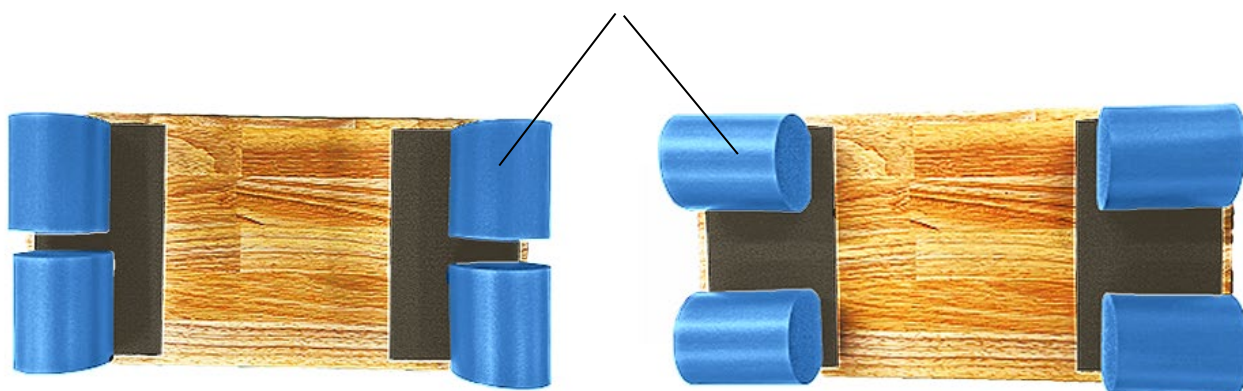

7. 日常の保守点検

下記の保守点検を行ってください。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。



注意

- 保守点検は使用前に本製品管理者が必ず行ってください。
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に修理交換をご相談ください。

■チェック項目

- ☐ 本体、ゴム足に破損や損傷はないか。
- ☐ 本体にささくれが発生していないか。
- ☐ 本体、ゴム足の面ファスナーに剥がれがないか。
- ☐ 本体、ゴム足の面ファスナーにゴミや汚れが付着していないか。
- ☐ 本体の4か所にゴム足が取り付けられているか。

8. お手入れの方法

- ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
水拭きした場合、木材の表面にささくれや毛羽立ちが発生する可能性がありますので水拭きはしないでください。
- 消毒液などシンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
- 飲み物をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れがとれなくなります。
- 面ファスナーにゴミや汚れが付着している場合は取り除いてください。係合力の低下の恐れがあります。

9. 保管方法

- 常温の範囲で保管してください。常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
- 湿気の少ない、風通しのよい場所に保管してください。
- 高濃度オゾンが発生する場所やオゾン発生装置の付近で絶対に保管しないでください。製品の劣化を促進させる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものをのせないでください。製品が変形または破損する恐れがあります。
- 保管の際は本体からゴム足を外した状態で保管してください。
- 本書は常に製品とともに手元に保管し紛失しないようにしてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。

10. 修理について

- 無断で修理・部品交換・改造などは絶対に行わないでください。
 - 本製品の修理・部品交換・改造などが必要と思われる場合は販売店にご相談ください。
 - ゴム足は、3年で交換をお勧めします。(有償)
- ※上記の交換時期は目安です。使用頻度によって交換時期が前後しますので注意してください。

11. 廃棄方法

- 本製品の材質は、「3. 各部の名称と仕様」(6ページ)を参照ください。
- 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

●販売元



パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2025.1 改訂