

頸部継手取付、調整方法

PCJ-04 (バックオフセット)



PCJ-05 (ストレート)



- ヘッドサポート取り付け方法
M5 ネジでヘッドサポート本体と金具を留めます。
必ず4か所以上で留めて下さい。
穴位置は選択可能です。



- 取付方法
M6 ネジにばねワッシャー、ワッシャーを通して
バックサポート(背板)に取り付ける。
4か所全てでねじを留めてください。



- 調整方法
角度、上下、前後、左右の調整が可能です。

※バックオフセット金具はストレート金具に比べ、
後方に40mm引くことが可能です。

