



補助器具紹介


介助用ヒップベルトの機能

椅子、車いす上の座位修正介助に、主に使用します。


ノルデックスライドと併用する事により、ベッド上での上方への位置修正の介助が容易になります。

車いす上(椅子上)の座位修正



仙骨座り(すべり座り)になった座位姿勢を修正します。

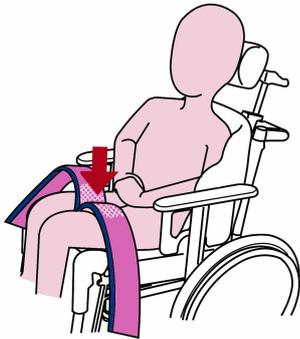

介助用ヒップベルトの滑り止め部分を内側にして、半分に折ります。ベルトの赤い縁側を臀部側にして、ベルトの中に手を入れて、対象者の左右の大腿部の間に差し込みます。

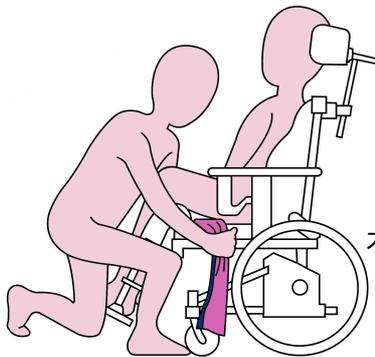


大腿部を座面から少し浮かせて、介助用ヒップベルトを、大腿後面から体側に沿わせるように、敷きこみます。介助で大腿部を浮かせベルトを挿入しなければならない時は、中腰作業にならないよう注意して下さい。

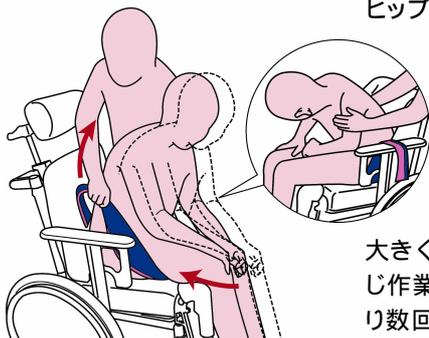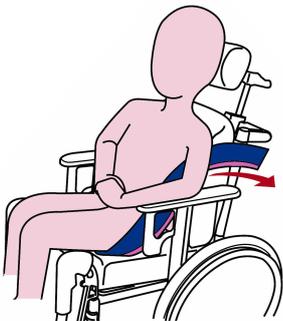


対象者を斜め前方に傾けて支え、その反対側の介助用ヒップベルトの端を把持して脊柱に対して、斜め上方にゆっくりと軽く引き上げます。この作業は、前方へのズレの大きい側を先に行います。一気に大きく動かすのではなく、同じ作業を左右交互に、ゆっくり数回繰り返します。この動きは、私たちが椅子上で座り直しをする時の、自然な動きをイメージして下さい。

前傾姿勢をとらせたい時


一般的な介助法で前傾姿勢をとらせにくい場合

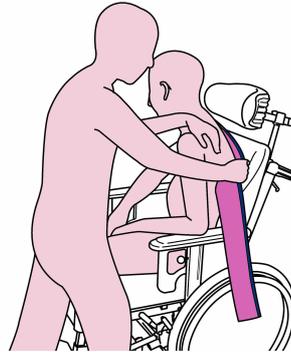

右を向いてもらって、左肩の下にベルトを挿入し、左肩を被うようにベルトをかけ下さい。反対側を向いてもらって、右肩にもベルトをかけて下さい。顔を横に向けると、その反対側の肩が少し浮きます。そのため、ベルトの挿入が容易になります。

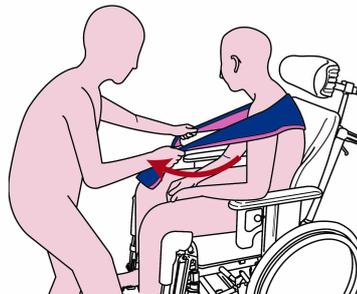

ベルトの端を持って、片方ずつ斜め前方に、交互に軽く引っ張ると、ゆっくりと前傾させる事が出来ます。両手でまっすぐ前方に引っ張るのではありません。

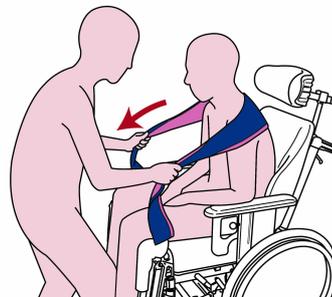

介助用ヒップベルト




品番	1846
幅	90～160mm
長さ	1680mm
重量	155g
材質	表材 / 綿ツイル 裏材 / すべり止め材


¥5,145 (税込)

ベッド上での上方への位置修正(全介助で行う場合)


ベッドの背上げ機能の利用などにより、足もとにずれてしまった対象者を上方に位置修正します。

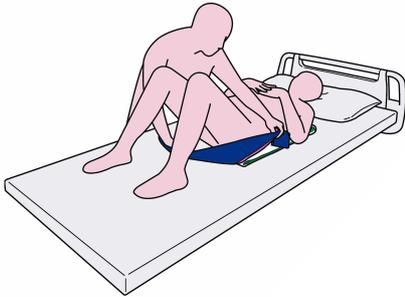

最初に、良い作業姿勢を確保するために、ベッドの高さを調整します。対象者の肩先と枕の間に隙間を作って、上方への移動の準備をします。ノルデックスライド(ショートorミディ)を、輪が上下になる方向に、臀部から背中にかけて敷き込みます。両膝を立てて、介助用ヒップベルトの赤い縁側を臀部に沿うように置きます。ベルトの両端を体の前でクロスして重ねます。

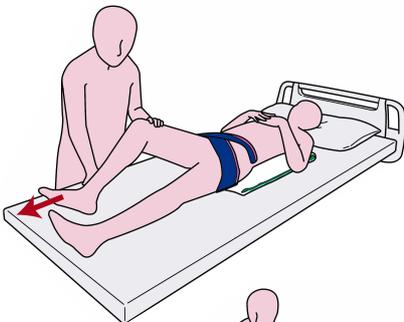

介助者が下肢を、静かに伸ばします。

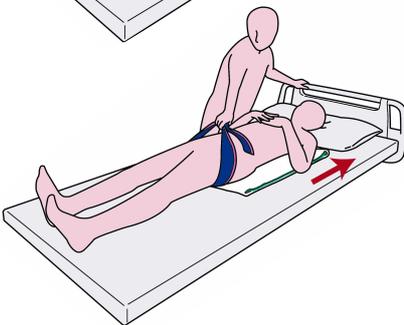

対象者の右側から介助する場合、右手でベルトの重ね合わせた部分を把持し、左手はベッドのヘッドボードを持つか、マットレスに手をつけて構え、介助者の右足から左足に重心を移動する事によって、静かに上方に引き上げます。腕力で引っ張るのではありません。緩やかに少しずつ動かす事が大切です。

*イラストの都合上ベッド柵、フットボードを外しています。

ノルディックスライド



品番	5148	5149
モデル	ショート	ミディ
外形寸法	全長60×幅74cm	全長80×幅74cm
質量	340g	450g
材質	裏布 ポリエステルニット 内布 ポリアミド特殊加工布 中綿 ポリエステル	

(収納・持ち運び用バック付) **¥16,800**(税込) | **¥18,375** 税込)

MTS移乗用具セミナーのご案内

MTS移乗用具のメーカー(GSI社・ノルウェー)より理学療法士のThy氏を迎え、移乗動作の理論と用具を使用した移動・移乗介助の演習を行います。

講師：Ole Lindahl Thy氏(理学療法士)

会場：川村グループ本社
大阪府大東市御領1-12-1

日時：10月10(日)10:00～15:00

内容：午前 移乗動作概論
午後 MTS移乗用具を使用した移乗動作演習

対象：看護・介護に関わっておられるケアワーカーの方
(看護師・保健師・介護福祉士 など)

定員：30名

費用：2,000円(昼食代含む)

講師略歴：

- ～1987 デンマーク・オーフス大学にて理学療法専攻終了後、大学院にて人間動作学、口頭伝導トレーニング、車いす座位、姿勢学、体位移乗学を学ぶ
- 1987～88 デンマークの一般病院、ノルウェーのリハビリセンター・一般病院で理学療法士として勤務後、1989～91テクニカルセンターにて理学療法アドバイザー
- 1995～2002 HandCare ASA社にて車いすシーティング姿勢部門の教育係(内1年はHandiCare Deutschland GmbH社にて教育マネージャー)
- 2002～ GSI社MTS移乗用具の製品・教育マネージャー

お問合せ パシフィックサプライ(株)マーケティング室
TEL 072-875-8013 FAX 072-875-8017
E-mail a-kitada@p-supply.co.jp 担当 北田