

～ 長く安心してお使いいただくために ～

オズールフルセット義足

フルセットの強み ①

**強度・安全性が
保証されます！**

オズール製品はISO 10328準拠の
200万回 耐久試験に合格しています。

**特にピラミッド直上の
調整用部品は重要です**

過去に互換性のないアダプタとの組み合わせにより、接触部に隙間が生じ、装着時にゆるみやガタつきにつながり、最終的にピラミッドが破損したケースがあります。

パーツ交換の際は調整用部品も
ご確認ください



フルセット義足例は
こちらからご確認
いただけます



裏面にサンプルあります

フルセットの強み ②

**「フルセット補償」で
耐用年数の間、安心！**

外装・ソケットを除くすべてのパーツをオズール製品に
していただくと、メーカー保証期間に加え、耐用年数の
間、修理・交換にかかる費用を補償する、パシフィック
サプライ独自のサービスです。

フルセット義足例

義肢装具士にすぐにお役立ていただける情報を、下腿義足・大腿義足とにもご用意しています。
(フルセット義足は順次更新していきます)

どのような
対象者に推奨か

下腿義足①

低活動
K1~2

断端保護を優先した安全な歩行の実現

キンケア成分を含んだシリコンライナーにより、血液循環疾患による切断など、傷が懸念される、敏感な肌の方にも適します。血行不良や皮膚の脆弱性がある断端に対して、皮膚トラブルや潰瘍のリスクを抑制します。

足部は前足部が幅広ブレードになっていることで、より安定した歩行が実現でき、安全を優先して歩行いただけます。内部障害等の合併症による体力低下や、不随意運動、バランス能力の低下がみられる方に対し、転倒防止などの安全を最大限に重視した構成です。



Iceross デルモ
ロッキングライナー



バランスフット S

なぜそのパーツが
適しているかの
選定理由

製品名	選択理由	メーカー推奨活動レベル	機能区分上の位置づけ
断端用ライナー： Iceross デルモ ロッキング (オズール I-4013)	断端と硬性ソケットの間に均一な界面圧を保ち、断端皮膚への剪断力・摩擦を軽減。血行不良断端や皮膚の脆弱性がある低活動者において断端トラブルのリスクを抑制します。	MG1~MG2 (K1~K2 相当) 低活動者の断端保護・衝撃吸収に適合。	ゲルライナー（シリコン系）として機能区分表に収載。断端ボリューム調整・断端管理上の優位性から現在の標準的選択。
足部： バランスフット S (オズール BSP0)	グラスファイバー製のエネルギー蓄積型(ESAR)ブレードにより、踏み出しまで安定した歩行を実現。低活動者の歩行スピード・活動範囲に適した適度なコンプライアンスを持ちます。	MG1~MG2 (K1~K2 相当) 安定性重視で、屋内歩行～近距離屋外歩行を主とする低活動者の日常生活に対応。	エネルギー蓄積型足部として機能区分表に収載。単軸足部と比較し推進補助機能を有し、対象者の身体機能・生活状況に照らして適切な選択です。

< 参考見積 (令和8年度) >

項目	金額	名称・型式	完成用部品	製品名	金額
基本価格 B-4 TSB式	¥86,500	その他 シリコンライナー B ビンタ付あり	オズール I-4013	ICEROSS デルモ ロッキングライナー	¥98,700
基本価格(加算) シリコンライナー・チェックパッド	¥50,600	その他 ライダーロックアダプタ	オズール L-211000	Icelock 211 クラッチロック	¥42,600
ソケット価格 B-4 熱硬化性樹脂	¥28,100	コネクタ フットアダプタ ピラミッド	オズール L-273000	Icelock 211 ステンレスピラミッド 273	¥13,600
ソケット価格 B-4 カーボンストッキング	-	クランプ アダプタ φ30用ピラミッド (M)	オズール A-342100	メスピラミッド付 チューブクランプ アルミ	¥28,100
支持部 下腿義足用	¥12,000	チューブ ピラミッド (M)付	オズール A-742010	メスピラミッド 250mm アルミ	¥20,700
外装 下腿義足用	¥19,200	足部 C 多軸足部 多軸	オズール BSP0	バランスフット S	¥95,500
小計	¥196,400	外装用部品 フォームカバー B 下腿用	ワットアップ 6R8	フォームカバー 下腿用 硬性	¥11,500
小計	¥516,000	その他 断端袋 B 下腿用	-	-	¥5,900
消費税相当額 6%	¥30,960	外装用部品 ストッキング B 下腿用	ナゲル N-1365	下腿義足用ストッキング	¥3,000
合計	¥546,960				