


令和8年度 完成用部品認可！

Connect TF

義足スターターセットのご案内

届いたら
組み立てるだけ！

すぐに義足が完成します

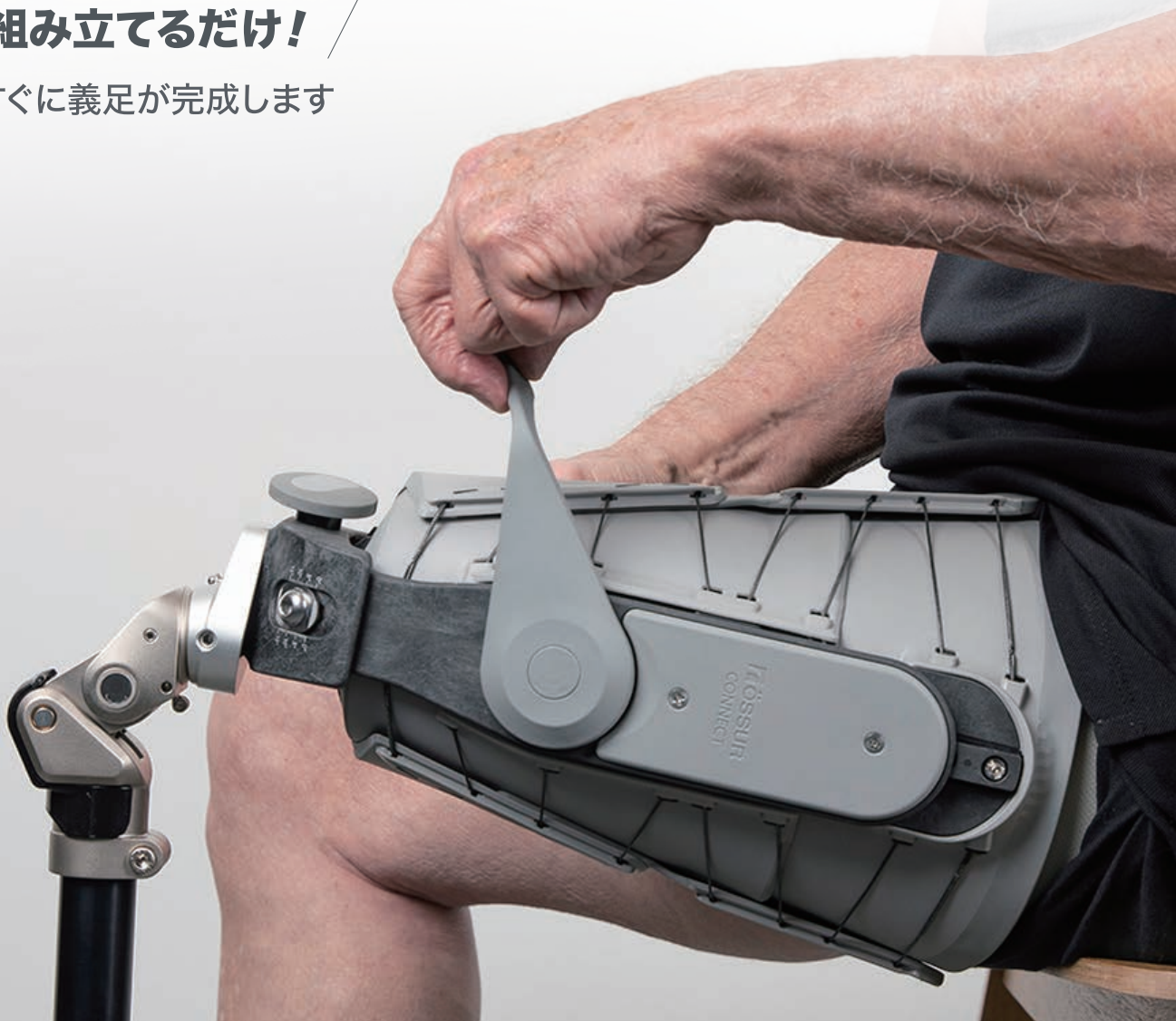

Connect TFとは

Connect TFは、オズール社が提供する低活動者向けの大腿義足用既製品ソケットです。

容積の調整ができる構造により、浮腫のある状態でも装着でき、義足の適応評価やリハビリテーションを早期に開始することができます。

パシフィックサプライでは、2023年10月よりConnect TFの有償レンタルサービスを開始し、これまでに70例を超える使用実績があります(2026年5月現在)。いずれのケースにおいても、義足リハビリテーションに有効であったと高く評価いただいています。



医療現場・義肢装具士のメリット

● 確実な義足適応評価・リハビリテーション計画の実現

浮腫がある段階から装着・周径調整が可能のため、早期の適応評価と円滑な立位・歩行訓練を実現します。

● ソケット製作コスト削減

訓練用大腿義足のソケットを早期に提供できるため、ソケット製作のトータルコストを削減できます。

● 義肢装具士の経験値に依存しない

ソケット調整を数値で管理でき、ソケット適合の標準化ができます。

● 臨床現場での義足調整の負担を軽減

専用のトルクレンチがあれば、短時間で何度でもソケットの調整が可能になります。

● 仮義足としても使用可能

リハビリテーション初期から一貫して同じソケットを使用できるため、ソケット変更への適応が難しいことが予測される患者にも柔軟に対応できます。



いただいた感想

すぐに立位・歩行の評価ができるので、確実な義足適応評価が行えた



早期立位・早期リハにより患者さんの義足へのモチベーションが向上した



リハビリが早くなるので、膝継手や足部の選定に時間をかけることができた



有償レンタルサービス内容

有償レンタルサービスは以下のセットをお届けします(①と②は別々に届く可能性があります)。

①Connect TF基本キット

②義足パッケージ(大腿用ロッキングライナー、OFM1、バランスフットS、構造パーツセット)

弊社の通常デモ機の貸出期間は2週間ですが、Connect TFのパッケージで貸し出す場合は
最長2ヶ月までご利用いただけます!(Connect TF貸出期間と同期間)

① Connect TF基本キット



●Connect TF本体 (Lサイズ・ショート・右)

基本キットとして上記設定の本体が入っています。

Mサイズや左義足で使用される場合は、同梱されているオプションパーツをご利用ください(義肢装具士様に付け替えをお願いいたします)。

●オプションパーツ一式

クラッチピン/ディタルエンド(Mサイズ用)/ハンドル(左)/エレベーションキット(最小断端長18cm対応用)/トルクレンチ/4穴メスピラミッド20・10・10オフセットアダプタ左右/マニュアル・工具類

② 義足パッケージ



●OFM1 (膝継手) の特徴

「固定」「遊動」モードの切り替え可能なので「固定」ではじめ、義足への荷重に慣れたら、「遊動」へ切り替え。スムーズな歩行習得をアシストします。


●バランスフットS (足部) の特徴

幅広な前足部により、安定性を増し、安心して歩行できる足部です。初めて義足を使用される方に、自信を持ってお勧めいただけます。

● レンタル費用:23,000円(税抜)/2ヶ月

※初回の2ヶ月はレンタル費無料


Connect TF を導入した義足製作イメージ

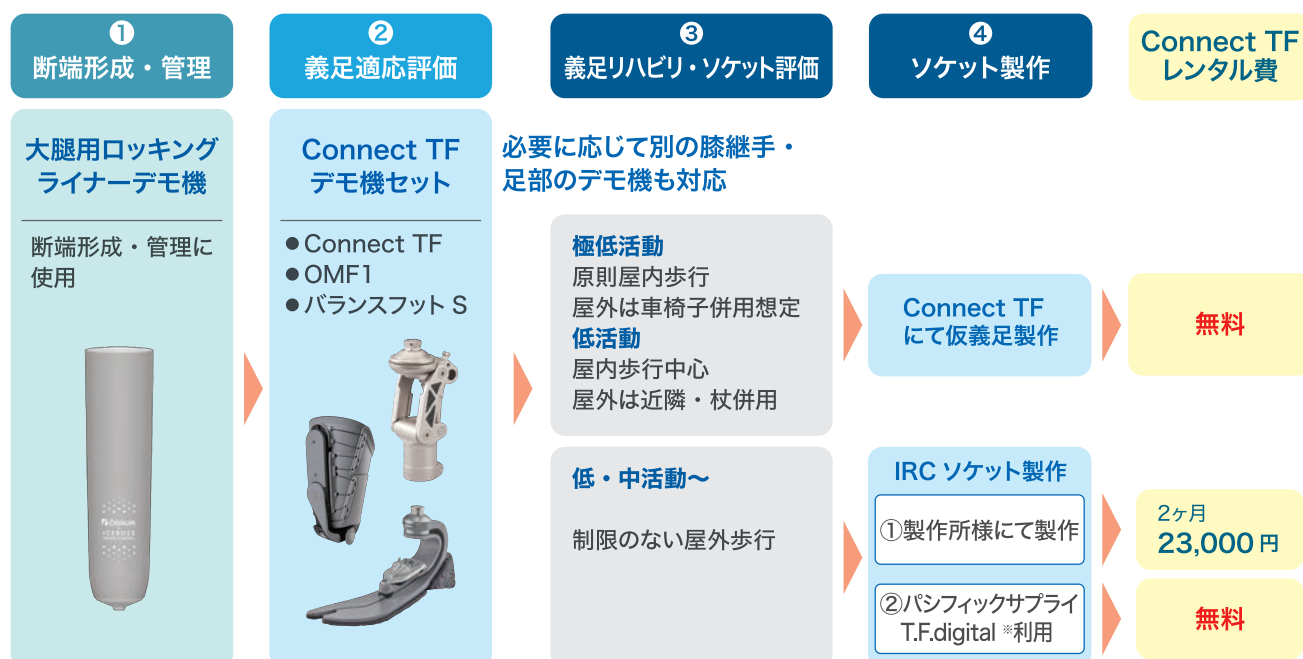

※T.F.digital は、IRC ソケットの製作をサポートするサービスです。標準で採型・採寸日から5日間でソケットをお届けします(北海道、東北、沖縄は+1日)

お申込みの流れ


初めて お申込みされる場合

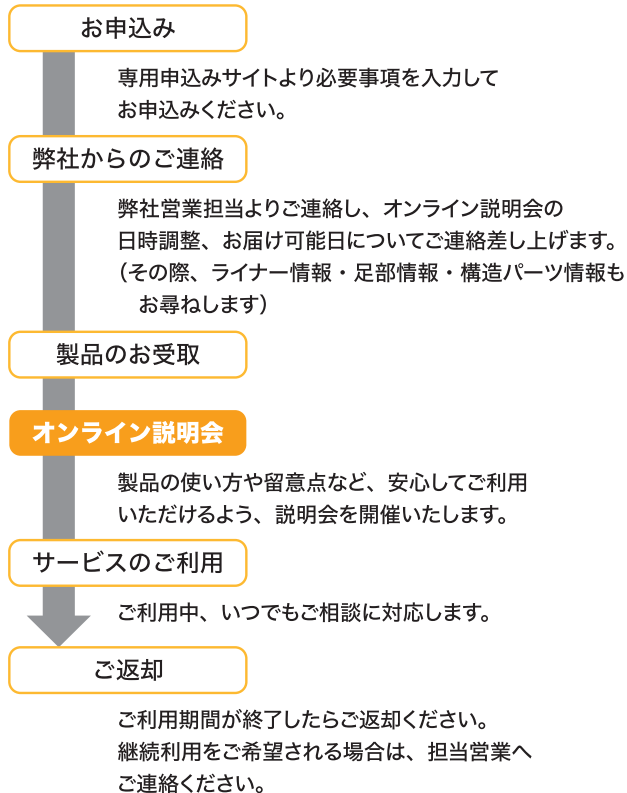

初めてお申込み



2回目以降 お申込みされる場合

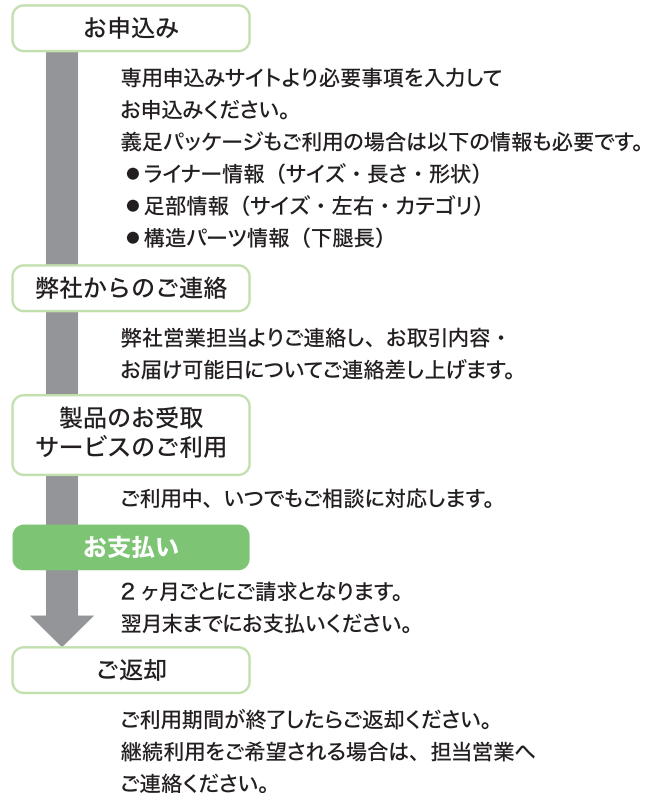

2回目以降のお申込み



●オンライン説明会について

初めてご利用になる製作所さま向けに、Connect TF を新規切断者の義足適応・義足リハビリテーションに使用される場合の工夫や注意点を説明いたします。患者様、義肢装具士に、安心して、有効にご使用いただくためにご受講をお願いしています。

●Kawamura アカデミー

Kawamura アカデミー「オズールカレッジ」にお申込みいただくと Connect TF の関連コンテンツをご視聴いただけます。動画ですので、工程を繰り返しご確認くださいことができます。

Kawamura アカデミー 詳細はこちら ▶



k パシフィックサプライ株式会社

<https://www.p-supply.co.jp>

パシフィックサプライ

検索

●本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010

●東京本社 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016

●札幌営業所 〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F

TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805

●東京営業所 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016

●大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015

●福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12

TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444