

オズール クオリティレポート

パシフィックサプライ株式会社 vol.13

2017年12月

いつもオズール製品をご愛用くださりまして誠にありがとうございます。
 オズール製品をお客さまに安心して長くお使いいただきたく、オズール クオリティレポートを発行いたします。
 実際の製品の破損事例や安心・安全につながる技術的な情報を皆さまへお届けします。
 皆さまと共に、エンドユーザーさまの3ライフ（生命・生活・人生）に寄り添い、製品の品質向上へ努めてまいります。

フレックスフットのヒールウェッジについて

フレックスフットには、ヒールウェッジが付属している製品があります。
 フレックスフットのカテゴリー（モジュールの硬さ）は使用者の体重と衝撃度で選択されますが、微調整を可能にするのが **ヒールウェッジ** です。

ヒールウェッジの機能

ヒールウェッジには、【ヒールモジュールの硬さを適切に調整する】という、大切な役割があります。

仮合せでは、必ず一度はヒールウェッジを仮留めし、歩容を観察してください。

フレックスフットの機能を最大限に活用することができます。

正しいヒールウェッジの使用方法

① スプリットトウの幅に合わせて二分割する

② ウェッジの片面にのみ接着剤を塗布する
 〈標準型〉
 〈ロープロファイル型〉

③ ウェッジを接着する

④ 力をいれず、両ブレードの間にウェッジを設置、接着します
 (両ブレードを手で押し広げてウェッジを奥に挟みこむとボルトや足部の破損に繋がる恐れがありますのでご注意ください)


【仮合せでの使用】

1. 適切な厚みのウェッジを選択する。
2. メインモジュールとヒールモジュールの間に差し込む。
 * このときに無理に押し込んだり、モジュールをたわませて奥まで差しこんだりすると、破損の原因となります。

【完成時の使用】※イラスト参照

* 分割したウェッジが平行になるよう、ご注意ください。

※付属の調節用ウェッジ【黒】【赤黄青】
 (足部によっていずれかのウェッジが付属します)

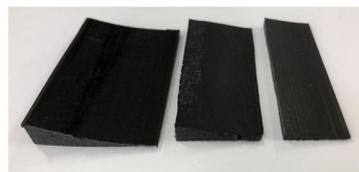

ワンポイントアドバイス!

接着剤は、必ず片面のみに塗布してください。両方に塗布すると、モジュールのたわみを妨げたり、破損や音鳴りの原因となります。

黒いウェッジは下のヒールモジュールに、赤黄青のウェッジはメインモジュールに接着します。



※オズール製品はすべて ISO10328 に基づいた工学試験に合格しています。しかし、他社製品との組合せでは強度・安全性について保証することができません。安全性を考慮し、全ての部品をオズール製品で組立てていただきますようお願い申し上げます。