

オズール クオリティ・レポート

パシフィックサプライ株式会社 Vol.3

2015 年 5 月

いつもオズール製品をご愛用くださりまして誠にありがとうございます。

オズール製品をお客さまに安心して長くお使いいただきたく、オズール クオリティ・レポートを発行いたします。実際の製品の破損事例をピックアップし、オズール社テクニカルマネジャーからのアドバイスと共に皆さまへ月に 1 度お届けします。

皆さまと共に、エンドユーザーさまの 3 ライフ（生命・生活・人生）に寄り添い、製品の品質向上へ努めてまいります。

ICEROSS ライナー（TF/TT）

ご使用状況

使用期間：5 ヶ月

ご使用者：80 代、低活動、62kg

破損内容：使用 5 ヶ月でシリコンに亀裂発生



考えられる原因

ライナーを取り外した際に裏返しにしたまま放置されていたため
(ライナーを裏返しにすると、ライナーのシリコンに引っ張られる力がかかります)

ライナーのお手入れについて

- ・ライナーを使用した後は、ライナーを無香料で弱酸性（ph5.5 程度）の石鹸または同等品でよく洗い、水やぬるま湯でよくすすいでください。
- ・ライナー外側の布カバーも汗などの老廃物が残り、においの原因となりますので、内部の表面と同様に石鹸できれいに洗います。
- ・洗った後は、裏返しにしないで、元のライナーの形状のまま自然に乾燥させてください。



アルカリ剤は使用しないでください。アルカリ剤を使うと、ライナー内部のシリコンオイルの抜けが早まり、製品の劣化につながります。

ワンポイントアドバイス！

装着するときに裏返す手間を省くために、裏返しただけで保管される場合があります。このやり方は早期の破損につながる誤った取り扱いであることをご説明することが必要です。アイスロスを短くカットすることで、裏返しやすくなる場合があります。カットするときはカーブマスターをご使用ください。



スーパー
HIROSHI