

オズール クオリティ・レポート

パシフィックサプライ株式会社 Vol.5

いつもオズール製品をご愛用くださりまして誠にありがとうございます。

オズール製品をお客さまに安心して長くお使いいただきたく、オズール クオリティ・レポートを発行いたします。実際の製品の破損事例をピックアップし、オズール社テクニカルマネージャーからのアドバイスと共に皆さまへお届けします。

皆さまと共に、エンドユーザーさまの３ライフ（生命・生活・人生）に寄り添い、製品の品質向上へ努めてまいります。


オズール製品を安全に、長くお使いいただくために

【足部】ピラミッド部の破損原因

互換性のないピラミッドの組み合わせ

足部を含めてオズール製品はすべて ISO の強度試験に合格しています。この強度試験はオズール製品の組合せにて試験していますので、他社製品との組合せの場合、残念ながら強度を保証することができません。

他社製のアダプタと組合せた場合、ピラミッドのドーム部分との接触部にわずかな隙間ができ（以下の図をご参照ください）義足を装着した時にゆりみやガタつきなどの不必要な動きを発生させ、最終的にピラミッドが破損したケースもございます。安全面を考慮いただき、必ずオズール社パーツとの組合せにてお使いください。

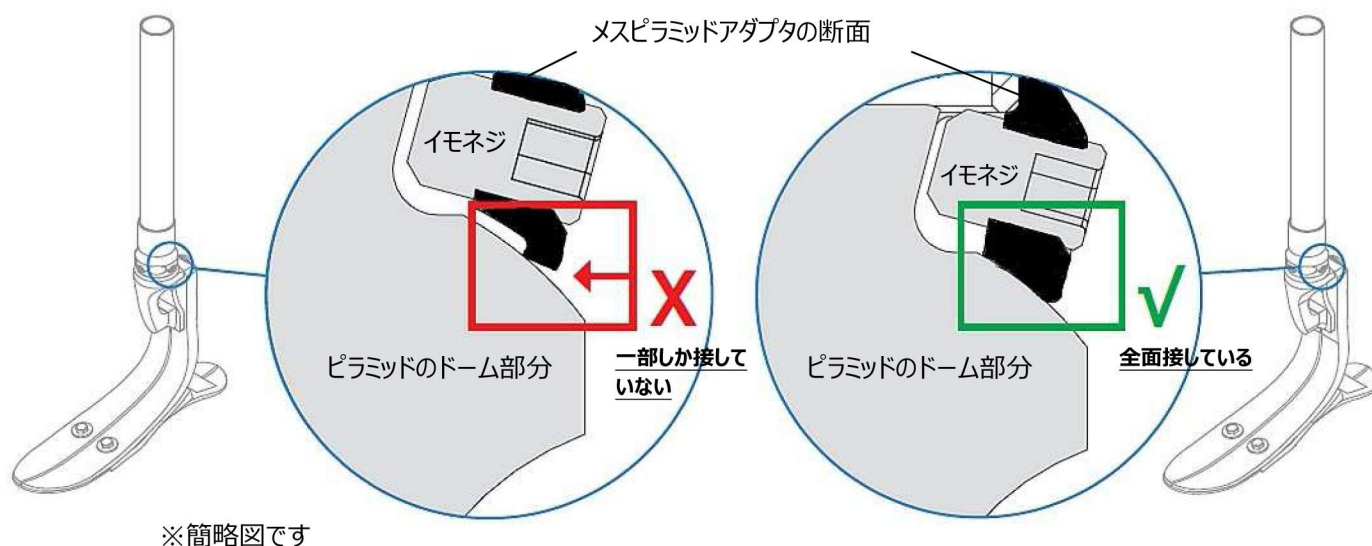

オズール社にもさまざまな種類のパーツがございますので、
ご検討ください。
オズール社製品をこれからもどうぞよろしくお願いします！



たかしくん