

オズール クオリティ・レポート

パシフィックサプライ株式会社 Vol.8

2016 年 10 月

いつもオズール製品をご愛用くださりまして誠にありがとうございます。
オズール製品をお客さまに安心して長くお使いいただきたく、オズール クオリティ・レポートを発行いたします。
実際の製品の破損事例をピックアップし、オズール社テクニカルマネジャーからのアドバイスと共に皆さまへお届けします。
皆さまと共に、エンドユーザーさまの3ライフ（生命・生活・人生）に寄り添い、製品の品質向上へ努めてまいります。

ICEROSS デルモロックライナー 内側シリコン部の凹み

ご使用状況

使用期間：3.2 ヶ月

ご使用者：53 歳、60kg



考えられる原因

このような集中した凹みの原因としては、該当部分に高い圧がかかっていたと考えられます。
このケースでは、ライナーの向きを日々変えて装着したために、高い圧力がかかる箇所が環状となり、写真のような凹みになったと推測されます。

技術的アドバイス～このような凹みが確認された場合の確認事項～

- ・膝蓋骨や脛骨の前方／遠位が突出していないか
- ・サイズが緩くなっていないか
- ・高い圧がかかっている箇所はないか



スーパー
HIROSHI

ワンポイントアドバイス

シリコンの素材は圧に合わせて調整する特性があるため、高い圧がかかると凹みにつながります。必ずしも製品不良ではありません。
モデル修正、仮合わせ時に圧力が均等に近づくよう、盛り修正や分圧パッドの使用などをお勧めします。