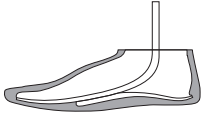
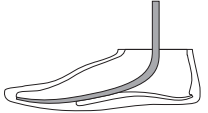
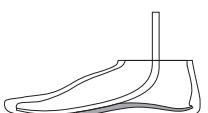
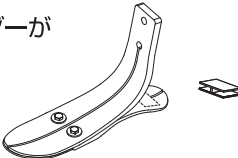
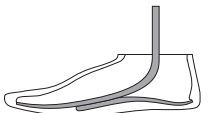
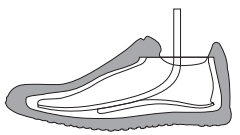
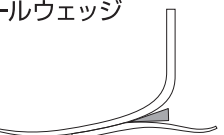


オズール足部音鳴りの考えられる原因

音鳴りの場所	原因	対処
フットカバーと カーボンモジュールの間 	カーボンモジュールがフットカバーからはがれている（イレーション）	フットカバーを取り換えてみる
	スペクトラソックスに穴が開いており、カーボンとフットカバーの間で擦れている	スペクトラソックスを取り換える
	異物が入っている	異物を取り除く
フットモジュールと スペクトラソックスの間 	スペクトラソックスが適切に装着されていないため、スプリットウの間でこすれ合っている	スペクトラソックスを適切に装着する （縫い目がフットモジュールの上部にくるようにスプリット部に装着する）
ヒールモジュール 	ヒールディバイダーが外れている 	ヒールディバイダーをボンドで付け直す
フット/ヒールモジュール 	フット/ヒールモジュールに亀裂が入っている （カテゴリーが適切でない可能性あり）	●ユーザーの体重、仕事、日常生活を調べる ●必要に応じカテゴリーをあげるか、活動度の高い足部に変えるよう勧める
フットカバー 	フットカバーに亀裂がはいっている	フットカバーを取り換える
フットカバーと靴 	フットカバーと靴が擦れている	フットカバーの上に靴下を装着する
	靴が大きすぎる	適切な靴のサイズに変える
ヒールウェッジ 	ウェッジを取り付けて中央部を切ったままで、カーボンのスプリットの間にあわせて、ウェッジ片を切り取っていないためウェッジ同士で擦れている	スプリットの間のヒールウェッジを切り、取り除く
	フットモジュールとヒールモジュールの間を無理やり広げてヒールウェッジを入れている	適切な部分にヒールウェッジを付け直す
フォームカバー/ フットカバーアタッチメント	フォームカバーの長さが不十分のため、フットカバーとの間で当たる/離れるを繰り返している（大腿義足）	フォームカバーを長くするなど
ピラミッドとクランプの間	●異物が両者の間でかんでおり、ガタがある ●違うメーカーの部品と組み合わせており、規格が異なるため、フィットしていない ●ピラミッドが腐食してしまっている ●ロックタイドをしていないため、ネジが緩んでいる	●異物を取り除く ●オズール製品で組み合わせる ●製品を交換する ●ロックタイドを塗布する