

姿勢保持装置

ささねっこ

取扱説明書

スタンダードタイプ ・ ヘッドバータイプ



このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使用方法と、ご使用上の注意点を記載しております。お読みになったあとも、製品に添付して、使用方法がわからないときにご利用下さい。また、製品をほかの方が使用される際には、必ずこの取扱説明書を添付してお渡し下さいますようお願い申し上げます。

k Pacific Supply

- ささえっこを使用するときは、必ず介助者がそばにいて下さい。
 - ・ お子さまは、どのような動作を取るかわかりません。
 - ・ 使用時、複数のお子さまが居るような状況では、他のお子さまのいたずらによる事故の発生が、考えられます。

- 本書の安全に関する指示事項には、必ず従って下さい。
- 介助者は、使用方法や取扱注意事項が理解できるまで、使用しないで下さい。
- 初めての装着には、必ずリハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい。
 - ・ クランプの固定が緩いと使用中にテーブルから外れます。
 - ・ 無理な姿勢で使用すると、体幹が安定しません。

- この製品は、すべてのお子さまの骨盤を安定させることを、保証するものではありませんので、あらかじめご了承下さい。

もくじ

1. 安全にご使用いただくために	P.	2
2. 各部の名称	P.	4
3. 仕様	P.	5
4. 調整機能	P.	5
5. ご使用前の点検・準備	P.	5
6. テーブルへの取付方法	P.	6
7. 本体の高さ調整方法	P.	7
8. あご受けの高さ調整方法（取外方法）	P.	8
9. 前傾角度調整方法	P.	9
10. 本体周径調整方法	P.	9
11. お子さまへの装着方法	P.	10
12. あご受け・ヘッドバーと、カバーの外し方	P.	12
13. 運搬方法	P.	13
14. お手入れ方法	P.	13
15. 保管と廃棄方法	P.	13
16. 保証規定	P.	14

1. 安全にご使用いただくために

警告



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- (1) 本書の安全に関する指示事項には必ず従って下さい。
- (2) 介助者は、使用方法や取扱注意事項等が理解できるまで、ご使用にならないで下さい。
- (3) 使用前には必ず保守点検（P5 ご使用前の点検・準備）を行って下さい。また、保守点検を行っていない場合は使用しないで下さい。
- (4) この製品は単体で使用できません。4本脚などのしっかりとしたテーブルに固定して下さい。また、必ずイスを使って使用して下さい。
- (5) 車いす・電動車いす・歩行器などの、テーブルに取付けて使用しないで下さい。振動により外れてけがをすることがあります。
- (6) 必ず安定したイスをお使い下さい、安定しないイスを使うと転倒して、けがをすることがあります。
- (7) 装置を体に装着したまま移動しないで下さい。装着したまま移動するとけがをすることがあります。
- (8) テーブルに装置を取付たあと、ご使用前にテーブルごと転倒の危険がないか確認して下さい。
- (9) 装置を持ってテーブルを持ち上げないで下さい。テーブルが落下して破損したりケガをする可能性があります。
- (10) お子さまが立つときは、必ず装置から外して立ち上がらせて下さい。装置を持って立ち上がらないで下さい。ぐらついて転倒する可能性があります。
- (11) 立つ姿勢を保つ装置として使用しないで下さい。転倒する可能性があります。
- (12) 身体を乗り出すようなことはさせないで下さい。テーブルごと転倒する可能性があります。
- (13) 本体を調整（高さ・あごうけ上下高さ、前傾角度、体幹部周径など）する場合は注意しながら行って下さい、指を挟んだりお子さまがケガをすることがあります。
- (14) テーブルの表面にはカバーやクロスがかかっていないことをご確認の上、ご使用下さい。また、テーブル表面は、硬くて平坦なところを選んでおこなって下さい。上記の注意を守らないと、クランプが使用中に外れ落下する可能性があります。
- (15) 分解や改造をしないで下さい。修理が必要となった場合は必ず販売店へ連絡下さい。
- (16) 異常を発見したままで使わないで下さい。そのまま使うと破損してけがをすることがあります。

注意



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- (1) 本製品をテーブルから取り外し床に置く場合は、ヘッドバーをしたにしておかないようにして下さい。床やヘッドバーが破損する恐れがあります。
- (2) 本製品のユーザー最大体重は30kg未満（衣服等を含む）です。30kg以上の体重の方が使用されると、破損する恐れがあります。
- (3) 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置したり、熱器具（ストーブ等）の近くで使用しないで下さい。熱により変色や変形する恐れがあります。
- (4) 使用しない場合は、他のお子さまが使わないように外して保管することを、お勧めします。

重要なお知らせ

本製品を使う上でのご注意と、本取扱説明書の重要なお知らせです。

- (1) 本書は製品と共に常に手元に保管し、必要に応じて繰り返し読んで下さい。
- (2) 製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。不明な事柄については販売店まで問い合わせして下さい。
- (3) 本製品は改良のため予告なしに、仕様を変更する場合があります。
- (4) 本書に規定した方法以外での使用方法に対しては、安全性は保証できません。
- (5) 本書中の図や写真は一部を省略したり抽象化した表現になっているものがあります。
- (6) 本書を紛失または損傷した場合は速やかに販売店までご連絡下さい。
- (7) 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに気付いた場合は販売店までご連絡下さい。
- (8) 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。

2. 各部の名称

本製品は、下記の部品で基本構成されています。

スタンダードタイプ



ヘッドバータイプ



その他付属品：L型レンチ×1本、キャップ×2個、取扱説明書×1部

3. 仕様

本製品の仕様は下記の通りです。


- カラー：ブルー、オレンジ、ピンク、ブラック
- 材質：本体 ポリエチレン 内張り チップスポンジ
- 重量：約2.2kg（あご受けヘッドバー付きタイプ）
- クランプ：テーブル天板の厚みが20～70mmで、奥行き50mm以上あれば取付可能
- 前傾角度調整：8～18° ・高さ調整範囲：78mm（13mm間隔×6段階）
- あご受け高さ調整範囲：80mm（無段階）
- 対象年齢：3～10歳
- 使用者最大体重：30kg以下
- 胸囲：50～65cm

4. 調整機能

本製品には以下の調整機能があります。

1. クランプ機能
テーブルに本体を取付ることができます。……………テーブルへの取付方法（P. 6）参照
2. 本体高さ調整
身長に合わせて本体の高さを調整することができます。
……………本体の高さ調整方法（P. 7）参照
3. あご受け高さ調整
あごの位置に合わせて、あご受けの高さを調整することができます。
……………あご受けの高さ調整方法（P. 8）参照
4. 前傾角度調整
姿勢に合わせて、前傾角度を調整することができます。
……………前傾角度調整方法（P. 9）参照
5. 本体周径調整
体型に合わせて、本体の周径を調整することができます。
……………本体周径調整方法（P. 9）参照

5. ご使用前の点検・準備

警告  本製品に破損や異常がないか、ご使用前に必ず各部を点検して下さい。異常状態のまま、絶対に使用しないで下さい。

[ご使用前に必ず次の点検を行って下さい。]

	チェック
(1) 各部品がゆるみやガタツキがなく取付られているか……………	<input type="checkbox"/>
(3) 各ベルト類に損傷や裂け等はないか……………	<input type="checkbox"/>
(4) 縫製部分のほつれはないか……………	<input type="checkbox"/>
(5) マジックテープ®の取付不良はないか……………	<input type="checkbox"/>
(6) 各部にひび割れや欠け、変形等はないか……………	<input type="checkbox"/>
(7) 各部のネジやカシメ部分に、ゆるみやガタツキはないか……………	<input type="checkbox"/>
(8) その他の異常はないか……………	<input type="checkbox"/>
(9) ヘッドバーが折れていないか……………	<input type="checkbox"/>

万一破損や異常を発生した場合はそのまま使用せず、必ず販売店にご連絡下さい。
異常状態のまま、絶対に使用しないで下さい。

6. テーブルへの取付方法





警告 4本脚などの安定性の良いテーブルに取付けて下さい。また、表面に凹凸のないテーブルを使用して下さい。テーブルごと転倒したり、クランプが外れて落下することがあります。

*テーブルの天板の厚みが20mmから70mmの間で、奥行きが50mm以上あるテーブルならクランプを使って簡単に取付けることができます。



警告 テーブルの表面にはカバーやクロスがかかっていないことをご確認の上、ご使用下さい。上記の注意を守らないと、クランプが使用中に外れる恐れがあります。

- (1) クランプ調整ハンドルを下図のように回してゆるめ、テーブルの厚みより少し広がるまで広げて下さい。
- (2) テーブルの端がクランプ奥に当たるまで差し込んで下さい。

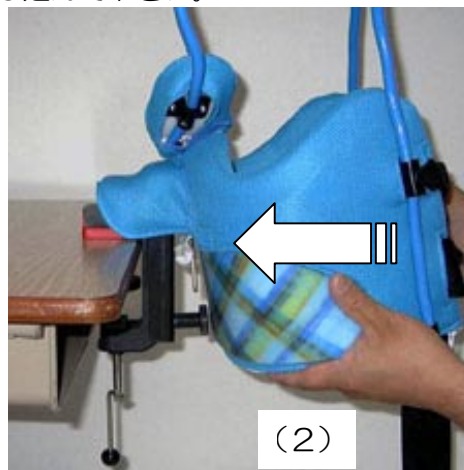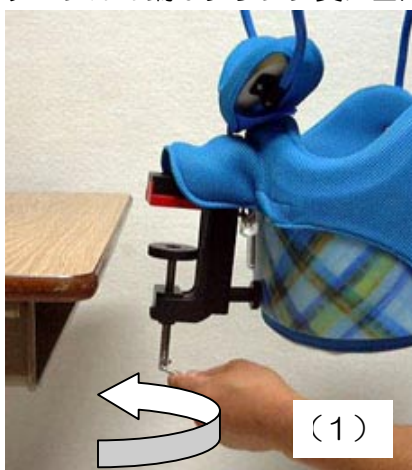


- (3) クランプ調整ハンドルを下図の方向に回し、テーブルにしっかりクランプが、噛み合うように締め付けます。工具などで締め付けしないで下さい、クランプレバーが壊れます。
- (4) クランプの赤いゴムの部分と、テーブル表面とに隙間がないか、よく確認して下さい。




注意 しっかり締め付けているか確認して下さい。
締め付けが緩いと、使用中にクランプがはずれる恐れがあります。


7. 本体の高さ調整方法

警告  本体の取付ネジはしっかり締めこんで下さい。締め込みが緩いとガタツキがでて本体が落下しケガをすることがあります。


- (1) 図の様に本体を持ち上げ、テーブルに裏返しにします。
- (2) 本体をしっかり持ったままで、付属の六角レンチで本体高さ調整ネジを緩め、クランプ部分と本体を外します。

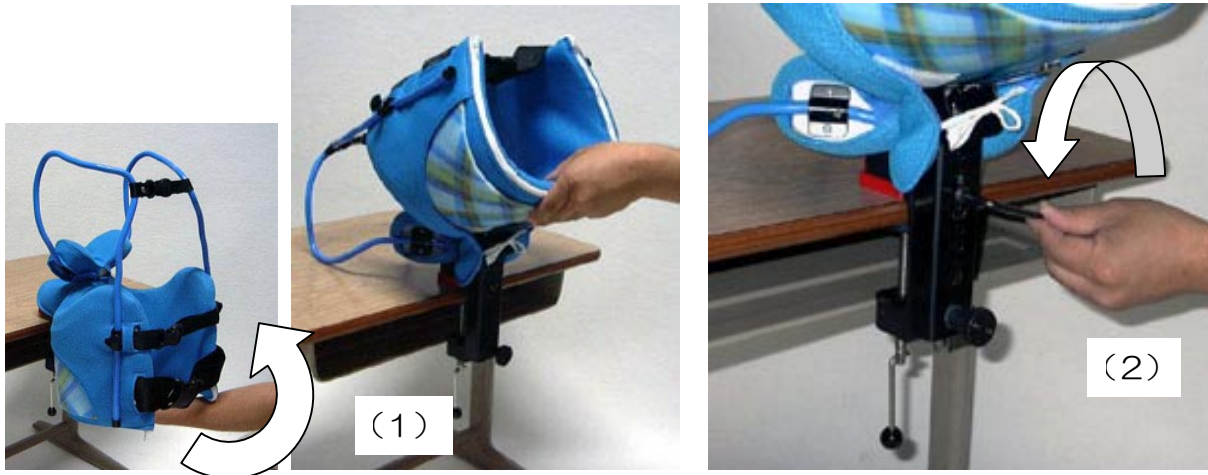

- (3) 次に、適切な高さに合わせ、本体高さ調整ネジを付属の六角レンチで締め付けます。高さ調整範囲は、78mm（13mmピッチ×6段階）です。

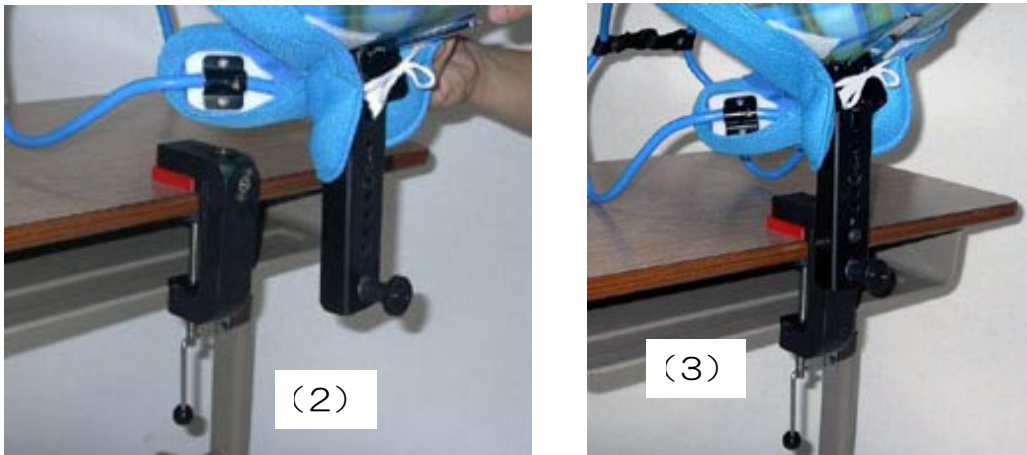

↑
78
mm
調整
可能
↓

警告  初めての装着の際には、必ずリハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい。無理な姿勢で使うと体幹が安定せず、体に負担がかかります。

8. あご受けの高さ調整方法（取り外し方法）

ヘッドバータイプのみ





あご受け高さ調整ネジはしっかり締めして下さい。締め付けが緩いと急に落下してケガをすることがあります。




お子さまを乗せたまま調整する場合は、あご受けが急に上下しないように、お子さまの頭部をしっかり支えながら行なって下さい。支えずに調整すると急に動いてケガをすることがあります。

- (1) 図の様にカバーを開き、あご受け高さ調整ネジを付属の六角レンチで緩めて下さい
- (2) サイドにあるヘッドバー固定ハンドルを、緩めて下さい。

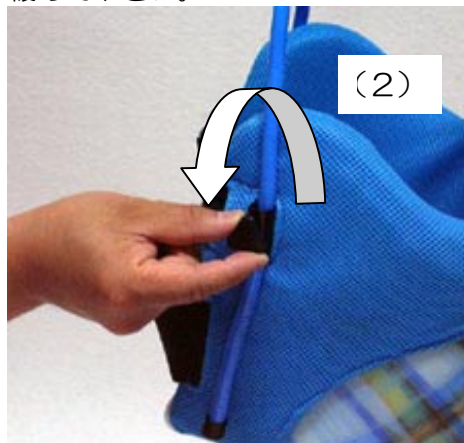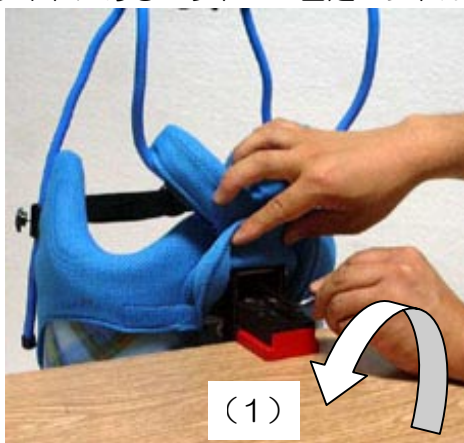

- (3) 適正な高さに調整して下さい
- (4) あご受け高さ調整ネジを付属の六角レンチでしっかり締め付け、ヘッドバー固定ハンドルを締め付けて下さい。

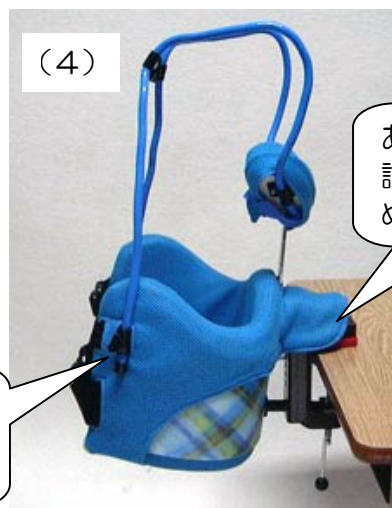


立位で使用しないで下さい。無理な強度がかかると、あご受けが急に落下してケガをすることがあります。




初めての装着の際には、必ずリハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい、無理な姿勢で使うと体幹が安定せず、大変危険です。

9. 前傾角度調整方法


警告  初めての装着の際には、必ずリハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい、無理な姿勢で使うと体幹が安定せず、大変危険です。


- (1) 本体を少し持ち上げ、前傾角度をつけます。
- (2) 前傾角度調整ネジを回して本体を傾斜させ、適切な角度に調整します。
- (3) 本体を戻します。

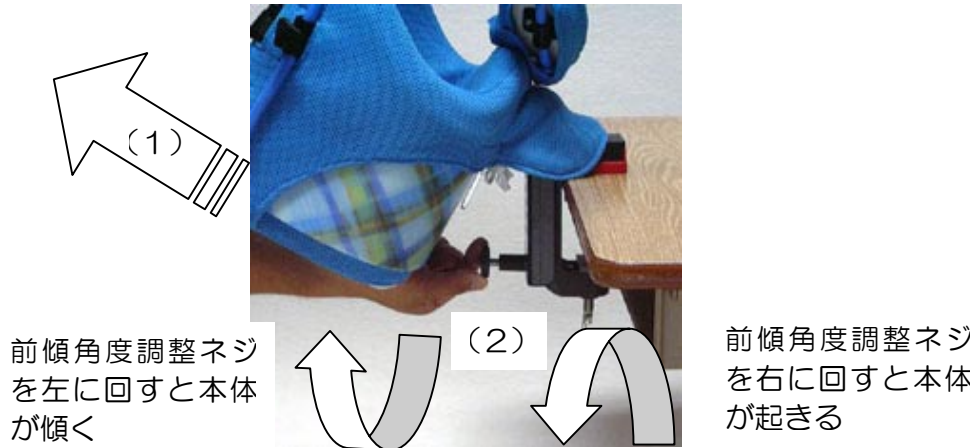


10. 本体周径調整方法

- (1) 固定ベルト（2本）の長さを、体幹に合わせて調整します。
- (2) ベルトが長い場合は短くして、短い場合は緩めて伸ばして下さい。

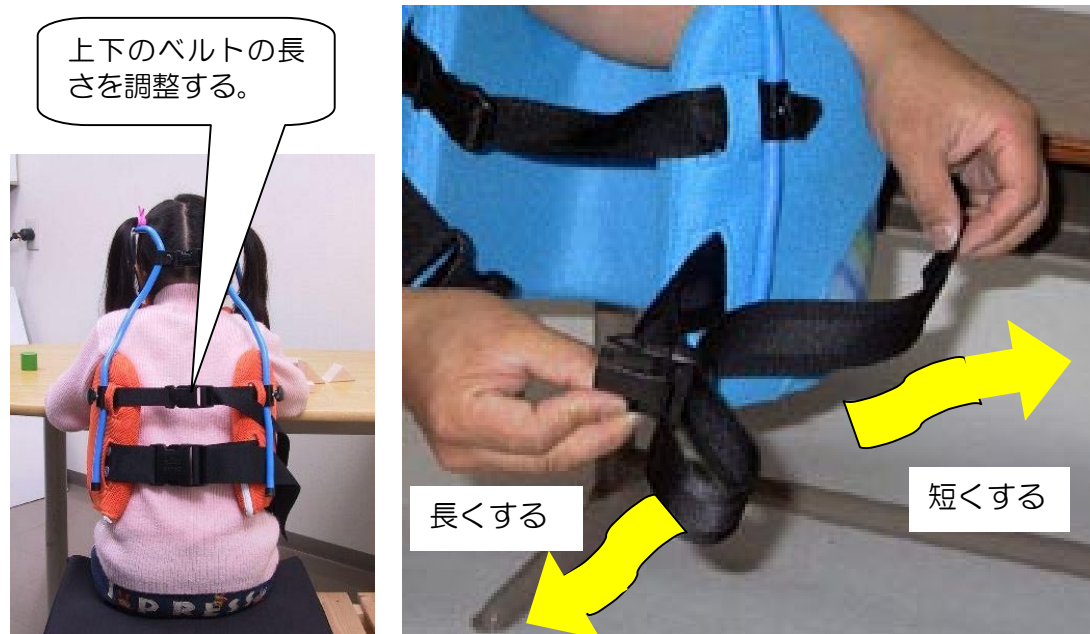

警告  固定ベルトは締めすぎるとお子さまが、呼吸しにくくなり大変危険です。必ずリハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい。

警告  ベルトの調整については、リハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい、無理な姿勢で使うと体幹が安定せず、大変危険です。

11. お子さまへの装着方法

あご受けヘッドバータイプでの装着方法です。



体幹を本体に装着する前に装置とテーブル、及び、装置と体幹のそれぞれの位置関係を整えて下さい。

テーブルといすの間が体に対して狭すぎたり、装置の取付位置が低すぎると、頭部や体幹が安定せず大変危険です。また、テーブルといすの間が広すぎたり装置の取付が高すぎると、のどや、腋の下を強く圧迫することがあり大変危険です。

初めての装着の際には、必ずリハビリテーションスタッフの指導を受けて下さい。

骨盤が不安定な場合、また、下肢に緊張や不随意運動が生じる場合には座面を整えた上でお使い下さい。ささえっこは、すべてのお子さまに骨盤の安定をもたらすわけではありません。

① 座面の高さ調整をおこないます。

右図のように、お子さまの脊柱を伸展させ、骨盤を起こして座位をとったとき、お子さまの剣状突起（みぞおち付近）がテーブルの表面付近になるように、イスの高さを設定して下さい。



② テーブルに取付た本品の本体にお子さまの体幹を装着します。

このとき、背中が丸くならないように、背筋を伸ばして装着するのがコツです。背中が丸くなる場合には、背面にタオルなどを入れて、背筋を伸ばすように工夫して下さい。

(1) 上肢をヘッドバーに通す



(2) 体幹を前に移動し装着



(3) 背筋が伸びているのを確認




固定ベルト2本で体幹を固定して下さい。

* 本体のみの場合は、上肢を持ち上げながら体幹に装着して下さい。



本品はあごや脇の下で体重を支えるものではありません。装着後は、のどや腋の下に圧迫がないことを確認したうえでご使用下さい。

- ③ ヘッドバーの形状を頭に適合させます。
ヘッドバーは手で自由に曲げることができます、お子さまの頭の形状に合わせて調整して下さい。(以下に例を示します)

注意  ヘッドバーは、ヘッドバーと頭の接触によって安定を促すものであり、頭を固定するものではありません。

<調整する前>



頭とヘッドバーの間に、指1本分くらいの隙間をあける

<調整した後>



頭が大きく横に向かない幅に調整する

視界を妨げない位置にする


頭が大きく横に傾かない幅にする

- *横を向いても目に当たらない位置にする
- *頭が後方に倒れない位置にする





頭が脱落しない様にバックルベルトを止める

12. あご受け・ヘッドバーと、カバーの外し方

警告  キャップを外しておく場合は、お子さまの手の届かない場所に保管して下さい。又、紛失しないように充分注意して下さい。小さいお子さまが飲み込むと大変危険です。

あご受け・ヘッドバーの外し方

- (1) ヘッドバー先端のキャップを外します。
- (2) あご受け高さ調整ネジを、付属の六角レンチで緩めます。
- (3) 両サイドのヘッドバー固定ハンドルを緩め、あご受け・ヘッドバーを外します。

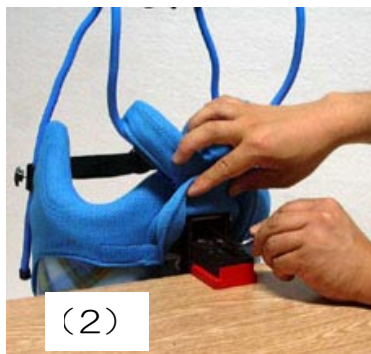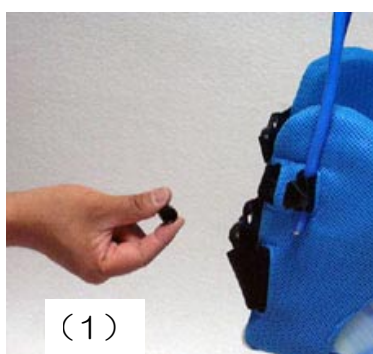



本体カバーの外し方

- (1) 本体底のファスナーを開きます
- (2) 内部のクッションを取り出します
- (3) 紐を緩め、ベルトを抜いて、カバーを外します



あご受けカバーの外し方

- (1) あご受けの底の、マジックテープを外します
- (2) あご受けカバーを外します。

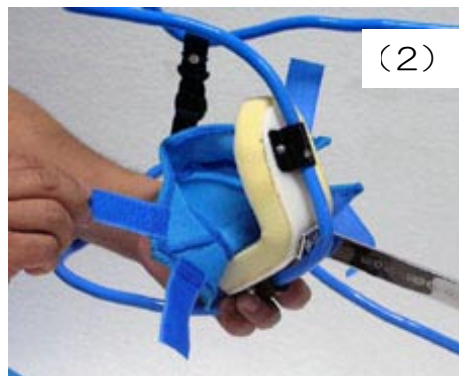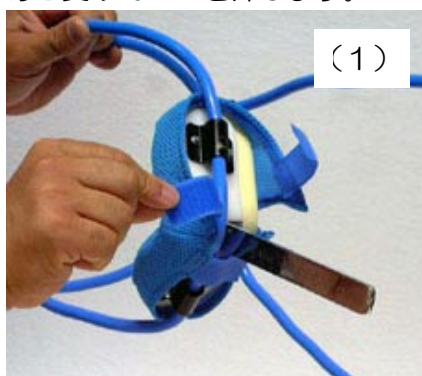

再び、取付る場合は逆の手順で行って下さい。

13. 運搬方法



注意

運搬中は、クランプが大きく揺れますので注意して移動して下さい。
クランプと本体の間に指を挟むことがあります。又そばにいる人に当たると危険です。

「ささえっこ」は、軽量で持ち運び簡単な姿勢保持装置です。
箱に入れて安全に運搬していただくことで、お子さまの活動範囲が拡大します。

注意：納品時の箱を廃棄しないで下さい。保管時に利用します。

- ① 保管・運搬は、充分注意の上行って下さい。
- ② 運搬時に投げたり、落としたりしないで下さい。
- ③ 自動車のトランクなどの高温になる場所に長時間保管しないで下さい。
- ④ 箱が破損した場合は、同等の大きさの箱をご用意いただくか、お買い上げ先の販売店までご連絡下さい。

14. お手入れ方法

日常は下記のようにお手入れを行い、大切にご使用下さい。
誤ったお手入れをしますと故障の原因になります。異常を発見された場合はそのまま使用せず、必ず販売店に修理交換をお申し出下さい。

1. 金属・プラスチック部分（クランプ・本体・あご受け・ヘッドバー）

- ・ 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で、乾拭きして下さい。
- ・ 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤でふき取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないようにふき取った後、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ・ シンナーやベンジン、アルコール系の溶剤は、絶対に使用しないで下さい。（本体をいためます）

2. カバー

- ・ 本体のカバーと、あご受けカバーは、洗濯できます。
- ・ 本体カバーは、必ず内部のクッションを取り出してから、洗濯して下さい。
*クッションは、洗濯できませんので、ご注意下さい。
- ・ あご受けカバーのマジックテープは、張地に絡みやすいので、マジックテープを固定して洗濯して下さい。
- ・ シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないで下さい。（生地をいためます）
- ・ カバーの素材は、ポリエステル100%です。

洗濯方法



- *手洗いのみです（水温上限30℃、中性洗剤が使えます）、洗濯機では洗えません
- *塩素系漂白剤による漂白は、出来ません
- *アイロンは、使えません
- *ドライクリーニングは、できません
- *脱水機、手絞りは、しないで下さい
- *日陰に干して、乾かして下さい。

15. 保管と廃棄方法

水分や直射日光等をさけ、日陰で保管して下さい。
廃棄する場合は、各自治体の指示にしたがい廃棄処分して下さい。

16. 保証規程

I. 保証の範囲

- 保証期間中に品質の不完全に基づく故障を生じた場合は、この保証書により無料で修理致します。
- 保証期間はお買い上げ後1年間です。
- 但し、次の場合は保証期間中でも有料になります。
 - 取り扱い過誤による故障
 - 製品に改造を加えた場合の故障
 - 天災、地震等による故障
 - 消耗部品及び各部の劣化による故障・損傷
 - 保証書にお買い上げ店名の記載や、捺印のない場合
 - 保証書のご提示がない場合
- 以上の保証は日本国内においてのみ有効です。
- この保証によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

II. サービスのご用命

保証期間中、万一故障が生じた場合は、お買い上げ販売店へ保証書を添えてお申し出下さい。

III. ご注意

保証書の再発行は致しませんので大切に保管して下さい。(取扱説明書の再発行は致します。)

品質保証書							
本製品については上記記載の「保証規定」により正常な使用状態において、故障が生じた場合に限りお買い上げ日より「1年間」無償で修理致します。							
商品名	ささえっこ（姿勢保持装置）		タイプ				
お客様	ご住所	TEL					
	お名前						
お買い上げ日	平成	年	月	日	保証期間	購入日より	1年
販売店名				印			
住所				電話番号			



パシフィックサプライ株式会社

〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目12番1号
TEL: 072-875-8008 FAX: 072-875-8010

 **パシフィックサプライ株式会社**

不許複製

ささえっこ（姿勢保持装置）取扱説明書
2004年09月 第2版