


ステップレス・イージーフォールドプロ取扱説明書

ステップレス

この度はグルドマン社製ステップレス・イージーフォールドプロをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本取扱説明書は保管して必要に応じて繰り返しお読みください。



表面は滑り止め加工されていますので、使用中に滑りにくく、衝撃を吸収します。

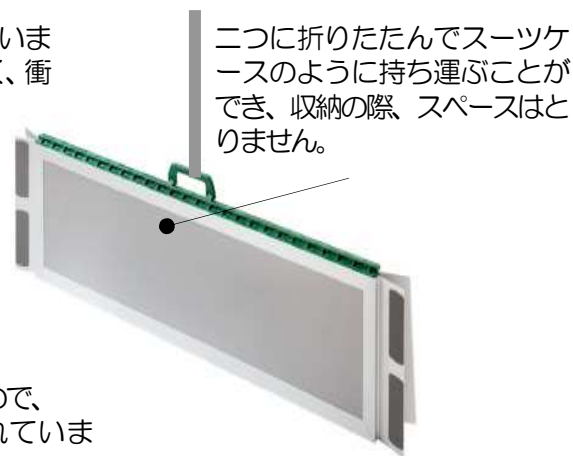

二つに折りたたんでスーツケースのように持ち運ぶことができ、収納の際、スペースはとりません。

アルミニウム製ですので、安定性と強度に優れています。

◎正しい掛けかた◎



エンドラバー

- ① 段差の高さ(最大可能段差以下であること)を確認する。
- ② スロープをかける段が平らであることを確認する。
- ③ エンドラバーをしっかりと奥までかける。
- ④ 「A」が段に当たっていることを確認する。
- ⑤ 設置後、ガタつきがないか確認する。

⚠ 外れないように、しっかりと固定してください。

◎ハンドルを折りたたむことができます◎



- ハンドルが中央にあり、収納の際、省スペースで保管できます。
- 折りたたみ式ハンドル搭載。設置時にしっかりとつかむことができ、運搬や設置が楽に行えます。

⚠ ハンドルを折りたたむ際、指を挟まないようにご注意ください。

製造国 デンマーク 材質 アルミニウム(本体)

品番	品名	開いた時		折畳時		重量 (kg)	耐荷重 (kg)	最大使用角(度)※	最大可能段差 (cm)
		全長×外幅×内幅×全高 (cm)	全高 (cm)	全長×外幅×全高 (cm)	全高 (cm)				
26260101	イージーフォールドプロ 95cm	93×77.6×76×4.4	4.4	93×40.3×8.5	8.5	7.8	350	12	18
26260102	イージーフォールドプロ 120cm	120×77.6×76×4.4	4.4	120×40.3×8.5	8.5	9			24
26260103	イージーフォールドプロ 150cm	150×77.6×76×4.4	4.4	150×40.3×8.5	8.5	11.4			30

(※) 最大使用角度は介助者が車いすを押して使用する場合の角度です。




使用上の注意！

- 事故につながる可能性があるため、スロープの分解は絶対にお止めください。
- 耐荷重量・使用角度を超える使用は非常に危険ですのでお止めください。
- ご使用になる際はエンドラバーをしっかりと段にかけて、安全をご確認の上ご使用ください。
- スロープをかける段が平らであることを確認し、段に対してスロープが直角になるようにご使用ください。
- 表面の滑り止め加工部分で身体を傷付けないように十分に気を付けてご使用ください。
- ご使用前に、ハンドル接合部のかしめにゆるみがないことをご確認ください。
- ご使用になる際は指詰めには十分ご注意ください。
- ご使用の際は当たったり、引っかかったりしないよう、ハンドルを折りたたみください。
- 本製品の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。本書と内容が異なる場合、不明な点は販売店までお問合せください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁、記載漏れ等に気づいた場合は販売店までご連絡ください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証されません。またその際発生した損傷、利害損失に関しては弊社では責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 本書中の図は一部を省略や抽象化した表現により実際の製品とは異なっている場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

お手入れ・廃棄方法

- スロープは腐食しにくいように加工されています。
中性洗剤を布片やスポンジに染み込ませて汚れを拭き取ってください。
- 漂白剤のご使用またはオートクレーブ（加圧滅菌）による洗浄はお止めください。
- スロープのレール部分が汚れた場合は、布片等で汚れを拭き取って乾かしてください。
- 各自治体の指示に従い廃棄処分してください。

最適な長さのスロープをお選び頂くために

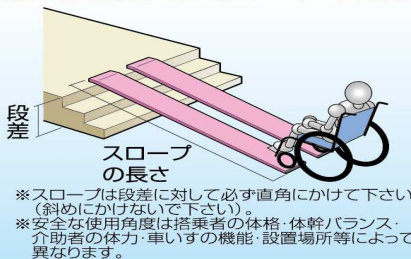

- 一番長い状態で使用する場面を想定してスロープをお選び下さい。
- スロープが長ければ長いほど、勾配が緩やかになります。

介助者が手動車いすを押しながら上る場合
段差:スロープの長さ = 1:5 (勾配約11.5°)を目安に。

(例) 段差が20cmの場合 → 段差20cm × 5 = 100cm (スロープの長さ)



段差	スロープの長さ
20cm	100cm
30cm	150cm
40cm	200cm
50cm	250cm
60cm	300cm

● 輸入・販売元

K. パシフィックサプライ株式会社

本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL 072 (875) 8008
FAX 072 (875) 8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

販売店