


ノルディックスライド

取扱説明書

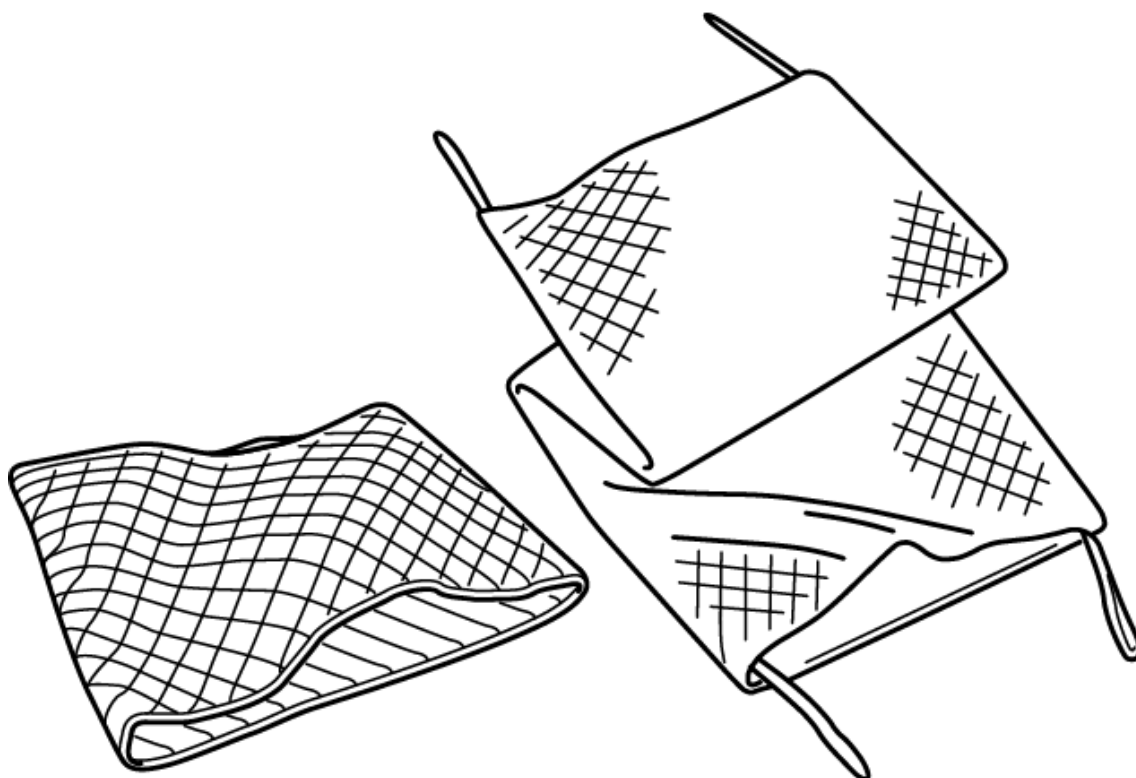

この度は「ノルディックスライド」をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

本製品の機能を活かし、且つ安全にご使用頂く為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂きご理解ください。

また、お読み頂いた後も大切に保管し、必要に応じて繰り返しお読みください。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。

必ずご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認いただきますようお願いいたします。

k パシフィックサプライ株式会社

※ K マークは川村義肢株式会社の登録商標です。

転載複写厳禁

※ 製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

目 次

ご使用上の注意事項	2
仕様	3
特徴	3
滑りの原理と実際の動き	3
敷き込み	4
その他のご使用参考例	5
在宅介護の為のアドバイス	7
洗濯・乾燥	7
廃棄	7
その他	7

ご使用上の注意事項

ご使用になる際には下記の注意事項を必ずお守りください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的破損の発生が想定される内容を示しています。



ベッド上での横移動の場合、滑る方向に介助者が立つか、サイドレールなどのストッパーをご用意ください。



裏と表を間違えないようにしてご使用ください。



ご使用の前に必ず各部を点検してください。



安全に介助する為に使い方は専門家のご指導を受けてください。



用途以外の使用は危険ですから絶対になさらないでください。

仕 様

品番	5148	5149	5147	9763
モデル	ショート	ミディ	ロング	ワイド
外形寸法	全長60×幅72cm	80×72cm	180×72cm	180×90cm
質量	340g	450g	1,020g	1,240g
材質	表布:ポリエステル 内布:ポリアミド特殊加工布 中綿:ポリエステル			
製造国	デンマーク			

特 徴


- ベッドで身動きが困難な人を容易に移動・移乗できます。
- 床ずれ防止のための体位変換が容易になります。
- 移動・移乗のためのソフトタイプのスライディングシートです。抱えあげ、ずり動かしなど無理な力をかけないので介護者、対象者双方がとても楽になります。
- 家庭介護でも実用性を重視して選定されたモデルです。取り扱いは簡単で、ご家庭での洗濯も容易にできます。病院や施設など、広範囲にご使用いただけます。

滑りの原理と実際の動き

ノルディックスライドの内側は滑りやすい素材が互いに接しており、その滑りが対象者とベッド、車椅子などの間の摩擦を取り除くので、抱き上げたり、ずり動かしなど無理な力をかけないで水平に移動できます。

★ノルディックスライドの本体の回転効果（右図のような原理）で行われますが、その特徴として、

- 対象者の方とベースに接する表布はズレがおこる事なく常に同じ場所が触れ続けます。
- 筒壁方向にも、開口部方向にも、斜め方向にもどの方向にも滑ります。
- ひねり滑りも可能です。
ひねった状態でもある程度の水平移動は可能です。

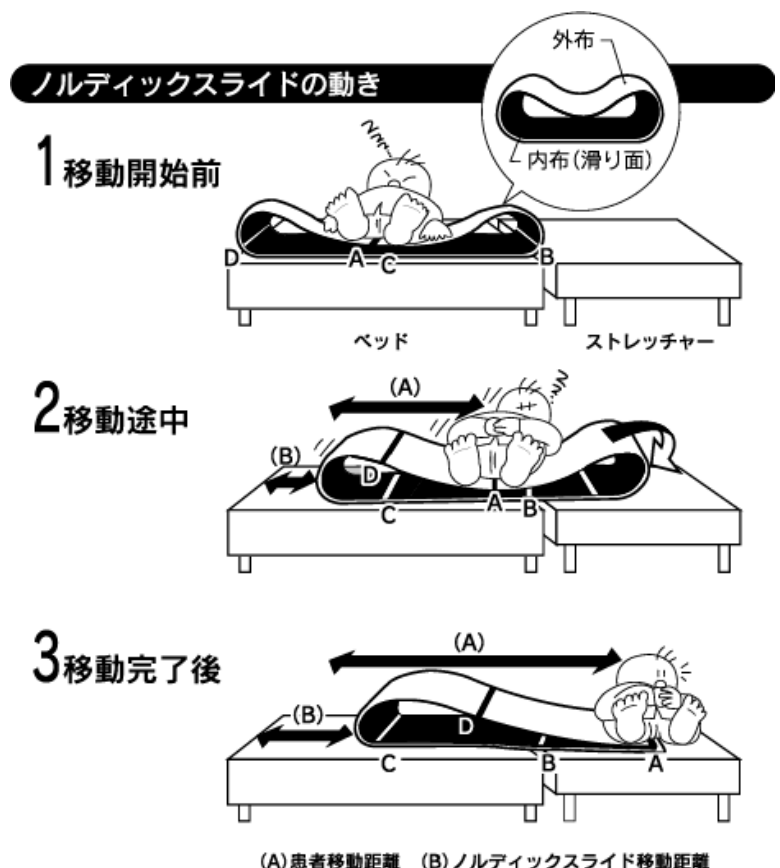

敷き込み

1



仰臥位の状態の対象者をまず介助者側へ側臥位にします。

2



上図のようにシートを敷き再び仰臥位の状態に戻します。

3



対象者を軽く押し上げるようにして、折り込んである部分のノルディックスライドを引き出します。(右側図3)

4



対象者を移動させる際は、ベルトなどを併用し、ノルディックスライドの摩擦軽減と回転効果を利用して図4のように作業を行なってください。


抜き取り

■対象者がノルディックスライドの全面にのっているとき(全身敷き)は、敷き込みの手順と逆の作業で抜き取ってください。

■対象者の方がノルディックスライドの端や、2/3ぐらいだけのっている時。

ノルディックスライドのベッド側(下側)を掴んで引っ張ることにより簡単に抜き取りが出来ます。

※イラストは、作業を分かりやすく表示する為にサイドレールなどを外しています。

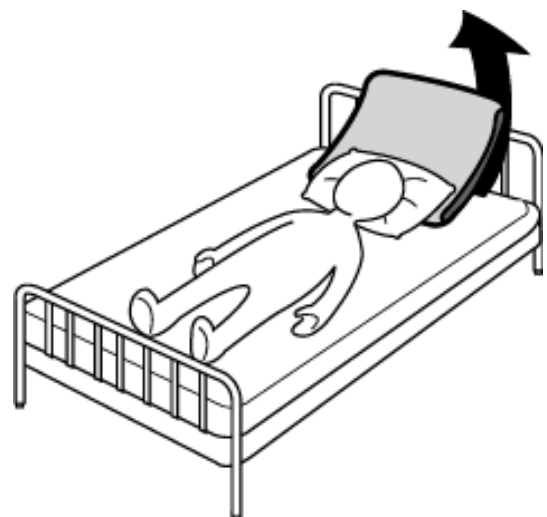

その他のご使用参考例

■ベッドから車椅子への移乗

1




ノルディックスライドを対象者の臀部下半分に敷き込みます。

2




対象者を支え、車椅子へ移乗させます。

3

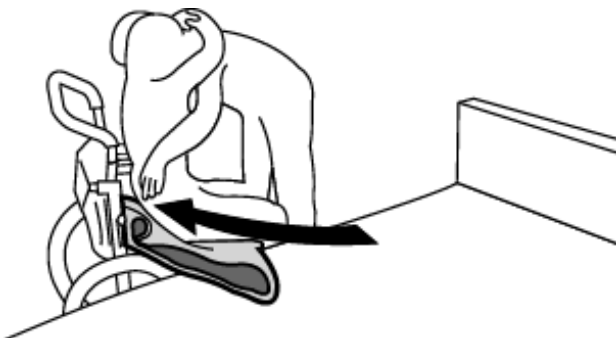

対象者を車椅子の座面に移乗させます。

4

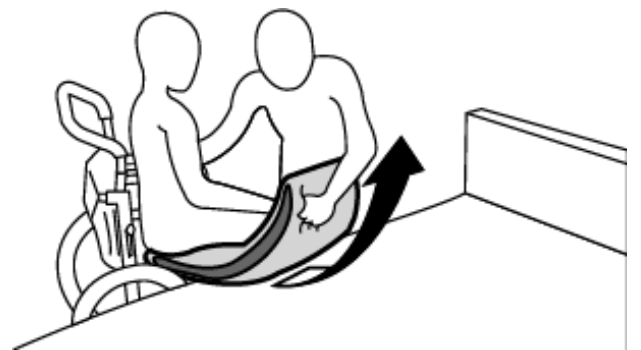


ノルディックスライドの下側の布を軽くつかみ、回転効果を利用して軽く抜き取ってください。

※イラストは、作業を分かりやすく表示する為にサイドレールなどを外しています。


■体位変換（ベッド上での体位変換方法）

1

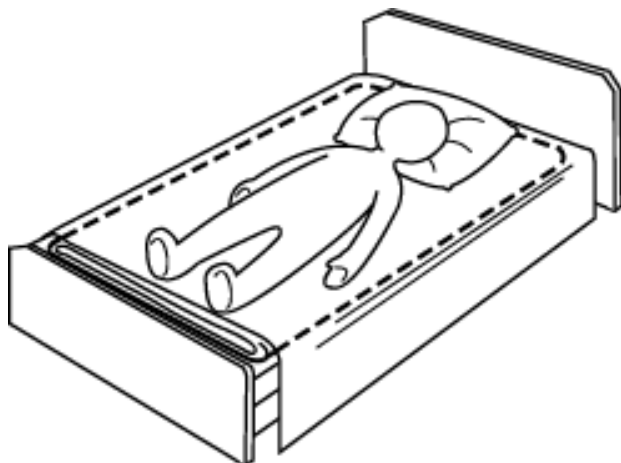


ワイドやロングタイプのノルディックスライドをシーツ下に敷いておきます。

2

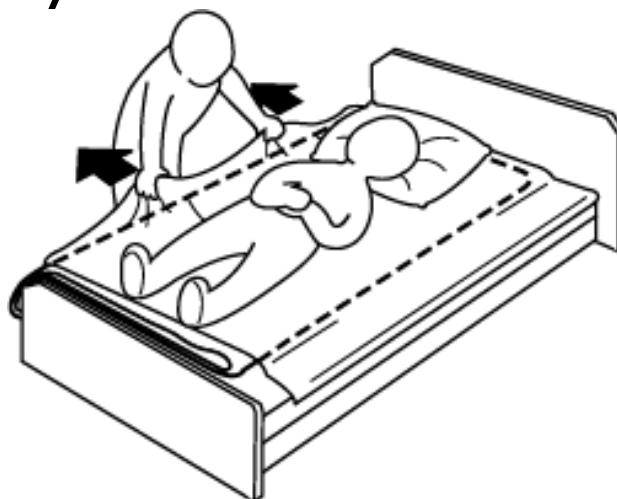


一番上のシーツを介助者側に軽く手前に引き上げるように引きます。

3

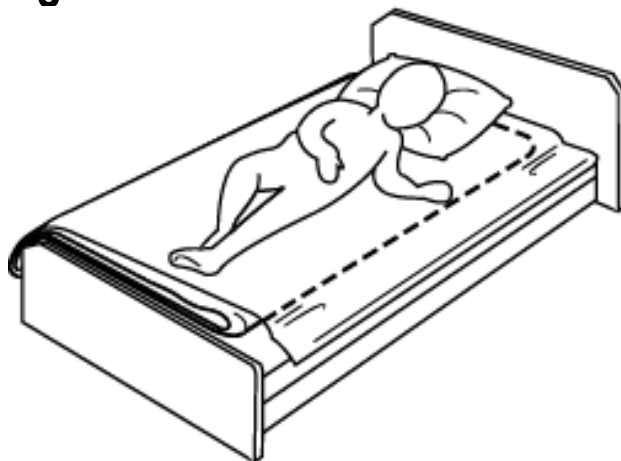

少し手前に引き上げるにより、対象者は傾きます。

4

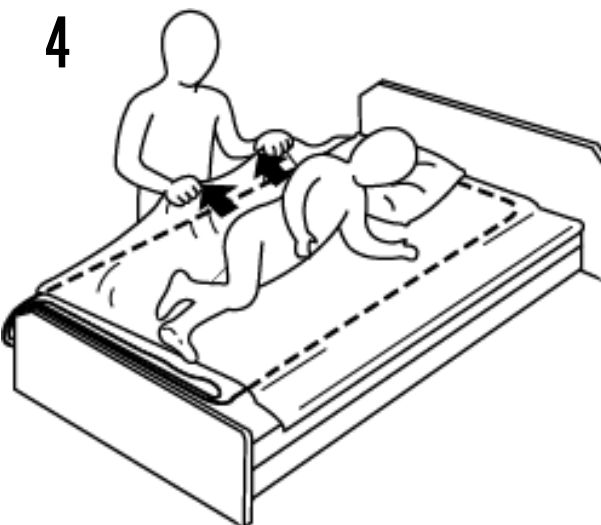

上図のように体位変換を行ってください。

※イラストは、作業を分かりやすく表示する為にサイドレールなどを外しています。

在宅介護の為のアドバイス

- 対象者様の身体状況、使用される他の機器との関係などについて、専門家の指導を受ける事をお勧めします。
- ノルディックスライドの使用は介助者にとっても初めての経験です。対象者の方に使用する前に健常者をモデルに練習し、滑りの特性を十分呑み込んでから利用される事をお勧めします。また、介助者自身がモデルになり『動かされる感覚』をご理解いただく事により、より良い介助が可能になります。

洗濯・乾燥

汚れのつきにくい素材を使用していますが、汚れた場合でもご家庭の洗濯機で容易に洗濯乾燥が可能です。(手洗い・洗濯機・コインランドリー、いずれも可能)熱風乾燥も45℃まで可能です。

廃棄

廃棄する場合は、各自治体の指示にしたがい廃棄処分してください。

その他

- エアーマットや、やわらかい布団上では滑りの性能が十分機能しない場合があります。移動する時エアーマットの空気をいっぱいに入れて強くひっぱった状態にして移動します。
※ノルディックスライドの上にシーツなどを敷いて、それを引っ張るなどの工夫もあります。
- 体位変換の場合はシーツが必要です。汗取りなどの快適マットの併用は差し支えありません。シーツ、快適マットはノルディックスライドの上に敷いてご本人の身体と一緒に滑らせてください。
- ワイドやロングモデルに付いている位置保持用ストラップ(ベルクロ)は体位変換の場合にのみ必要なものです。体位変換に使用する事がない場合は、取り外した方が邪魔にならず、移動の操作が容易になります。
- 使用による消耗で滑り効果が減少していきます。滑り効果が感じられなくなった場合は買い替えてください。

●輸入・販売元

パシフィックサプライ株式会社

本 社 〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1
TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<http://www.p-supply.co.jp/>

販売店

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2017.6