

オルトα / こみち取扱説明書

この度はオルトα / こみちをご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後も大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

⚠ 警告 ※この項目を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不都合を生じ、重傷を負う可能性があります。

- ①ベルトは必ず取り付けてご使用ください。取り付けない状態でご使用された場合、転倒の恐れがあります。
- ②ベルトは正しい方向で取り付けてください。
- ③面ファスナーはしっかり押さえて(圧力をかけて)ご使用ください。不十分な場合、接着力が得られず危険です。
- ④ベルトの調節の際は、面ファスナーで指を傷つけないようにご注意ください。

⚠ 注意 ※この項目を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不都合を生じ、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

- ①ワックスのかけてある場所や、ぬれている場所でのご使用は避けてください。
- ②雨天時、積雪時のご使用は、なるべく避けてください。
- ③サイズが合っていない靴を履くことは危険です。サイズを正しくお選びください。
- ④お手入れ方法は布等で汚れを落とし、素材に応じたクリーナー等でお手入れしてください。※洗濯機では洗わないでください。
- ⑤保管の際には汚れを落とし乾燥させた後、風通しのよい所へ置いてください。汗や湿気を含んでいると、変色やカビの原因となります。
- ⑥直射日光やストーブ、乾燥機等では乾かさないうでください。

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の内容の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認いただけますようお願いいたします。

●その他の特徴

- ①内素材は**抗菌防臭加工**しています。
- ②底材は、適切な部分にグリップ性のある特殊なゴムを使用しています。
- ③交換用のカップインソール(こみち用)は別売しています。

●ベルトの長さ調節方法


この靴のベルトには、長さ調節機能があります。

ベルトの長さを調節するには下記の方法にておこなってください。

- ①靴のカン側の面ファスナーを剥がしてベルトを取り外してください。
(図1)
- ②ベルトを適切な位置で折り、カンに折った部分まで通してください。
(図2)

※ベルトは下記の範囲で折り返してください。下記の範囲以外で折り返した場合、ベルトが破損する恐れがあります。

- ③面ファスナーがずれないように重ねて、しっかり押さえて貼り合わせてください。

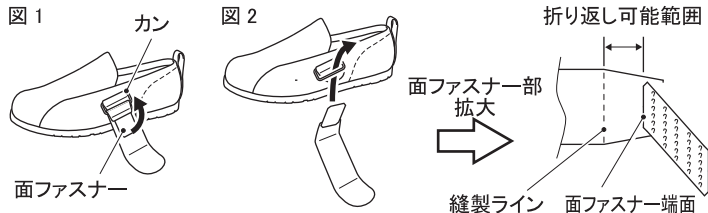

●品質表示

甲 材	合成皮革
甲裏材	ポリエステル 100%、天然皮革
底 材	合成底

オルトαこみちフォーマルタイプ取扱説明書 / 改訂2017.06 / パシフィックサプライ(株)
/ TEL:072-875-8008