

オールターンイットスピナー

この度はオールターンイットスピナーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。オールターンイットスピナーは障害や年齢に関わらず、様々なゲームやイベントへの参加の楽しみを広げます。

◆ 内容品

- 1) スピナー本体（スイッチ・外部スイッチ取付け用端子内蔵）
- 2) オーバーレイ 2枚（大 1枚・小 1枚）
- 3) スピナー プラスチック針
- 4) 透明プラスチックカバー（直径：約 18cm）
- 5) ペン

◆ 電池の入れ方

1. 本体裏面中央下部のカバーを、+ドライバー（商品には含まれません）を用いてねじを外してください。
2. 単 2 電池を 2 本、マイナス（-）から先に入れます。プラス・マイナスの方向が正しく、電池が真っ直ぐに入っているか、確認して下さい。
3. 電池を入れ終えたら、本体裏のカバーを取り付け、+ドライバーを使用してねじを固定してください。

◆ 電池の取外し方

電池は電池ボックスにかなりしっかりと入りますので、取外す際には、端から注意して取り出して下さい。

* 次の組み合わせは絶対に避けて下さい

【古い電池・新しい電池】【蓄電池・乾電池】【アルカリ電池・マンガン電池など種類の異なる組み合わせ】

◆ オーバーレイの取付け（お買い求め頂いた時点では、オーバーレイは取付けされています。）

1. オーバーレイ大をオールターンイットスピナーの土台から取り外します。
2. 透明プラスチックカバーを回転させて、切り込みに合わせてから、取外します。
3. 中央にあるプラスチックの針を、根元を押さえながら持ち上げて取外します。オーバーレイの小をスピナー中央の穴に通して設置します。
* **オーバーレイ小は中央の穴が四角形になっています。ずれないように、プラスチック針の軸下方にある四角形にきちんと合わせて下さい。**
4. プラスチック針を元に戻します。
5. 透明プラスチックカバーを 3ヶ所の切り込みに合わせて設置し、外れないように回します。
* **透明プラスチックカバーは必ず取り付けて、しっかり固定してください。外したり固定が緩んだ状態では針が動きません。**
6. オーバーレイ大をオールターンイットスピナーの土台に置き、3ヶ所のつまみをオールターンイットスピナーの周囲にある切り込みへ挿入します。
* **オーバーレイ大のみを使用する場合は、オーバーレイ小を裏返しにして下さい。白と緑色のコントラストで視覚的にも見やすくなります。**

◆ オールターンイットスピナーの操作方法

内蔵スイッチもしくは外部スイッチを押すと、プラスチック針が回り出します。

◆ 外部スイッチの使い方

内蔵スイッチ以外にも外部スイッチを取付けて使用できます。

また複数の方々で使用される場合、オールターンイットスピナーは動かさずに、外部スイッチのみ押しやすい位置へ移動させて使用することができ、便利です。

1. 3.5mm プラグ付のスイッチをオールターンイットスピナー側面（内蔵スイッチの右側面）の端子へ接続します。
2. 外部スイッチを押すと、針とオーバーレイ小が回ります。

注意：

* プラスチック針は短時間回るようになっていきます。スイッチを連続して何回も押し続けたり、スイッチの上に手を置き、押し続けても、回る速度や結果には影響しません。

◆ スタンドについて

後部には樹脂製のスタンドが付いていますので、60度の角度に立てることができます。

必ず左右2ヶ所のスタンドを引き出してご利用ください。

注意：使用中、内蔵スイッチを押す際に本体が後方へずれてしまう場合、市販されているすべりにくいマットなどをスピナー本体の前方端の下にひいて下さい。

◆ 困ったときには・・・

オールターンニットスピナーが上手く作動しない場合、以下のことについてご確認ください：

1. 電池は正しく装填されていますか？

* 電池ボックスの中で電池のプラス・マイナスの各端は一直線上になっていますか？

* 電池の各端が電池ボックスの金属接触部に接触していますか？

* 電池の残量は十分ですか？

2. オーバーレイは中央の支柱に正しく取付けられていますか？

3. プラスチック針は最後まできちんと挿入されていますか？

4. 針や支柱の動きに妨げとなるような障害物はありませんか？

5. 外部スイッチを使用する場合、その他のゲームや機器でその外部スイッチが正しく作動するかどうか確認して下さい。

注意：

次の症状が現われた場合、おそらく電池の残量が少ないと思われるので、電池を交換して下さい：

* オーバーレイ、針の回るスピードが遅くなった

* スピナーが止まり、再び動き出すまでの時間が長くなった

* オーバーレイ、針が回っている時間が短くなった

上記を確認した後、症状が変わらないようでしたら故障の可能性があります。お手数ですが、お買い求めになった販売店までご連絡下さい。

Feb. 2011

Ablenet 社 日本輸入代理店

パシフィックサプライ株式会社

大 阪 営 業 所	〒574-0064 大阪府大東市御領 1-12-1 TEL 072 (875) 8011 FAX 072 (875) 8015
札 幌 営 業 所	〒003-0023 札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F TEL 011 (218) 5801 FAX 011 (218) 5805
盛 岡 営 業 所	TEL 019 (661) 5407 FAX 019 (661) 5408
東 京 営 業 所	〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-12 グレイスビル2F TEL 03 (3352) 0757 FAX 03 (3355) 3154
名 古 屋 営 業 所	〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西 3-5 TEL 0568 (34) 2696 FAX 0568 (34) 2697
広 島 営 業 所	〒733-0035 広島市西区南観音 7-5-13 日ビル1F TEL 082 (293) 6255 FAX 082 (293) 6299
福 岡 営 業 所	〒812-0054 福岡市東区馬出 2-2-12 TEL 092 (641) 8151 FAX 092 (641) 0444

<http://www.p-supply.co.jp/>