


リハビリ器具

「セラピーマット」シリーズ

取扱説明書

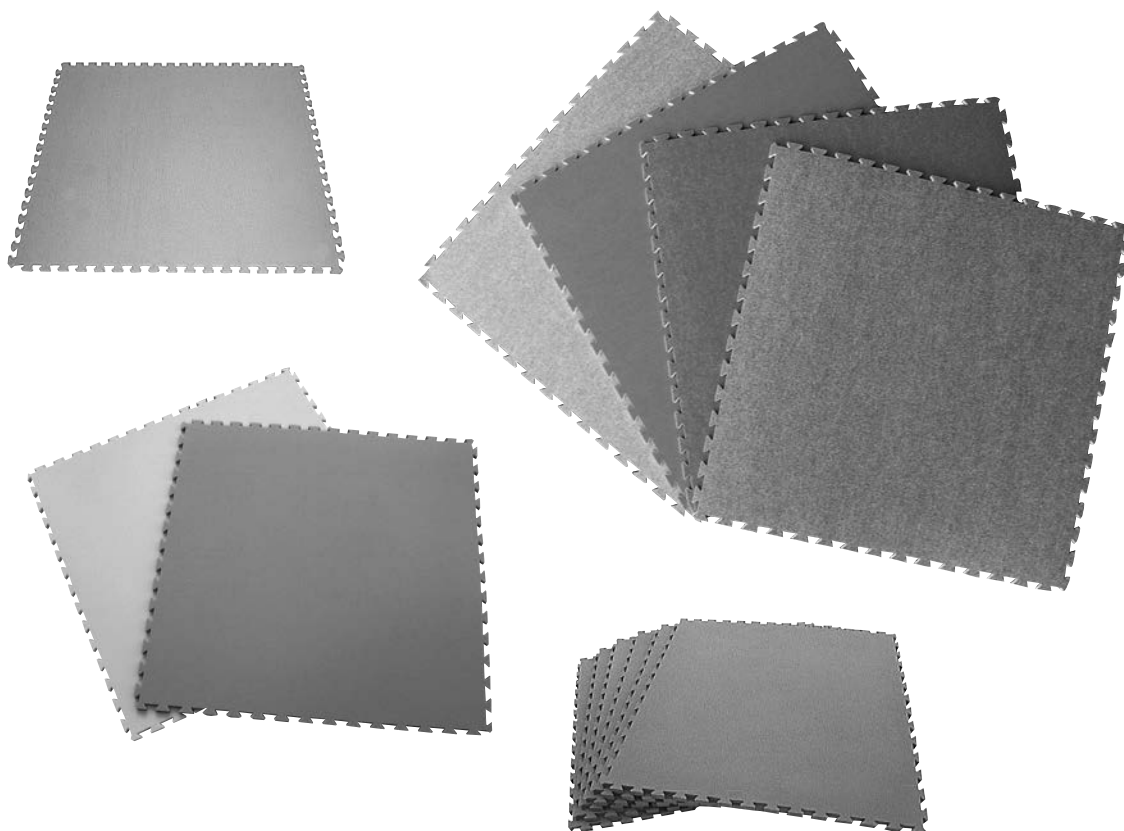

この度は「セラピーマット」各種製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本製品の機能を生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をご理解ください。その後、大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

Pacific Supply

※取扱説明書の内容は、製品の仕様変更などにより予告なく変更する場合がございます。
※必ず、ご購入された製品に梱包されている取扱説明書でご確認頂きます様をお願いします。

転載複写厳禁

製品に関するお問い合わせは本取扱説明書最終ページをご参照ください。

目次

1. 安全にご使用いただくために	3ページ
2. 梱包の解き方	4ページ
3. 各商品の仕様について	4ページ
4. 設置方法	5ページ
5. 使用方法	6ページ
6. 日常の保守点検	7ページ
7. お手入れの方法	7ページ
8. 保管方法	8ページ
9. 修理について	8ページ
10. 廃棄方法	8ページ
11. 保証書	9ページ
12. 保証規定	10ページ

1. 安全にご使用いただくために

注意に関する事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用中に不具合を生じ、
傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本製品を修理改造しないでください。破損等が生じた場合は必ず販売店へ買い替えをご相談ください。
- 常温の範囲で使用してください。常温範囲以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間の放置、熱器具(ストーブなど)の近くでの使用はしないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。また、変形した製品は使用しないでください。
- 保守点検は使用前に本製品使用者または本製品管理者が必ず行なってください。
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に買い替えをご相談ください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本書の安全に関する指示事項には必ず従ってください。
- 本書に規定した方法以外での使い方に対しては、安全性は保証できません。
- 本書は製品とともに常に手元に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。
- 本製品の不断の改良により、詳細において本書の内容と異なる場合があります。
不明な事柄については弊社まで問い合わせてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。
- 本書の内容に関しましては万全を期していますが、万一不審な点や誤り、乱丁、落丁記載漏れなどに
気付いた場合は弊社までご連絡ください。
- 本製品は改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の全部または一部を無断で転載複製することを禁止します。
- 開梱の際にカッターナイフ等で製品を傷つけないようにしてください。
- 高濃度オゾンが発生する場所での使用・保管はしないでください。また、オゾン発生装置の近くでは
使用や保管はしないでください。製品が劣化し変形や破損が生じる恐れがあります。

2. 梱包の解き方

2-1. ダンボールの開梱

本製品はダンボール箱で配送されます。

開梱の際にカッターナイフ等で製品を傷つけないように注意してください。



注意

- 本体を持ち上げる際は必ず2人以上で行ってください。
- 製品の上げ下ろしや移動の際に足や手をはさまないように注意してください。

2-2. 内容物(構成部品)の確認

ダンボール箱の中に次項目(3.各商品の仕様について)に記載されている商品が全て入っているか確認してください。

2-3. 製品の確認

製品に傷や破損がないか確認してください。

もし、なにかありましたら、販売店(P9参照)へお問い合わせください。

3. 各商品の仕様について

商品名	色	サイズ(cm)	厚さ(cm)	材質	防災	抗菌性能	シボ加工	耐久性	防水性
スーパーセラピーマット	ブルー、ピンク	92×92	1.4	ポリエチレン	○	あり	両面	○	○
セラピーマットスポーツタイプ	ブルー	90×90	2.0		×	なし	両面	△	◎
セラピーフローア	モスグリーン	110×110	1.5		×	なし	片面	◎	○
セラピーフローアEタイプ	モスグリーン	110×110	1.5		×	なし	両面	◎	○
セラピーマット防災タイプ	ライトブルー、 ライトグリーン、 オレンジ、 ピンク	87.5×87.5	1.5		○	なし	なし	○	△

※セラピーマットとスーパーセラピーマットはジョイントが可能です。

その他の製品同士はサイズやジョイント部の形状が違うため、ジョイントできません。ご注意ください。

※製品の性質上、サイズや厚みには多少の誤差が生じることがございます。

4. 設置方法

設置する前に

設置場所を確認してください。



警告

- 本製品は床材としては使用できません。
接着剤等で床に接着させないでください。



注意

- 常温の範囲でご使用ください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内に長時間の放置、熱器具(ストーブなど)の近くでの使用はしないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。また、変形した製品は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。

5. 使用方法

本製品を使用する前に

警告

- 平らな場所に広げてご使用ください。
- ジョイントして使用する際は、ジョイント部が平らになるよう、しっかりはめ込んでください。
つまずいて、怪我をする恐れがあります。
- 常温の範囲で使用してください。常温以外で使用すると、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 夏場など外気温が高くなり、室温が40℃以上になる場合、マットが膨張することがあります。
その際は冷房などで室温を調整した上でご使用ください。
また、床面に隙間なく敷きつめたままにすると波を打ったようになることがありますので、
室温が上がる際は、枚数を調整してください。
- 本製品を使用する場合は使用方法や取扱注意事項などがご理解いただけるまでご使用にならないで
ください。
- 保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行なってください。
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し販売店に買い替えをご相談ください。

注意

- 本製品を修理改造しないでください。破損などが生じた場合は必ず販売店へ買い替えをご相談ください。
- 製品の性質上、寒暖差により収縮することがあります。床暖房などの使用にはご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や炎天下の車内での長時間の放置、熱器具（ストーブなど）の近くでの使用はしないでください。熱により変色や変形する恐れがあります。また、変形した製品は使用しないでください。
- 使用保管の際は、火気器具等に近づけないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 製品の製造工程の都合上、使用し始めの際に、においがする場合がございます。
あまりに強いにおいがする場合は、陰干しして発散させてください。なお品質に影響はありません。

6. 日常の保守点検

下記の日常点検を行ってください。また、保守点検を行っていない場合は使用しないでください。



- 保守点検は使用前に操作者または本製品管理者が必ず行なってください。
また、保守点検を行っていない製品は使用しないでください。
- 保守点検の結果、異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、販売店に
買い替えをご相談ください。

■ チェック項目

- 製品が変形していないか
- 製品に亀裂や破損がないか
- 製品に過度な汚れやヘタリがないか

7. お手入れの方法

- ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- 日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、硬くしぼった布で洗剤が残らないように拭き取った後、
柔らかい布で乾拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤は、絶対に使用しないでください。
マットが劣化、破損し怪我をする恐れがあります。
- タワシや磨き粉・研磨剤入りのスポンジなどは絶対に使用しないでください。
- 乾燥は、40℃以下で直射日光の当たらないところで陰干ししてください。
直射日光を当てたり、熱湯をかけたりすると変形変色の恐れがあります。

8. 保管方法

- 常温の範囲で保管してください。常温以外で保管すると変形や破損を生じる恐れがあります。
- 湿気の少ない風通しのよい場所に保管してください。
- 高濃度オゾンが発生する場所では保管しないでください。また、オゾン発生装置の近くでは使用や保管をしないでください。製品が劣化し、変形や破損を生じる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものをのせないでください。製品が変形または破損する恐れがあります。
- 本書は常に製品とともに手元に保管し紛失しないようにしてください。
- 本書を紛失または損傷した場合は速やかに弊社までご連絡ください。

9. 修理について

- 無断で修理・部品交換・改造などは絶対に行わないでください。
- 本製品の修理・部品交換・改造などが必要と思われる場合は販売店にご相談ください。

10. 廃棄方法

- 本製品の材質は、「3.各商品の仕様について (P4) 」を参照ください。
- 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

11. 保証書

保証書

本製品は品質管理・検査のもとに皆様のお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規定に基づき無償交換いたします。その際は現品に本保証書を添えてご購入の販売店へご提出ください。

品名	<input type="checkbox"/> スーパーセラピーマット <input type="checkbox"/> セラピーフロー <input type="checkbox"/> セラピーマット防災タイプ	<input type="checkbox"/> セラピーマットスポーツタイプ <input type="checkbox"/> セラピーフローEタイプ
ご購入年月日		
お客様名		
ご住所	〒	
TEL		
販売店		
保証期間	6ヶ月保証	

- ご購入年月日、お客様名や販売店の欄に記入のない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。記入がない場合は、直ちに販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書および保証規定に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間が過ぎた後の修理等についてのご不明の場合は、弊社までお問い合わせください。

※保証規定は次頁をご覧ください。

保証規定

- (1) 保証期間はご購入の日から6ヶ月間です。
保証期間内に発生した故障については無償交換いたします。
- (2) 保証の対象となる部分はこの製品一式です。
ただし、本製品を取り付けた建物への影響や、布地・張地の劣化による故障・損傷や鋭利な物による破損、裂傷は除きます。
- (3) 無償交換には保証書の提出が必要です。
- (4) 次の場合には保証できませんが、特にご希望の方には実費にて交換いたします。その際、出張・配送費用をいただく場合があります。
 - ① 保証書を紛失された場合
 - ② 誤ったご使用方法による故障・損傷
 - ③ 火災、地震等の天災地変による故障・損傷
 - ④ 保証書にご購入日、お客様名の記入のない場合、または不当変更を加えられた場合
 - ⑤ ご購入後の輸送・移動・落下等による故障・損傷
- (5) ご相談窓口は販売店にて承ります。
- (6) その他
 - ① 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ② 本書の再発行はいたしません。



< 販売元 >

 **パシフィックサプライ株式会社**

本社 / 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL 072(875)8008 FAX 072(875)8010

<https://www.p-supply.co.jp/>

※取扱説明書の著作権はパシフィックサプライ株式会社に帰属しており、許可なく取扱説明書の全て、または一部を複製することはお断りいたします。

2024.09 改訂版