

# 保証書

品名	ミオTrain			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、ご購入の販売店までご連絡ください。

## 保証規程

1. 保証期間はご購入年月日から2ヶ月間です。
2. 無償交換には、保証書および販売時のレシートの提出を要します。
3. 次の場合には保証は致しかねます。
  - (1) 保証書を紛失された場合
  - (2) 火災、地震等の天災地変による故障、損傷が生じた場合
  - (3) ご購入後の輸送・移動・落下等による故障、損傷が生じた場合
  - (4) 保証書のご購入年月日、お客様欄、販売店名の記入の無い場合、または不当に変更を加えられた場合
  - (5) 取扱説明書に記載されていない誤った使用・装着・洗濯方法をされた場合
  - (6) お客様による誤った修理・改造・分解をされた場合
  - (7) 爪等の鋭利な物によるひっかき、地面等との接触や摩擦による擦れなど、品質に関わらない故障・損傷が生じた場合
  - (8) 製品のシリアルナンバーが分からない場合
  - (9) その他弊社が保証の必要がないと判断した場合
4. ご相談窓口は、ご購入の販売店にて承ります。
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
6. 保証書の再発行いたしません。

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2024.12

# ミオTrain 取扱説明書



## SUPPORTING ATHLETES

パウアーファインドのサポーターに関しては、  
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

パウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<https://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



Instagram



Facebook



X

パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。



## ミオTrain

BAUERFEIND



注意

- スポーツ時など、激しい運動をされる際にお使いください。
- 長時間身体を動かさない(座るなど)時には、使用をお控えください。


- 痛みをカバーする二種類のシリコーンインサートが付属しています。
- マジックテープ®ストラップにより、装着・取り外し調整が容易にできます。
- 解剖学的形状に編まれたニット素材が固有受容覚の働きを助けます。

主な  
適応

- \* 太ももの痛み
- \* 肉離れ

## ミオTrainの装着方法

- 図1** ベルトおよびアイレット(カンのついたパーツ)を外してマジックテープ®のメスの部分が前後にくるように太ももに装着します。
- 図2** 上部を1/3ほどめくり、大きいほうのシリコーンインサートを挿入してください。圧迫の度合いを増したい場合はさらに小さいほうのシリコーンインサートを重ねます。めくった上部を戻します。
- 図3** 後ろ側のマジックテープ®のメスの部分にベルト、前面にアイレットを取り付けます。
- 図4** ベルトを下から順番にアイレットの坎に通します。ベルトの締め具合で圧迫を調整します。

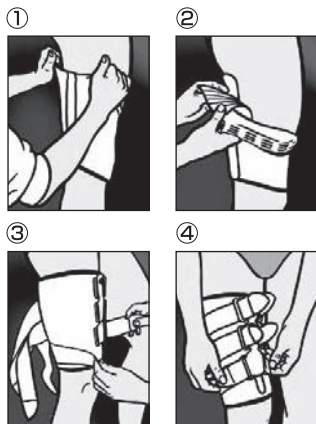

## お手入れの方法



注意

- 洗濯は中性洗剤を使用して、30℃以下の水又はぬるま湯で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行なわないでください。



洗濯機使用時  
ネットに入れて  
洗濯可



×漂白剤



×アイロン




×ドライクリーニング



×乾燥機

サイズ (cm)

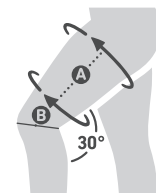

A 30 cm B 2 cm

- ※本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。
- ※廃棄については各自自治体の指示に従ってください。

	大腿部下方周径	大腿部上方周径
サイズ 1	32~35cm	44~48cm
サイズ 2	35~38cm	48~52cm
サイズ 3	38~41cm	52~56cm
サイズ 4	41~44cm	56~60cm
サイズ 5	44~47cm	60~64cm
サイズ 6	47~50cm	64~68cm
サイズ 7	50~53cm	68~72cm



注意

製品にはシリアルナンバーが記載されたタグが縫製されています。  
(一部のソックス・インソール製品を除く)  
シリアルナンバーがわからない場合、保証期間内であっても製品の保証対象外となりますのでタグは切り取らないようお願いいたします。