



SUPPORTING
THE GAMES



バウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

バウアーファインド 特設サイトはこちら ▶
<http://www.p-supply.co.jp/bauerfeind/index.html>



バウアーファインド フェイスブックはこちら ▶
<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>



マレオTrain® 取扱説明書

パシフィックサプライのホームページで

製品レビュー

を書きませんか？

パシフィックサプライのホームページで、「製品レビュー」を書き込めます。

製品の満足度 5 段階評価を「★」で評価でき、ご使用した感想やご意見を書き込んでいただけます。

皆様の書き込みが製品購入の際の参考になります。

どなた様でも書き込みいただけますので、ご使用の製品のレビューを書き込んでください。

「マレオTrain®」のページ
<http://www.p-supply.co.jp/products/332>



パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。



マレオTrain®

BAUERFEIND®



注意

- スポーツ時など、激しい運動をされる際にお使いください。
- 長時間身体を動かさない（座るなど）時には、使用をお控えください。

マレオTrain®は足首の不安から解き放つ、スポーツに最適なサポーターです。

- ムレ感を抑えた、肌にやさしいニット編み。
- 立体縫製により、高いフィット感がもたらされます。

主な適応

- * 足関節の捻挫、変形性関節症、関節炎、外傷後及び術後の炎症
- * 不安定症

マレオTrain®の装着方法

図1 本製品上部をヒールウェッジが挿められるまで外側に折り曲げます。



図1

図2 踵がヒールウェッジの位置に来るまで足部にかぶせます。



図2

図3 パッドの窪みが外果に沿うように、先に折り曲げていた部分を引き上げます。



図3

図4 必要に応じて調整します。



図4

お手入れの方法



注意

- 洗濯は中性洗剤を使用して、30℃以下のお湯で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行なわないでください。



洗濯機使用時
ネットに入れて
洗濯可



×漂白剤



×アイロン




×ドライクリーニング



×乾燥機

サイズ (cm)

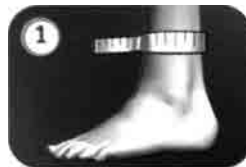

※本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。
※廃棄については各自自治体の指示に従ってください。
※製品の保証期間は通常使用の範囲に限り、弊社出荷日より1年です。

サイズ	周囲①
1	17~19cm
2	19~21cm
3	21~23cm
4	23~25cm
5	25~27cm
6	27~29cm

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)