

JA お客様各位、

この度は、パワーファインド社製品をご購入いただき誠に有難うございます。ValguLoc® は高品質の医療製品です。

ご使用前に本取扱い説明書を良くお読みになり、万一ご不明な点がございましたら、担当医師、取扱い専門店、または弊社技術サービス部門までご連絡下さい。

足の親指が他の指に向けて屈曲した状態である外反母趾は開張足を原因とするものです。ハイヒールやつま先周りが過度に窮屈な靴によって足に過剰なストレスがかかる場合に問題が生じます。その結果、母指球および中の滑液包が炎症を起こして痛むことがあります。このような場合にValguLoc® はその症状を軽減させます。ValguLoc® は靴を履かずに使用するもので、主として足に負荷がかからない夜間に装着します。ValguLoc® は足の軟部組織および関節包を持続的に伸展させることによって足趾のアンバランスを正します。静かに力が加わることによって足の親指は徐々に矯正されます。

△ 整形装具¹としての最大限の効果と快適な装着性を享受していただく為、ValguLoc®の適合は個々のお客様ごとに経験のある義肢装具士が行うようにしてください。

△ 適用症例

- 足の親指の小指方向への屈曲(外反母趾) - 非外科的および外科的

副作用

全身性の副作用はこれまで報告されていませんが、正しい装着が前提となります。外側から身体に取り付けたサポーターや装具は、いずれも過度に締め付けることにより局所圧迫症状が生じたり、稀にその部位の血管や神経を圧迫したりする恐れがあります。

禁忌

健康を害するような過敏反応はこれまで報告されていません。下記のような状態の場合は、装着前に必ず担当医師にご相談下さい。

1. 装着部位に皮膚障害や損傷、特に炎症が認められる場合。同様に、腫れ、発赤、高度の発熱を伴った隆起癬痕が認められる場合。
2. 足の感覚障害または循環障害。例：糖尿病など
3. リンパ排出機能障害 - 装着部位から離れたところに見られる原因不明の軟部組織の隆起なども含まれる。
4. 痛風。


ValguLoc® の装着

1. ベルクロテープを外します。
2. 凹面部に収まるまで、足の親指をテープとプラスチック製締め具の間に押し込みます。
3. 足底部に垂れ下がった補正テープを締め具のスリットに通します。
4. 親指が正しいと思われる位置にくるまで痛くない程度にテープを引っ張り、ベルクロ部分に固定します。

△ 使用上の注意

- ValguLoc® は医師の指示に従って装着してください。ご使用に当たりこの取扱説明書に従い、記載された適用部位にのみ装着してください。
- 本製品は一個人の方の使用に限定してください。
- 本製品を装着したまま歩かないで下さい。
- 本製品は足に荷重がかかっていない状態においてのみ使用されるべきものです。
- 異なった方法で使用された場合には保証が適用されません。
- 本製品に改造を加えないでください。改造により製品の機能が低下することがあり、従って保証は適用されません。
- 万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合、直ちに医師にご相談ください。
- 圧迫靴下など他の製品と併用される場合は、前もって医師にご相談ください。
- 軟膏、ローション、または油分や酸を含む液体が製品に付着しないようご注意ください。
- 保証は法規制に基づいて行われず。
- 廃棄は各自自治体の指示に従ってください。

取扱い上の注意

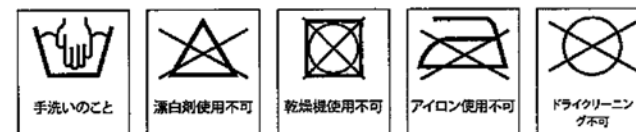

サポーターは非アルカリ性の洗剤(中性洗剤)を用いて他の洗濯物とは別に手洗いして下さい。ベルクロテープを痛めずに接着力を長期間保持する為にも、お洗濯前にベルクロテープを閉じておいてください。本製品を熱源(ヒーター、直射日光など)に直接さらさないで下さい。

本製品は弊社品質管理システムにより検査済みですが、万一ご不満な点がございましたら、お買い上げの専門店、もしくは弊社カスタマーサービス部門までご連絡下さい。

2011年04月 版

¹ 整形装具 = 整形外科用の器具で、四肢や胴体の安定、緩和、固定、調整、矯正に使用します。