

保証書

品名	ルンボTrainストレート/ルンボTrainウェスト			
お客様	ご住所 〒			
	(フリガナ)			
	お名前			
ご購入年月日	西暦	年	月	日
販売店名				
保証期間	ご購入日より 2ヶ月間			

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ご購入年月日、お客様の欄及び販売店名に記載のない場合は、無効となります。必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちに販売店にお申し出ください。
- この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 商品のご使用中に故障又は不具合が発生した場合、ご購入の販売店までご連絡ください。

保証規程

- 保証期間はご購入年月日から2ヶ月間です。
- 無償交換には、保証書および販売時のレシートの提出を要します。
- 次の場合には保証は致しかねます。
 - 保証書を紛失された場合
 - 火災、地震等の天災地変による故障、損傷が生じた場合
 - ご購入後の輸送・移動・落下等による故障、損傷が生じた場合
 - 保証書のご購入年月日、お客様欄、販売店名の記入の無い場合、または不当に変更を加えられた場合
 - 取扱説明書に記載されていない誤った使用・装着・洗濯方法をされた場合
 - お客様による誤った修理・改造・分解をされた場合
 - 爪等の鋭利な物によるひっかき、地面等との接触や摩擦による擦れなど、品質に関わらない故障・損傷が生じた場合
 - 製品のシリアルナンバーが分からない場合
 - その他弊社が保証の必要がないと判断した場合
- ご相談窓口は、ご購入の販売店にて承ります。
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 保証書の再発行はいたしません。

パウアーファインド社 正規販売代理店

パシフィックサプライ株式会社 (本社) 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8008(代) FAX.072-875-8010(代)

2024.12

ルンボTrainストレート ルンボTrainウェスト 取扱説明書



SUPPORTING
ATHLETES

パウアーファインドのサポーターに関しては、
下記サイトにも多くの情報を掲載しています。

パウアーファインド 特設サイトはこちら ▶

<https://bauerfeind.p-supply.co.jp/>



Instagram



Facebook



X

パウアーファインド社発行の取扱説明書（多言語対応版）を製品へ封入しておりますが、日本語ページについては、こちらの取扱説明書をご覧ください。



BAUERFEIND

ルンボTrainストレート ルンボTrainウェスト


注意

- 歩行などの日常生活やスポーツなどの運動をされる際にお使いください。
- 長時間身体を動かさない（座るなど）時には、使用をお控えください。
- 座位時と立位時の腹囲の差が15%以上ある場合は、マジックテープ部に過度な負荷がかかるため使用しないでください。

- 骨盤の形状にあわせた編み方で快適にフィット
- 前面のフラットベルトとハンドストラップで簡単に着脱が可能
- シリコンパッドが腰部に快適なコンプレッションを加えます。

装着方法

- 1 背部のシリコンパッドがサポーターの中央にくるように貼り合わせます
- 2 前面のハンドストラップに親指以外の4本指を入れ、左右均等に力を入れながらサポーターを引っ張ります。
- 3 均等に力を入れたまま左、右の順に重ね合わせます。
- 4 手を抜く際も左、右の順に抜いてください。

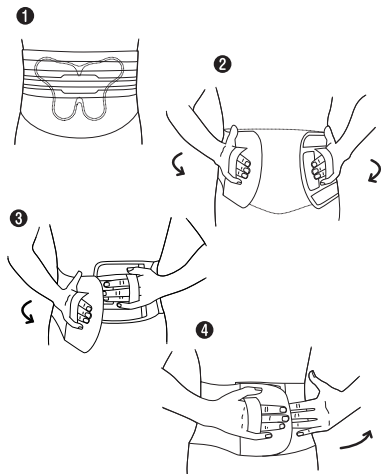

お手入れの方法

注意

- 洗濯は中性洗剤を使用して、30℃以下の水又はぬるま湯で行なってください。
- 洗濯機使用時はネットに入れて洗濯してください。
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で自然乾燥させてください。
- ドライクリーニングは行なわないでください。



洗濯機使用時
ネットに入れて
洗濯可



×漂白剤



×アイロン




×ドライクリーニング



×乾燥機

サイズ (cm)

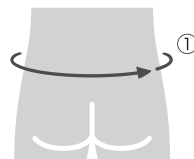

※本製品は改良のため、予告なく変更を行なう場合があります。
※廃棄については各自治体の指示に従ってください。

ルンボTrainストレート/ルンボTrainウェスト

サイズ	腰部周囲①
1	75~80cm
サイズ	腰部周囲①
2	80~90cm
サイズ	腰部周囲①
3	90~100cm
サイズ	腰部周囲①
4	100~110cm
サイズ	腰部周囲①
5	110~120cm
サイズ	腰部周囲①
6	120~130cm
サイズ	腰部周囲①
7	130~145cm

注意

製品にはシリアルナンバーが記載されたタグが縫製されています。
（一部のソックス・インソール製品を除く）
シリアルナンバーがわからない場合、保証期間内であっても製品の保証対象外となりますのでタグは切り取らないようお願いいたします。